

# Monteringsanvisning

## Parnell Premier Plus art nr 091324490




1 Passa in handtaget i bottenapparna. Kontrollera att stödet sitter stadigt, hela tapparna ska döljas av handtaget. Kan ställas på valfri långsida av sängen.



2 Skjut in stödet mot sängen. Det ska stå helt intryckt mot sängen, utan luft mellan stöd och sängram.



3 Skruva fast de två skruvarna som finns i påsen med originalanvisningen.

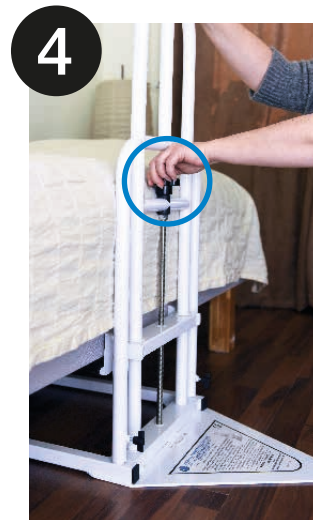

4 Lokalisera de två krokarna under sängramen och vrid den stora svarta ratten medsols tills du känner motstånd. Fortsätt att vrida tills ratten är hårt åtdragen.

Handtagets höjd 92 cm

Handtagets bredd 28 cm/  
övre delen

Djup ram inkl golvplatta 82 cm

Bredd 40 cm




### Fakta

#### Utrymme under sängen:

Ej under 3 cm  
Ej över 37 cm

Produktvikt: 11 kg  
Brukarvikt: max 165 kg  
Rengöring: vanliga rengöringsmedel

Krokens mått:  
höjd 7,5 cm  
djup 4 cm

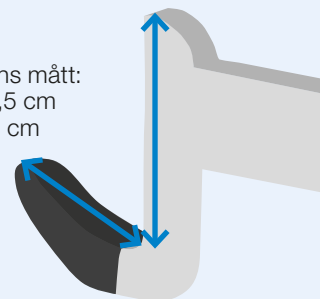

Material: kraftigt vitlackerat stål.  
Skrudar i hårdplast.

Inga verktyg behöver användas vid montering.

OBS! Får inte användas med förhöjningskoner.



EUFORIA, Södergatan 38, 195 47 Märsta

Tel 08-591 292 50 Fax 08-591 297 84 info@euforia.se www.euforia.se