


Storlekstabell

091120484	Small	Ställbar längd 48 cm – 78,5 cm
091120492	Medium	Ställbar längd 78,5 cm – 116,5 cm
091120500	Large	Ställbar längd 109 cm – 142 cm

Vårdbältena har fyra stående och tre liggande handtag och en ögla. Dom är tillverkade i kraftig sadeljordsväv som är insytt i fleece. Detta ger vårdbältena hög komfort. Dom kan tvättas i maskin och torktumlas på låg temperatur.



Placera vårdbältet runt midjan på brukaren och fäst med kardborren. Lås sedan vårdbältet med spännet.

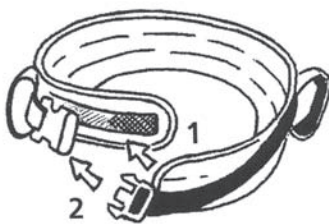

1. Kardborrefästet
2. Spännet



- Vårdbältet kan användas för att t ex hjälpa brukaren från sittande till stående.
- Vårdbältet underlättar många förflyttningar.
- Vårdbältet är lätt att använda tillsammans med glidlakan.