


## Utprovningsprotokoll

# Krycka med reumatikerhandtag

**Art.nr. 091437888**

- 1** Ställ in lämplig höjd med tryckknappen.
  - 2** Placera underarmen i underarmsstödet och spänn fast med kardborrefästet.
  - 3** Justera avståndet mellan handtaget och underarmsstödet med låsskruvarna.
- !** Var noga med att belasta kryckan rakt ovanifrån.

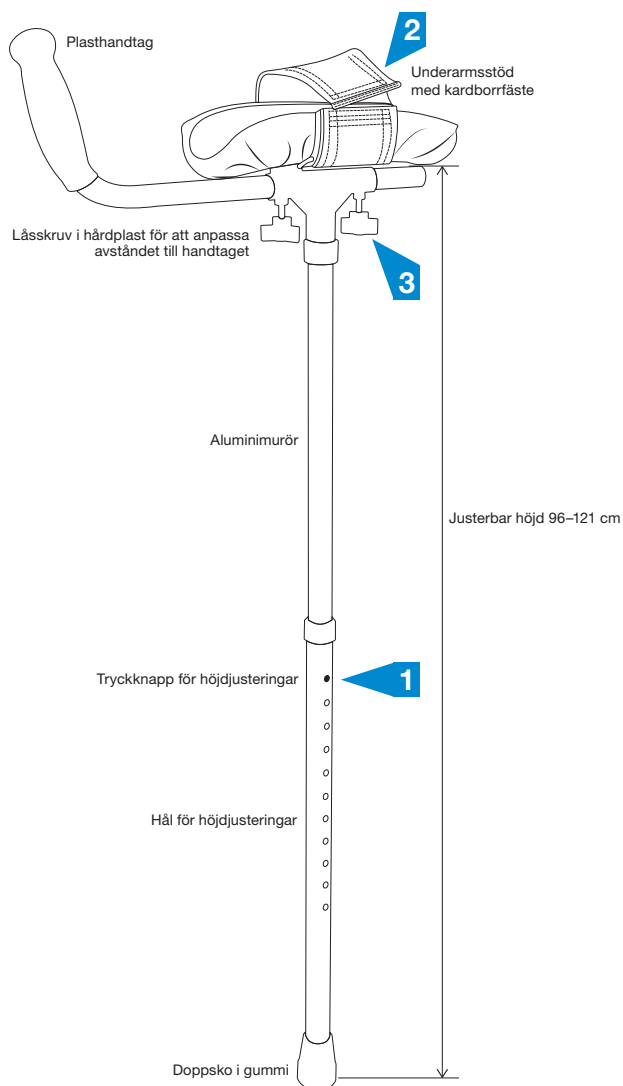

### Fakta

Ställbar höjd: 96–121 cm

Brukarvikt: max 160 kg

Rengöring: vanliga rengöringsmedel

Reservdel: doppsko (art.nr. 091356153)

