



## Homecraft upphöjd toalettstol Monteringsanvisning



Artikelnr: 091558873

Max brukarvikt: 136 kg

Dessa två hål måste vara genomgående så att sitsen kan fästas från undersidan.




Homecraft upphöjd toalettstol med uppfällbara armar ger ökat oberoende genom att kompensera för nedsatt rörelse. Det är viktigt att den monteras på rätt sätt för säker användning.

Stolen kan ställas in för tre möjliga sitthöjder för anpassad passform, 60, 100 eller 150 mm. Med rätt höjd skall dina fötter kunna röra golvet, med höftleden högre än knäleden. Detta hindrar att höft- och knäleder böjs över 90 grader, vilket är särskilt viktigt efter ersättningskirurgi.

Börja med att ta bort den gamla sitsen och locket från toaletten. Kontrollera att toaletten har genomgående hål i stolens porslin, för att fästa toaupphöjningen i, vilket de allra flesta toaletter har. (Se vänstra bilden). detta är helt nödvändigt eftersom toaförhöjningen säkras på hålens undersida.

Tag nu fram toaförhöjningen och lägg den upp och ner på en plan yta. Då ser den ut så här.

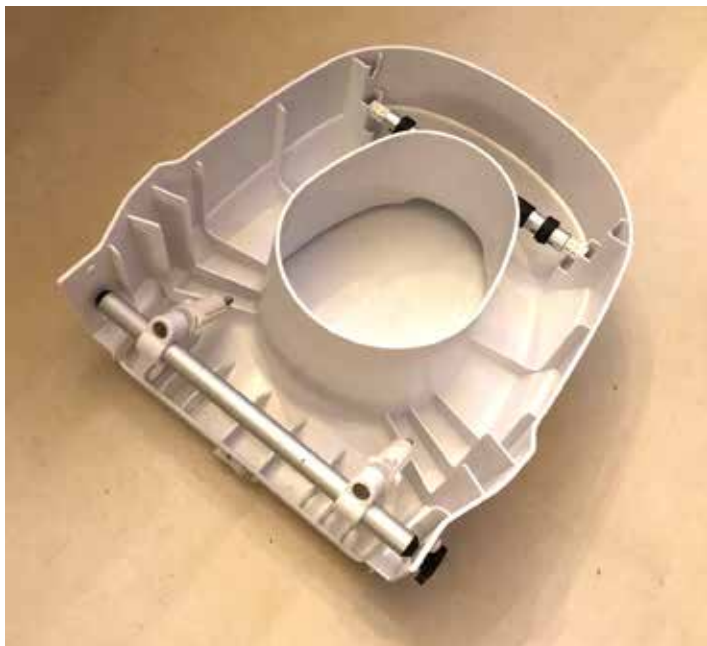

Du ser nu en tvärgående stång i sitsens framkant och en tvärgående stång i bak-kanten. De används för att ställa in sitthöjden för brukaren. De skall ställas in så att när brukaren sitter på stolen så skall fötterna helt nå till golvet. Detta hindrar att höft- och knäleder böjs över 90 grader.

För den minsta sitthöjden, 60 mm, skall bägge stängerna vara så nära sitsens ovan-sids som möjligt, för största sitthöjd skall de vara så långt från sitsens ovasida som möjligt.



Detta är den tvärgående stängen i sitsens framkant.

Den vita innerdelen kan flyttas i sidled när clipset tagits bort.

Det svarta clipset har en genomgående metallpinne som skall passas in i rätt hål på metallstängens, beroende på vilken höjd som väljs. Tryck bort clipset från stängens, flytta den vita innerdelen i sidled så att hålet hamnar på det ställe du valt. Tryck sedan fast det svarta clipset igen så att metallpinnen sticker ut genom det hål du valt.


Gör samma sak på andra sidan av stängens, har du valt innersta hålet på första sidan så väljer du innersta hållet även här.

Hål för 60 mm  
Hål för 100 mm  
Hål för 150 mm



Här finns fästena för tre olika sitthöjder.

Nu trycker du fast stängens i de fästena som bredden har anpassats till.

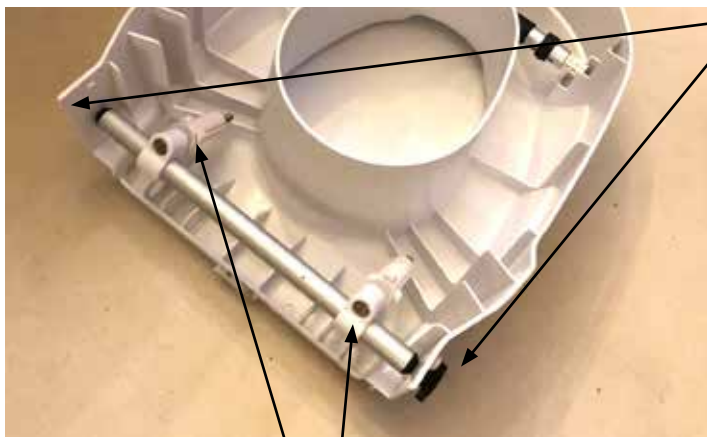

För att flytta den bakre stången till rätt höjdläge så skruvar du loss de svarta yttre vreden.

Välj motsvarande höjd som i framkanten. Sitter stången i framkanten nära sitsens ovansida så skall även den bakre stången göra det.

När du placerat stången på rätt höjd så skruva tillbaka de svarta yttre vreden.

Nu skall du sätta toaförhöjningen på plats och då är det dags att titta på de två delar (bultar), som dessa pilar pekar på.

Börja med att vända toaförhöjningen så att du får rätt sida upp. Skruva nu loss de två delarna från bägge bultarna, så som du ser på den vänstra bulten här på bilden.

Bultarna går att flytta fritt i sidled på stången de sitter på. Därför kan du nu enkelt sätta hela toaförhöjningen på plats på den befintliga toaletten, genom att sticka ner bultarna genom hålen där den gamla sitsen satt.




Då du stuckit bultarna igenom hålen skall de två delarna som du lossats från varje bult skruvas fast från undersidan.

Börja med den lilla delen, den skall sättas med den platta sidan uppåt.

Sätt sedan dit den större vita delen med den tjockaste delen neråt.

Innan du skruvar åt delarna ordentligt, se noga till att toaförhöjningen är centrerad i sidled på toaletten.

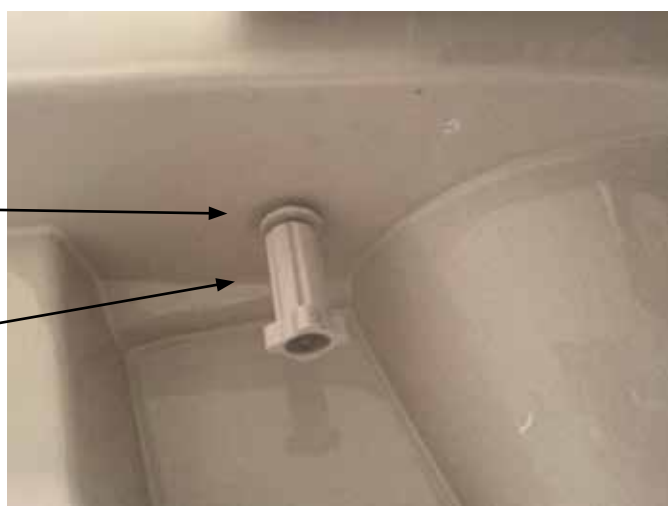



Håll det ena handtaget uppåt och tryck in det i hålet på sidan. Fäll ner det och kontrollera att det sitter ordentligt fast och vilar stadigt på plastavsatsen.

Gör likadant med handtaget för den andra sidan.

- Med jämna mellanrum bör du kontrollera att de bakre fästskruvarna och handtagen sitter ordentligt fast.
- Innan användning bör du också kontrollera att själva toalettstolen sitter ordentligt fast i golvet.
- Stå aldrig uppe på toalettförhöjningen eller armstöden.

