



Stödhandtag för badkaret



Användaranvisning

Ställbar bredd innebär bredden på badkarets kant.

091078443	Höjd	34,9 cm	Ställbar bredd	8,3 cm – 14 cm
091078450	Höjd	37,5 cm	Ställbar bredd	7,6 cm – 17,8 cm
091078468	Höjd	26,7 cm	Ställbar bredd	5,7 cm – 14 cm
091078476	Höjd	26,7 cm	Ställbar bredd	5,7 cm – 14 cm

Tillse att badkarets frontplåt är rätt monterad. Sätt den medföljande självhäftande refflade plattan på handtagets yttre fästplatta. Sätt handtaget på plats och dra fast.

Stödhandtaget kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 100 kg.

