

Tekniska data (Förbehåll för ändringar)

Dimensioner	Verona	Monaco	Cannes	Nizza
Sitthöjd (variabel)	42 - 57 cm	42 - 57 cm	42 - 57 cm	42 - 57 cm
Höjd med armstöd	-----	-----	61-76 cm	-----
Höjd med ryggstöd	-----	-----	-----	83 - 98 cm
Sittyta	Ø 36 cm	■ 40 x 40 cm	■ 40 x 40 cm	■ 40 x 40 cm
Behövlig yta	■ 40 x 40 cm	■ 45 x 45 cm	■ 45 x 53 cm	■ 51 x 53 cm
Ändring av sitthöjd	7 steg x 25 mm	7 steg x 25 mm	7 steg x 25 mm	7 steg x 25 mm
Vikt	2,6 kg	2,8 kg	3,6 kg	4,8 kg
Brukarvikt max.	max. 175 kg	max. 130 kg	max. 130 kg	max. 130 kg

Reservdelar

Artikel-Nr.	Beteckning	Anmärkning/färg
4639020	Armstöd (inkl. Clips)	Plast, vit
4639030	Ryggstöd (inkl. Clips)	Plast, vit
4639040	Hylsmutter	Plast, vit
2019028	Clip för ben (höjdändring)	Rund, vit
4639060	Clip för att fästa arm- och ryggstöd	Kantig, röd
4420025	Plugg för stativrör	Plast svart
4560025	Fotkapset för stativrör	Plast, vit

Tillbehör

2840030	Transportväska med duschhjälp	Textil, svart
---------	-------------------------------	---------------

Återanvändning

Produkten är avsedd för återanvändning. Återanvändning (livslängd) beror på produktens skick. Före återanvändning måste produkten underhållas och relevanta instruktioner om säkerhet, skötsel och underhåll måste följas.

Denna kontroll är avsedd att utesluta felaktig användning på grund av möjliga eller direkt igenkännliga skador. Vi hänvisar här till Medical Products Act (MPG)

Livslängd

Den förväntade livslängden för de produkter som anges i denna bruksanvisning är 3 år när den används som avsett, med iakttagande av säkerhetsanvisningarna, underhållsintervallen och skötsel-anvisningarna. Efter denna period skall produkten endast användas i ett säkert skick. Underhåll bör då äga rum minst var sjätte månad. Särskilda krav för produkten på grund av patientens användning kan resultera i kortare underhållsintervall.

Garanti

Vi ger 24 månaders garanti på våra duschhjälpmedel. Alla sliddelar är undantagna från detta, liksom skador orsakade av felaktig användning.. Av säkerhetsskäl och utifrån produktansvar får reparationer endast utföras av REBOTEC eller av auktoriserade återförsäljare som använder originaldelar.

Notera!

Du kan ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida, www.euforia.se



Användaranvisning

Duschpallar: Verona, Monaco, Cannes
Duschstol: Nizza



Duschpall
Verona
Art.nr 3680030



Duschpall
Monaco
Art.nr 3630010



Duschpall
Cannes
Art.nr 3630020



Duschstol
Nizza
Art.nr 3630030



Användaranvisning

Duschhjälpmedlen skall endast användas inomhus (hemma / stillastående) på plana ytor och är lämpliga för duschanvändning. I händelse av fysisk försämring tjänar det till att öka självständigheten när du använder duschen. Trots optimal sittkomfort är duschhjälpmedlen inte lämpliga för långa sittperioder.

Notera !

[Spara bruksanvisningen för senare användning.](#)

Serienumret är också tryckt på produktens typskylt (undersidan av duschstolen). Vid reklamation eller frågor, ange typ och serienummer.

Produktanvisningar

Den rörformade ramen är gjord av aluminiumrör. Sitthöjden är justerbar (7 steg) via aluminiumrörens teleskopering. Sittplattan, armstöden och ryggstödet är tillverkade av plast. Fotkåporna för benen är gjorda av halkfri plast. Duschhjälpen kan monteras och demonteras igen med en enkel klämmontering och bidrar därmed till enkel förflyttning.



Installation

Duschhjälpen är inte redo att användas och måste monteras innan den tas i drift. Innan montering, kontrollera bruksanvisningen för att säkerställa att alla delar finns.

Antalet delar kan variera beroende på modell!

Modell Verona und Monaco

- Placera sittplattan (A) på en plan yta
- Lossa kopplingsmuttern (B) genom att vrida den åt vänster (moturs).
- För in rörsatsen (C) så långt det går i spännelementet (D).
- Vrid rörsatsen så att klämman (F) pekar utåt. Se till att alla ben monteras på samma sätt!
- Dra åt kopplingsmuttern (B) genom att vrida den medurs.
- Montera de andra 3 rörsatserna på samma sätt.
- Dra ut klämman (F) helt och justera sitthöjden genom att dra ut det inre röret.
- Sätt tillbaka klämman (F) genom hålet i rörsatsen. **OBS! Skjut in klämman hela vägen.** Detta kan ses när klämman är i full kontakt med aluminiumröret.
- **OBS! Justera alla fyra benen till samma höjd.**
- Kontrollera duschhjälpmedlets stabilitet efter installationen!

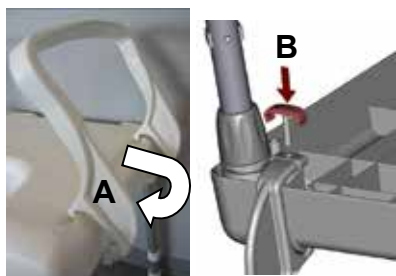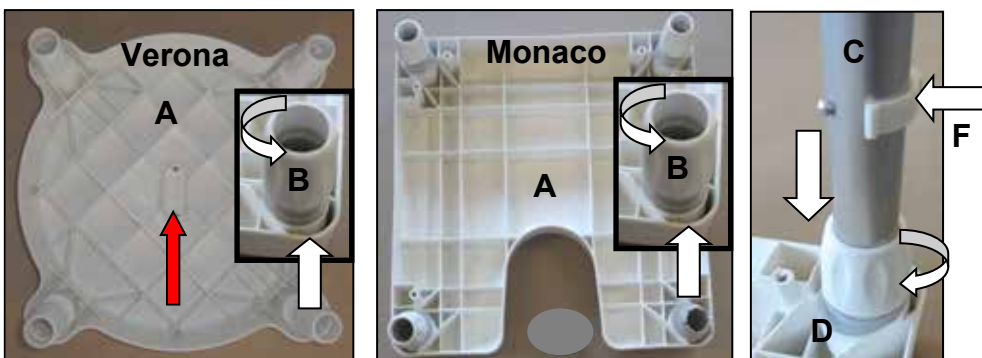


Modell Cannes

Montera som med Monaco-modellen.

Tillkommande montering:

- Fäst armstöden (A) på sätesfliken. Var uppmärksam på att spännanordningen nedanför sitsplattan går in i grepp.
- Dra isär armstödsstängerna tills borrhålen syns och fäst med klämman (B).
- **OBS! Skjut in klämman hela vägen.** Detta syns när klämman är i full kontakt med aluminiumröret.

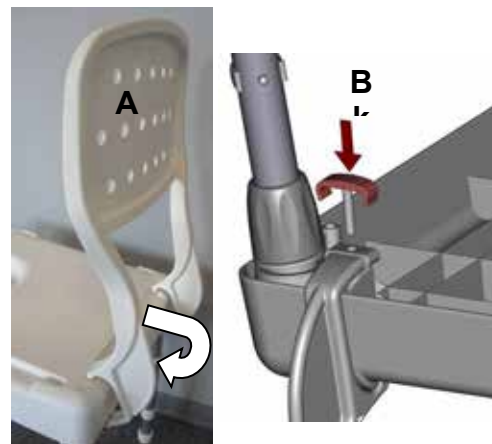

Modell Nizza

Montera som med Monaco-modellen.

Tillkommande montering:

Montera armstödsenheten som på modellen Cannes.

- Kläm fast ryggstödet (A) på sittplattan. Var uppmärksam på att spännanordningen går in i grepp under sittplattan.
- Fäst ryggstödet med klämman (B).
- **OBS! Skjut in klämman hela vägen.** Detta kan ses när klämman vilar helt på aluminiumröret.

Rengöring och desinfektion

Rengör produkten med ett mildt hushållsrengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Använd ett desinfektionsmedel som finns i handeln (observera produktinformationen) för att desinficera ytorna. Torka sedan av dem.

Tvätta därefter med rent vatten och gnugga produkten torr. Dålig eller försummad skötsel och underhåll leder till att produktansvaret begränsas.

Underhåll

Med regelbundet underhåll och skötsel av ditt duschhjälpmedel tjänar det dig pålitligt under lång tid. Av säkerhetsskäl och för att förhindra olyckor eller skador orsakade av felaktig hantering så låt kontrollera den minst var sjätte månad och lämna in den för kontroll hos en fackhandlare minst en gång om året. Spara denna användaranvisning.



Säkerhetsanvisningar

- **Följ den maximalt tillåtna kroppsvikt som anges på produkten!**
- Kontrollera att duschhjälpen saknar skador före varje användning. Om skador syns, använd inte duschhjälpmedlet!

OBS! Undvik risk för att falla!

- Det är viktigt att du kontrollerar följande punkter före användning:
 - Duschhjälpmedlets stabilitet (efter montering och före användning)
 - Sittplatta för skador
 - Kontrollera clips för höjdjusteringen så att den sitter ordentligt på plats
 - Kontrollera arm- / ryggstödet klämlås, beroende på modell.
- Bär inte duschhjälpen med patienten på.
- Använd endast duschhjälpen inomhus och på en plan yta.
- Beroende på modell, se till att armstöd och ryggstöd är helt monterade.
- Låt inte brukaren luta sig ur duschhjälpen.