

Duschpall Delta 150

Produktblad med Användaranvisning



Delta 150

Art.Nr 550300100

- Mycket lätt och platsbesparande
- Säker och stabil
- Kräver inga verktyg
- Strukturerad sittyta minskar halkrisk
- Sju sitthöjder tack vare ben av teleskoptyp
- Stabil tack vare gummifötter
- Anodiserade aluminiumprofilben
- Drainageöppningar
- Lätt att rengöra

Tekniska data

Artikelnummer	550300100	Sitthöjd	44-59 cm
Färg	Vit	Sitthöjdsvarianter	7
Bredd	44 cm	Totalvikt	1,7 kg
Längd	44 cm	Max brukarvikt	150 kg
Höjd	59 cm	Sittyta Ø	37 cm

Duschpall Delta 150

Användaranvisning

Förord

Våra produkters design och funktionalitet håller hög kvalitet.

Läs noga igenom denna Användaranvisning. Den innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och värdefulla tips för ett korrekt användande och en god vård av produkten. Kontakta oss om ni behöver mer information.

Användaranvisningen innehåller alla nödvändiga instruktioner för anpassning och användning. Den kan också laddas ner från vår hemsida.

Konformitetsförklaring

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd


Vårt åtagande utgår från en produktlivslängd på fem år, förutsatt att bestämmelserna för service och produktvård följs.

Livslängden kan förlängas avsevärt genom noggrann skötsel och vård av produkten. Den kan även förkortas genom extremt eller ovarsamt handhavande.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt

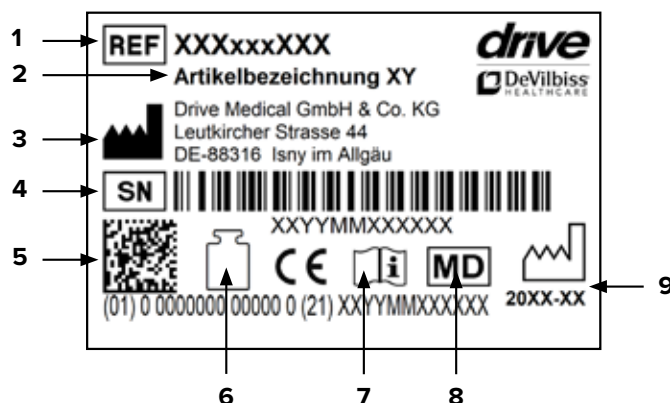

1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick. I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakte Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel. Bland annat gummifötter räknas som förslitningsdetaljer.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.



Delta 150

1. Sittplatta
2. Ställbara ben
3. Gummifot

Indikation för användning

Saknar möjlighet att stå säkert i duschen på grund av skador på nedre extremitetens funktion med begränsad eller ingen rörlighet och muskelstyrka och/eller nedsatt vestibulär funktion eller fallbenägenhet av annat ursprung.

Samtidigt tillräckligt stabil bålhållning för sittande och tillräckliga kvarvarande funktioner i de övre extremiteterna.

I leveransen ingår

1 x	Sittplatta
3 x	Ställbara ben
3 x	Gummifot
1 x	Användaranvisning

Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna användaranvisning uppmärksamt.
- Innan användning skall ingående delar och sitsens stabilitet kontrolleras. Vid skada skall produkten inte användas.
- Vid nedsittande, uppresning eller då sittplattan snäpps på plats kan kläder eller kroppsdelar komma i kläm.
- Var försiktig så att inte brukaren halkar eller faller.
- Tippsäkerheten är sämre än på en vanlig stol, undvik därför att brukaren böjer sig i sidled-
- Sitt alltid i mitten på sittytan, inte på kanten, för att undvika risken att tippa eller halka av.
- Produkten skall inte under längre tidsrymd utsättas för temperaturer över 60° (exempelvis genom att användas i en bastu).
- Var uppmärksam på att den maximala brukarvikten inte överskrids (se tekniska data samt typskylten).

Montering


Duschpallen är förmonterad, endast gummfötterna behöver sättas på plats (Bild 1-3).



Höjdställning

Innan användning ställs stolen in på lämplig höjd (Bild 4).

Tryck på knappen (1) och dra samtidigt ut eller skjut in benet tills knappen snäpps fast i önskat läge (2). Upprepa detta på de övriga benen och kontrollera att knappen snäppt fast i rätt läge.

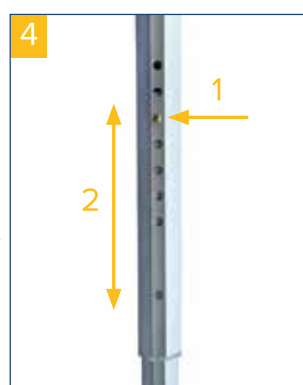

Kontrollera att alla benen är inställda på samma höjd.

Rengöring, produktvård

- Rengör duschpallen regelbundet för hand med en fuktig duk.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
- Använd inte skurmedel.
- Använd inte högdoserad klor- eller ättiksrengöring.
- För desinfektion kan ett spraydesinfektionsmedel användas.
- Vid defekter bör ni kontakta er fackhandel, där ni skaffat produkten.

Tekniska data

Produkt Delta 150

Artikelnummer	550300100
Bredd	44 cm
Längd	44 cm
Höjd	59 cm
Sitthöjd	44-59 cm
Sittyta Ø	37 cm
Totalvikt	1,7 kg
Maximal belastning	150 kg
Material i benen	Aluminium
Material i snäpplås	Mässing
Material i sitsen	PP (Polypropylen)