

Duschpall Delphi, Delphi Plus, Delphi 2 Plus

Produktblad med Användaranvisning och reservdelslista



Delphi

Art.Nr 540100000

- Säker, stabil, platsbesparande
- Sittyta med dräneringsslitsar
- Låg vikt
- Tre sitthöjder tack vare ben av teleskoptyp
- Stabil tack vare gummifötter
- Ben av anodiserad aluminium
- Lätt att rengöra
- Levereras i praktisk medtagbar förpackning



Delphi Plus

Art.Nr 540200000

- Med hygienöppning som underlättar den dagliga kroppsvården
- Säker, stabil, platsbesparande
- Sittyta med dräneringsslitsar
- Låg vikt
- Tre sitthöjder tack vare ben av teleskoptyp
- Stabil tack vare gummifötter
- Ben av anodiserad aluminium
- Lätt att rengöra
- Levereras i praktisk medtagbar förpackning



Delphi 2 Plus

Art.Nr 540300000

- Med 2 hygienöppningar som underlättar den dagliga kroppsvården
- Säker, stabil, platsbesparande
- Sittyta med dräneringsslitsar
- Låg vikt
- Tre sitthöjder tack vare ben av teleskoptyp
- Stabil tack vare gummifötter
- Ben av anodiserad aluminium
- Lätt att rengöra
- Levereras i praktisk medtagbar förpackning

Produktfakta

Bredd	48 cm
Längd	48 cm
Höjd	55 cm
Sitthöjd	45-55 cm
Sittytans diameter	38 cm
Vikt	1,6 kg
Max brukarvikt	180 kg

Produktfakta

Bredd	48 cm
Längd	48 cm
Höjd	55 cm
Sitthöjd	45-55 cm
Sittytans diameter	38 cm
Vikt	1,6 kg
Max brukarvikt	180 kg

Produktfakta

Bredd	48 cm
Längd	48 cm
Höjd	55 cm
Sitthöjd	45-55 cm
Sittytans diameter	38 cm
Vikt	1,6 kg
Max brukarvikt	180 kg

Duschpall Delphi, Delphi Plus, Delphi 2 Plus

Användaranvisning

Förord

Våra Delphi-produkters design och funktionalitet håller hög kvalitet.

Läs noga igenom denna Användaranvisning. Den innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och värdefulla tips för ett bra användande och en god vård av produkten. Kontakta oss om ni behöver mer information.

Användaranvisningen innehåller alla nödvändiga instruktioner för anpassning och användning. Den kan också laddas ner från vår hemsida. Reparationer och specialanpassningar kräver teknisk kompetens och bör utföras av fackmän från sanitetsbranschen.

Konformitetsförklaring

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt åtagande utgår från en produktlivslängd på fem år, förutsatt att bestämmelserna för service och produktvård följs.

Livslängden kan förlängas avsevärt genom noggrann skötsel och vård av produkten. Den kan även förkortas genom extremt eller ovarsamt handhavande.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Reservdelar

Se bild och förteckning sista sidan (5).

Typskylt



1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakte Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.



Delphi

1. Sittplatta
2. Ställbara ben
3. Gummifot
4. Hygienuttag (Delphi Plus, Delphi 2 Plus)

Indikation för användning

Saknar möjlighet att stå säkert i duschen på grund av skador på nedre extremitetens funktion med begränsad eller ingen rörlighet och muskelstyrka och/eller nedsatt vestibulär funktion eller fallbenägenhet av annat ursprung.

Samtidigt tillräckligt stabil bålhållning för sittande och tillräckliga kvarvarande funktioner i de övre extremiteterna.

I leveransen ingår



1 x	Sittplatta
4 x	Ställbara ben
4 x	Gummifot
1 x	Användaranvisning

Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna användaranvisning uppmärksam.
- Innan användning skall ingående delar och sitsens stabilitet kontrolleras. Vid skada skall produkten inte användas.
- Vid nedsittning, uppresning eller då sittplattan snäpps på plats kan kläder eller kroppsdelar komma i kläm.
- Var försiktig så att inte brukaren halkar eller faller.
- Tippsäkerheten är sämre än på en vanlig stol, undvik därför att brukaren böjer sig i sidled.
- Sitt alltid i mitten på sittytan, inte på kanten, för att undvika risken att tippa eller halka av.
- Produkten skall inte under längre tidsrymd utsättas för temperaturer över 60° (exempelvis genom att användas i en bastu).
- Var uppmärksam på att den maximala brukarvikten inte överskrids (se tekniska data samt typskylten).

Montering


Duschpallen är förmonterad, endast gummfötterna behöver sättas på plats (Bild 1-3).

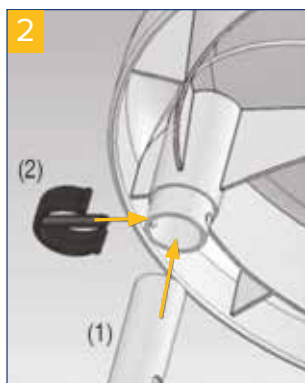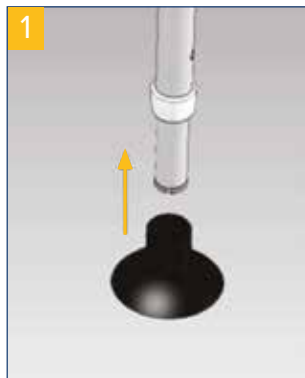

Höjdställning

Innan användning ställs stolen in på lämplig höjd (Bild 4).

Tryck på knappen (1) och dra samtidigt ut eller skjut in benet tills knappen snäpps fast i rätt läge (2). Upprepa detta på de övriga benen och kontrollera att knappen snäppt fast i rätt läge.

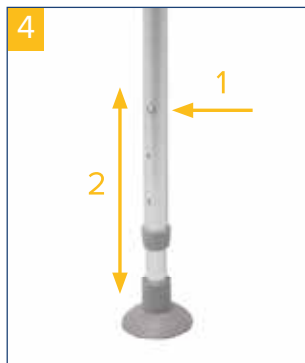

Kontrollera att alla benen är inställda på samma höjd.

Rengöring, produktvård

- Rengör duschpallen regelbundet för hand med en fuktig duk.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
- Använd inte skurmedel.
- Använd inte högdoserad klor- eller ättiksrengöring.
- För desinfektion kan ett spraydesinfektionsmedel användas.
- Vid defekter bör ni kontakta er fackhandel, där ni skaffat produkten.

Tekniska data

Produkt	Artikelnummer
DELPHI	540100000
DELPHI PLUS	540100000
DELPHI 2 PLUS	540100000

Produkter

DELPHI/DELPHI PLUS/DELPHI 2 PLUS	
Bredd	48 cm
Längd	48 cm
Höjd	55 cm
Sitthöjd	45-55 cm
Sittyta Ø	38 cm
Totalvikt	1,6 kg
Maximal belastning	180 kg
Material i benen	Aluminiumrör
Material i snäpplås	Mässing
Material i sitsen	PP (Polypropylen)

Duschpall Delphi, Delphi Plus, Delphi 2 Plus Reservdelar



Del nr	Art.nr	Beskrivning	Kvantitet
1	54000001	Gummifot för Delphi, grå	1
2	54000003	Ändstycke rör, för 22 mm inre rör	1
3	54000005	Fjäderklämma	1
4	54000002	Låsklämma, plast, grå	1
8	540400100	Vridbart säte med adapterplatta	1