



Duschstol med intimuttag



Användaranvisning

BEO3 Duschstol med intimuttag är lätt att montera. Lägg ett av sidostyckena på ett bord. Sätt dom tre ramrören på sina fästen på sidostycket. Sätt det andra sidostycket på plats. Skruva fast. Använd gärna den sexkantnyckel som finns i förpackningen. Ställ duschstolen upp och tryck fast säte och ryggstöd.

Höjden ställs in genom att låssprinten trycks ut. Ställ in önskad höjd och sätt tillbaka låssprinten. Duschstolen kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel. Max brukar vikt 130 kg.

Höjden är ställbar 47cm - 57cm. Sittbredd 40 cm. Sittdjup 40 cm. Totalbredd 51 cm. Totaldjup 41 cm.