

Dusch/badstol Otter – S, M, L

Produktblad med Användaranvisning



Art.Nr 555100100



Art.Nr 555100200



Art.Nr 555100300

Plastram med avtagbar, vattengenomsläppligt vinyltyg. Sitsyta och ryggstöd kan ställas in i fyra lägen (lutning från 0° till 90°) Säkerhetsband för kropp och för ben. Huvud/nackstöd justerbart i höjd och bredd; även lämpligt som sidoskydd.

Kan förvaras kompakt när den är hopfäld. Utdragbar för många vardagliga situationer. Huvudstöd, bröstband och 2 benband ingår i leveransen. Som tillbehör finns stativ för badkar och rullbart stativ.

Produktfakta Otter Small

Färg	vit-grön
Kroppslängd	90 cm
Sätets bredd	41 cm
Sittdjup	30 cm
Sitthöjd	14-26 cm
Sittvinkel, 4 lägen	0-90°
Ryggstödsbredd	41 cm
Ryggstödshöjd	40 cm
Ryggvinkel, 4 lägen	0-90°
Hopvikt, höjd	15 cm
Hopvikt, bredd	42,5 cm
Hopvikt, längd	90 cm
Vikt	4 kg
Max belastning	30 kg

Produktfakta Otter Medium

Färg	vit-grön
Kroppslängd	80-130 cm
Sätets bredd	41 cm
Sittdjup	35 cm
Sitthöjd	14-26 cm
Sittvinkel, 4 lägen	0-90°
Ryggstödsbredd	41 cm
Ryggstödshöjd	56 cm
Ryggvinkel, 4 lägen	0-90°
Hopvikt, höjd	15 cm
Hopvikt, bredd	42,5 cm
Hopvikt, längd	105 cm
Vikt	4,5 kg
Max belastning	60 kg

Produktfakta Otter Large

Färg	vit-grön
Kroppslängd	110-170 cm
Sätets bredd	41 cm
Sittdjup	40 cm
Sitthöjd	14-26 cm
Sittvinkel, 4 lägen	0-90°
Ryggstödsbredd	41 cm
Ryggstödshöjd	75 cm
Ryggvinkel, 4 lägen	0-90°
Hopvikt, höjd	15 cm
Hopvikt, bredd	42,5 cm
Hopvikt, längd	122 cm
Vikt	5 kg
Max belastning	80 kg

Dusch/badstol Otter – S, M, L

Användaranvisning

Förord

Våra Delphi-produkters design och funktionalitet håller hög kvalitet.

Läs noga igenom denna Användaranvisning. Den innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och värdefulla tips för bra användande och god vård av produkten. Kontakta oss om ni behöver mer information.

Användaranvisningen innehåller alla nödvändiga instruktioner för anpassning och användning. Den kan också laddas ner från vår hemsida. Reparationer och specialanpassningar* kräver teknisk kompetens och bör utföras av fackmän från sanitetsbranschen.

Konformitetsförklaring

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt åtagande utgår från en produktlivslängd på fem år, förutsatt att bestämmelserna för service och produktvård följs.

Livslängden kan förlängas avsevärt genom noggrann skötsel och vård av produkten. Den kan även förkortas genom extremt eller ovarsamt handhavande.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

* Specialanpassningar/större format, för brukare med svårare funktionshinder kan tas fram via fabriken. Kontakta oss.

Typskylt



1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar, (ex.vis gummifötter) täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

1. Ställbart huvudstöd
2. Ställbart bröstband
3. Ram
4. Ställbara ben
5. Enhandsbetjäning
6. Ställbart säkerhetsband för kropp och ben
7. Sittöverdrag, vattengenomsläppligt och tvättbart



Indikation för användning

Otillräcklig bällkontroll t.ex. vid paraplegi, centrala eller perifera neuromuskulära sjukdomar med bällhållningssvagheter, förlamning av nedre extremiteter, benägenhet att hyperextendera t ex vid cerebral pares.

Produkterna är avsedda för barn från omkring andra levnadsåret, ungdomar och småvuxna.

Bad- och duschstolen ger stöd åt barn och ungdomar som inte kan sitta fritt och erbjuder extra stöd genom säkerhetsband. För användning vid vård i hemmet. Den är inte avsedd för annan användning.

I leveransen ingår

1 x	Badstol för barn, unga, småvuxna
1 x	Huvudstöd
1 x	Bröstband
2 x	Säkerhetsband för kropp och ben
1 x	Användaranvisning

Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna användaranvisning uppmärksamt.
- Innan användning skall ingående delar och sitsens stabilitet kontrolleras. Vid skada skall produkten inte användas.
- Var försiktig så att inte brukaren halkar eller faller.
- Tips säkerheten är lägre än på en vanlig stol. Undvik därför att brukaren lutar sig i sidled över kanten.
- Sitt alltid i mitten på sittytan, lutad mot ryggstödet, inte på kanten, undvik risken att tippa eller halka av.
- Var uppmärksam på tillåten maximal belastning. Den anges i användaranvisning och på typskylten.
- Låt aldrig brukaren använda badstolen utan uppsikt.
- Varje allvarlig incident som inträffar och som är relaterad till produkten ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i medlemsstaten, där användaren och/eller patienten vistas.

Montage

Badstolen är förmonterad vid leverans. (Bild 1)



Veckla ut stolen

Dra foten något utåt (Bild 2) och vrid den tills det tar stopp. (Bild 3). Tryck nu foten bakåt tills den hörbart klickar i (Bild 4). Kontrollera låsningen.



Inställningar sits och ryggstöd

Dra för att justera sitsen eller ryggstödet på respektive enhandsmanövrering (bild 5-6).

Vrid sitsen eller ryggstödet i önskat läge (möjligt i fyra steg).

Se till att sätet eller ryggstödet sitter ordentligt fast.



Huvudstöd och säkerhetsband

Bröstbandet och huvudstödet fästs med ett kardborrbandsystem. Huvudsidostöden kan enkelt skjutas i sidled.



Tillbehör

Följande tillbehör finns som tillval:

1. Underrede duschstol
2. Underrede badstol

Ett klicksystem möjliggör snabb montering..

För att göra detta klickar du in duschstolens/badstolens fötter i de röda låsfästena. För att demontera, dra i den röda vipparmen.



Underrede duschstol



Underrede badstol

Överdrag

För att byta överdrag måste enhandsmanövreringen dras ner som bilden visar (Bild 9). Då kan överdraget dras av (Bild 10). Överdraget kan tvättas i maskin i högst 60°C.



Rengöring och vård

- Rengör duschstolen regelbundet för hand med en fuktig duk.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
- Använd inte skurmedel.
- Använd inte högdoserad klor- eller ättiksrengöring.
- För desinfektion kan ett spraydesinfektionsmedel användas.
- Vid defekter bör ni kontakta er leverantör, där ni skaffat produkten.
- Kontrollera regelbundet skruvarna och efterdra vid behov.
- Stolen bör inte utsättas för temperaturer över 60°C under längre tid (exempelvis i en bastu).

Tekniska data

Produkt	Otter S	Otter M	Otter L
Artikelnummer	555100100	555100200	555100300
HMV-nr	04.04.04.0004		
Max. belastning	30 kg	60 kg	80 kg
Totalvikt	4 kg	4,5 kg	5 kg
Längd sittyta	30 cm	35 cm	40 cm
Bredd sittyta	41 cm	41 cm	41 cm
Höjd sittyta	14 cm / 26 cm	14 cm / 26 cm	14 cm / 26 cm
Inställning sittyta	4 lägen (0-90° / 4x22,5°)		
Längd ryggstöd	40 cm	56 cm	75 cm
Bredd ryggstöd	41 cm	41 cm	41 cm
Inställning ryggstöd	4 lägen (0-90° / 4x22,5°)		
Kroppslängd c:a	till 90 cm	till 130 cm	till 170 cm
Transportmått LxBxH	90x42,5x15 cm	105x42,5x15 cm	122x42,5x15 cm
Material ram	Plast		
Material överdrag	Polyester		
Färg överdrag	Vit-grön		