



BA-No.: 02.08.042/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49(0)5431/9416-0
Telefax: +49(0)5431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-mail: info@rebotec.de



Bruksanvisning



Duschpallar


“ROM”

Art. No.: 368.00.10



“TURIN”

Art. No.: 368.00.20

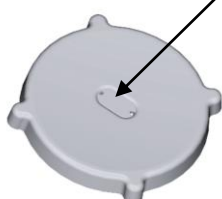

Använd endast denna duschpall
med detta stängningslock!
Angående DIN EN 12182


Avsedd användning / Användarrådgivning

Duschpallen är avsedd för användning i hushålls- och patientutrymmen. Det tjänar till att hjälpa fysiskt handikappade genom att öka självständigheten under duschen. Trots sin optimala sittkomfort är stolen inte lämpad för långtids-sittande.

Låt din återförsäljare eller vårdgivare ge dig råd om hur du använder duschpallen och dess justering för korrekt funktion!

Användning för första gången

Duschpallen är redo att användas. När du använder Turin duschpall för första gången måste följande punkter följas strikt:

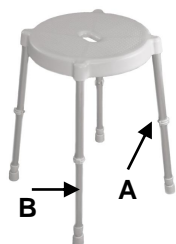

Modell "Turin" (justerbara ben):

- Ta bort justeringsklämmorna (A) genom att helt enkelt dra av dem.
- Ställ in den nedre foten (B) till önskad höjd.
- Sätt tillbaka justerklämmorna(A).

Risk för fall!

Se till att alla benen är inställda på samma höjd!

Skötsel

Alla plastdelar kan lätt rengöras med ett mildt, kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. Observera bruksanvisningen.

För aluminiumslangen är det i de flesta fall tillräckligt att torka av det med en fuktig trasa och sedan torka av. Otillräcklig eller försumlig skötsel och underhåll leder till begränsningar eller upphävande av produktansvar av tillverkaren.

Återanvändning

Produkten är avsedd för återanvändning. Återanvändningen beror på produktens tillstånd. Innan enheten återanvänds måste underhåll utföras och lämpliga instruktioner för säkerhet, skötsel och underhåll måste följas. Denna granskning ska utesluta eventuell felaktig användning orsakad av uppenbar eller osynlig skada. Se Medical Device Directive (MDD) och förordningen för operatör (MPBetreibV).

Livslängd

Den förväntade livslängden för de produkter som anges i denna bruksanvisning när de används i enlighet med säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och skötselråd är 3 år.

Efter denna period kan produkten endast användas i ett säkert skick. Underhåll bör utföras minst var sjätte månad. Specifika krav på produkten, på grund av patientens användning, orsakar kortare underhållsintervaller.

Säkerhet

- **Se till att den högsta tillåtna vikten för duschpallen inte överskrids!**
- **Före varje användning, kontrollera noggrant duschpallen för skador. Om skada upptäcks, använd inte duschpallen.**



Fallrisk

- Kontrollera för att vara säker på följande före användning:
 - ✓ Sätet är ordentligt fastsatt
 - ✓ Pall står på en stabil yta
 - ✓ Justeringsklämma (Turin) för höjdjustering
- Bär inte duschpallen med en patient på den.
- Använd duschpallen endast i och på fasta, jämna ytor.
- Efter en lång period av icke-användning: Låt en kvalificerad specialist kontrollera duschpallen.

Korrekt avfallshandling

En defekt eller en använd duschpall hör inte hemma i hushållssoporna. Kontakta din avfallshandlingstjänst för att fråga om korrekt bortskaffande.

Garanti

Produkterna som listas i denna handbok tillhandahålls med en garanti på 24 månader. Slitdelar och skador på produkterna på grund av felaktig användning är uteslutna.

Rådgivning

Spara alltid bruksanvisningen vid framtida användning. För klagomål eller frågor, tillhandahåll alltid modell, serienummer och användarinstruktionen.

Tekniska specifikationer

Art.-NO.	Type	Dimensions/cm C / D / F	Wt./ kg	Max. Patient Wt.
368.00.10	Rom	50 / 32 / 37,5x37,5	1,3	100kg
368.00.20	Turin	46-63,5 / 32/ 43,5x43,5	1,6	100kg

C=höjd, D=diameter, F=bas

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande!

