



TSE 150



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss.

Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.

Förstorade format för synskadade kan visas.
Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare.

Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.


Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt

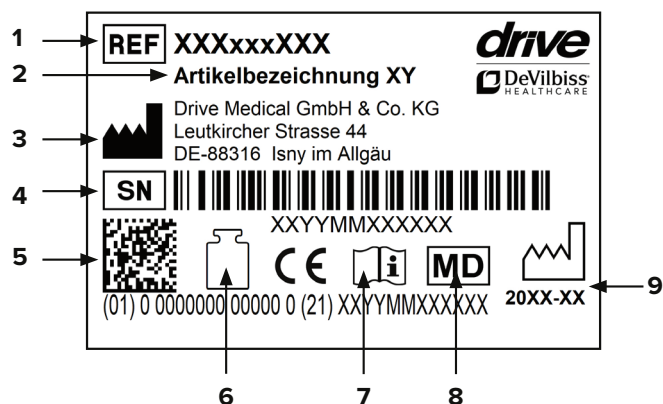

1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.





Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Produktens delar

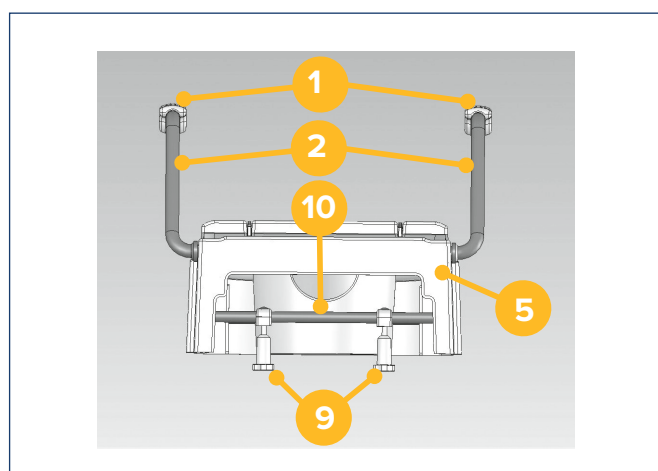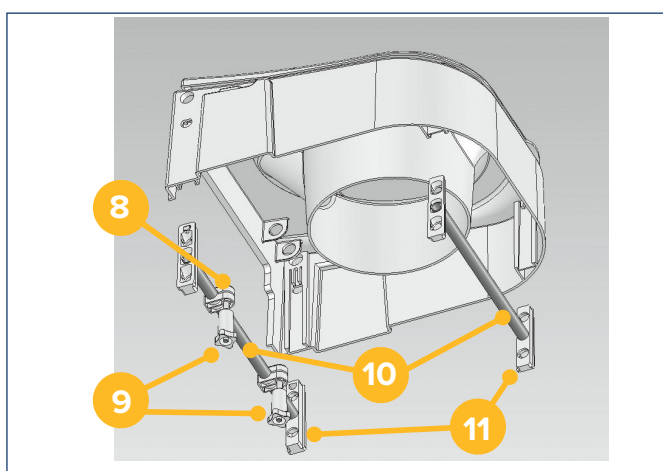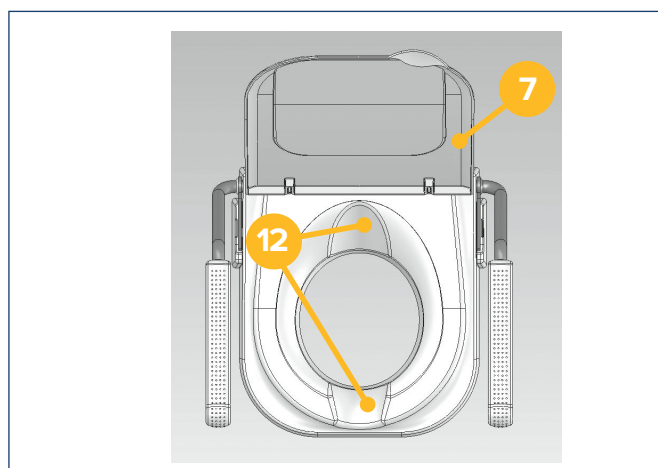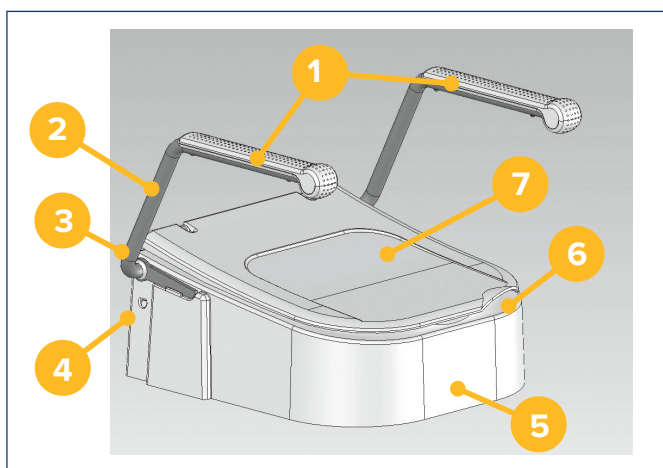

TSE 150

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Armstödsskydd | 5. Bas | 9. Räfflade muttrar |
| 2. Armstöd | 6. Infällt grepp (i locket) | 10. Tvärstag |
| 3. Armstödshållare | 7. Locket | 11. Justerbara hållare |
| 4. Låsmekanism för justerbar hållare | 8. Klämma | 12. Hygienöppningar |

Indikation

Användning av toaletten försvåras på grund av oanpassad sitthöjd på grund av begränsad förmåga att sitta ner och stå upp samt begränsad kontroll över bålen med funktionsstörning i nedre extremiteten med väsentligt begränsad eller helt frånvarande rörelse i lederna och/eller begränsad muskelstyrka av den nedre extremiteten och/eller skada på ländryggen, höften och/eller knäet och/eller skada på nervsystemet/centrala nervsystemet och/eller skada på muskelfunktionen med begränsad eller frånvarande stabilitet i bålen.

Leveransens

1 x	Bas
1 x	Tvärstag fram
1 x	Tvärstag bak
4 x	Justerbara hållare
2 x	Armstöd (endast för artikel 5201000)
2 x	Klämma
2 x	Räfflade muttrar
1 x	Användaranvisning
1 x	Vinyl handskar

Säkerhets instruktioner

- Använd inte om det finns några defekter!
- Varning – risk för halka/fall!
- Locket får inte användas som ryggstöd i öppet läge!
- Locket får inte bära någon belastning när det är stängt (t.ex. genom att sitta på det)!
- Kontrollera regelbundet att den upphöjda toaletsitsen sitter fast på toalettskålen. Dra åt de räfflade muttrarna om det behövs.
- Notera den tillåtna maxvikten för användaren. Denna information finns i de tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten

Användning

Den upphöjda toaletsitsen TSE 150 är lämplig för nästan alla standardiserade eller kommersiellt tillgängliga toalettskålar.

Montering

Ta bort gångjärnet och locket från toalettskålen. Montering sker utan verktyg. För att göra det, ställ in den upphöjda toaletsitsen på toalettskålen, justera båda gångstängerna M 8 efter att ha tagit bort de räfflade muttrarna till lämplig bredd och för in genom toalettskålens hål. Beroende på toalettskålens längd bör det säkerställas att klämmorna på det bakre tvärstaget är justerade i motsvarande riktning så att stödet av båda tvärstagen säkerställs. Skruva tillbaka de båda räfflade muttrarna löst på de gängade stängerna, rikta in den upphöjda toaletsitsen och dra sedan åt båda räfflade muttrarna. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och dra åt vid behov. Endast medföljande fästmaterial får användas för montering.



För Art. No. 520 1000:

Skjut in armstöden i sidled i den avsedda öppningen och tryck på fjäderknappen på tvärröret. Tryck nu in armstöden tills de hakar och fäll sedan ner dem om det behövs så att de vilar på stödet (**bild 1**).




Höjdinställningar

Den upphöjda toaletsitsen kan justeras med hjälp av de justerbara hållarna för en höjd på 6,5 cm, 10 cm eller 13,5 cm (**bild 2 + 3**).

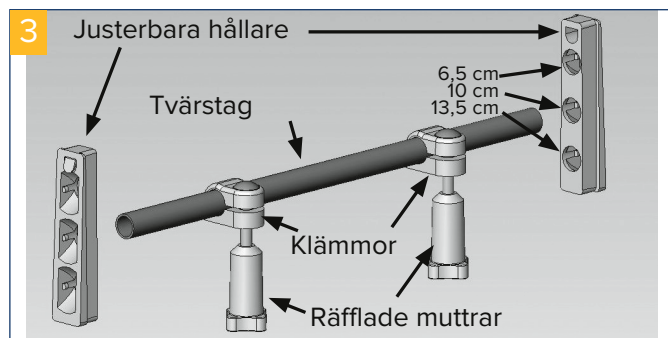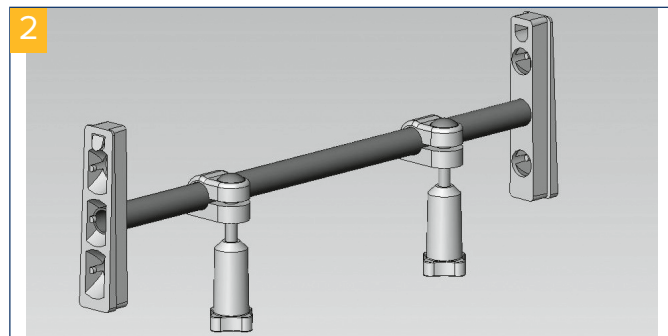


Den är inställd på 10 cm vid leveranstillfället. (**bild 4**).

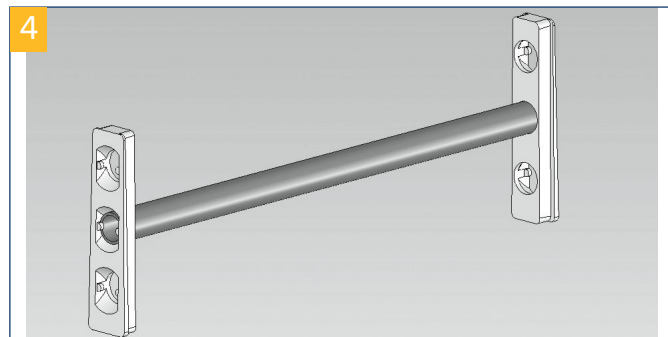

Om du vill ändra detta, följ dessa steg:


- Tryck lätt in låsflikarna till höger och vänster under armstödshållarna och dra ut den bakre tvärstaget med de justerbara hållarna. Dra ut den främre tvärstaget med de justerbara hållarna likaså.
- Adjust the desired front and rear height (**bild 5**).

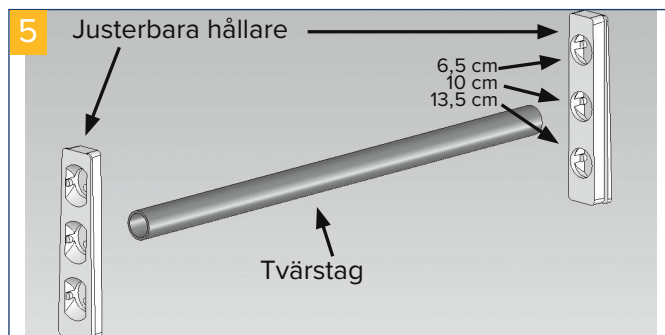

- För att göra detta, för in tvärstagen i motsvarande öppning i den justerbara hållaren.
- Se till att tvärstagen till höger och vänster sätts in på samma höjd.
- Den främre tvärbalken kan ställas lägre än den bakre tvärbalken.
- Sätt tillbaka de främre och bakre tvärbalkarna med hållare i den upphöjda toaletsitsen. Därvid måste hållarna för den bakre tvärbalken gripa in i låsflikarna

De justerbara hållarna kan bara sättas in i en riktning i den upphöjda toaletsitsen.

Sätta tillbaka locket

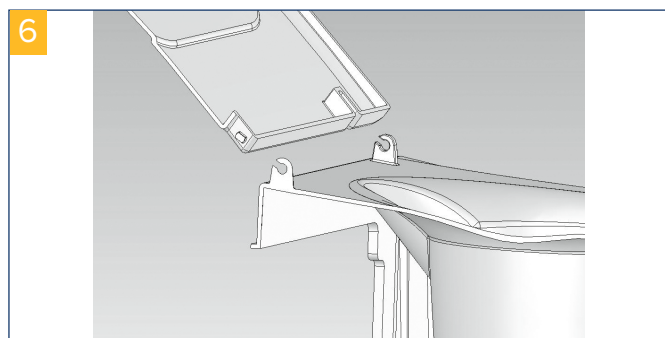

Låcket kan enkelt bytas ut vid behov. För att göra detta, vik locket hela vägen bakåt. Locket kan sedan tas bakåt ur hållarna. Sätt i det nya locket i enlighet med detta (**bild 6**).

Rengöring | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga starka rengöringsmedel!
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägerbaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas som Descosept AF eller Bacillol AF.
- Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid behov.
- Produkten bör inte utsättas för temperaturer över 60°C under långa perioder (till exempel användning i bastu, etc.).
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.

Teknisk Data

Produkt	utan armstöd	med armstöd
Artikel nummer	5200500	5201000
HMV(medicinskt hjälpmedel registrernr)	33.40.01.1013	33.40.01.3023
Total bredd	46 cm	56 cm
Total längd	48,5 cm	
Total höjd	22,5 cm	41 cm
Höjd reglering	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm
Bredd mellan armstöden	-	48 cm
Öppningslängd	25 cm	
Öppningsbredd	23 cm	
Vikt	3,7 kg	5,7 kg
Max. brukarvikt	150 kg	