

INSTALLATION OCH ANVÄNDARANVISNING

Stödhandtag för toalett

Artikelnummer: JMC-C 5300KD



1. Egenskaper


Stödhandtaget är tillverkad av ultralätt anodiserad aluminium. Den är justerbar i höjd och bredd för att möta användarnas behov..

Leveransens innehåll:

- Vänster stöd
- Höger stöd
- Anslutningsdel

Stödhandtagets delar:

- a. armstöd
- b. justeringsdel för rätt bredd
- c. monteringsplatta
- d. höjddreglering
- e. antihalk doppsko

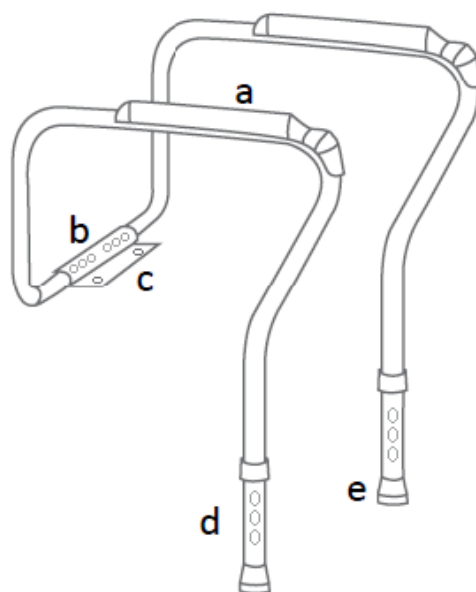

2. Användande

Stödhandtaget är en extra utrustning som hjälper användaren att utföra fysiologiska aktiviteter. Skenan rekommenderas till personer med funktionsstörningar och för dem som tappat förmågan att självständigt sitta och resa sig. Tack vare höjd- och breddjustering kan stödet anpassas till storleken på toaletten.

3. Montering

- Först, demontera toalettsitsen; skruva loss monteringsskruvarna på toalettskålen.
- Placera monteringsdelen på toalettskenan så att det matchar toalettskålens monteringsöppningar.

- Montera stödhandtagets ram.
- För att justera bredden, tryck på metallstiftet vid monteringsdelen, välj lämplig bredd och lås rörens position i förhållande till varandra.
- För att justera höjden, tryck på metallstiftet i benet, välj lämplig höjd och lås rörens position i förhållande till varandra.
- Sätt tillbaka toaletsitsen.

Notera! Stiften måste ställas på samma nivå i varje ben. Benen ska stå stabilt mot golvet.

4. Teknisk data

Vidd	53-63 cm
Djup	44 cm
Höjd	64-74 cm
Sitt dimensioner	47 cm x 42 cm
Vikt	0.4 kg
Max brukarvikt	100 kg
Färg	silver

5. Notera

Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av stödhandtaget, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Löpande underhåll

Gör systematiskt visuell inspektion av alla sammanfogningsdelen (klämmor, gångjärn) inklusive:

- tillståndet för låsstiften
- stabilitet och utseende på ramen

Rengörning

Kontrollera regelbundet det tekniska skicket på stödhandtaget:

- Rengör stödet regelbundet med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- **Använd inte** för rengöring: starka poler- och rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och därmed - förlust av garantirättigheter).










7. Förvaring och transport

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av 2 års garanti. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas

9. Märkningsetikett

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT number		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Instruktion
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		