

Gåbock/Betastöd 091117118

Användaranvisning

Gåbock/Betastöd är tillverkad i aluminium. Den är lätt och stadig att använda. För att använda den fäller man ut sidostyckena från ramen. I utfällt läge låses sidorna rakt ut från ramen. För att fälla in sidorna mot ramen trycker man på den främre delen av fjädern som sitter på varje sida av ramens främre del. För att ställa in höjden trycker man på den fjäder som sitter på benens insida. Ställ in önskad längd genom att dra benet till lämplig höjd. Var noga med att låset "klickar" innan användning.

Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel eller i tvättkabinett, max 60° och ytdesinfcieras.



Fakta

Avstånd mellan benen i basen	71 cm
Avstånd mellan handtagen	52 cm
Längd mellan doppskona	44 cm
Handtagets längd	28 cm
Ställbar höjd	76–101 cm
Max brukarvikt	270 kg



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

