



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Pottstol TS130

artnr: 530100100



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss.

Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.

Förstorade format för synskadade kan visas.
Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare.

Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.


Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt

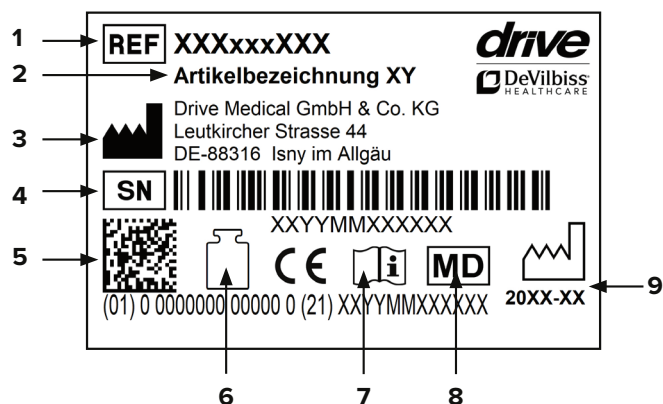

1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.



- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Ryggstöd | 5. Potta med lock |
| 2. Armstöd | 6. Höjdjusterbara ben |
| 3. Lock till sits | 7. Fästklämmor |
| 4. Sits | |

Indikation

INDIKATION:

Betydande för fullständig försämring av rörlighet/gång och förflyttning vid strukturella och/eller funktionella skador på nedre extremiteter (inklusive amputation, efterverkningar av skador, muskuloskeletala/neuromuskuloskeletala rörelsestörningar)

- För användning av den integrerade pottstolen eller för placering över en toalett.

Leverans

1 x	Pottstolsram, förmonterad
1 x	Potta med lock
1 x	Instruktion

Säkerhetsinstruktioner

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter bör kontrolleras för skador och en säker passform före användning.
- Kläder eller kroppsdelar kan klämmas när man sätter sig ner, står upp, sätter in toaletthinken, samt när man höjer armstöden och låser dem på plats.
- Undvik våta förhållanden – halkrisk!
- Förhindra obehörig användning av till exempel barn.
- Notera den tillåtna maximala vikten för användaren. Denna information finns i tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.



Montering av stödbenen

Pottstolen är förmonterad. Justera fötterna så att kommoden är på önskad höjd (i sex steg om 20 cm från 520-640 mm) och fäst fötterna genom att sätta i fästklämmorna som visas (bild 1-2).



Byte av sits



Toaletsitsen är endast fastklämd och kan tas av uppåt med motsvarande kraft (bild 3-4).

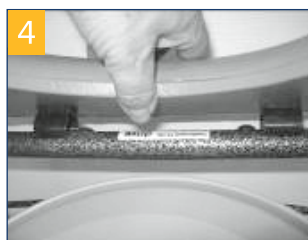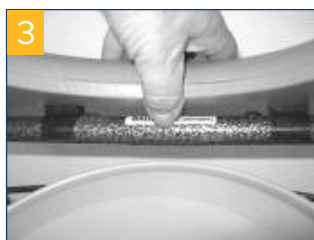

Användning

Pottstolen kan användas som en vanlig stol. För användning som kommod, ta bort den vadderade sittdelen, fäll sedan upp toaletsitsen och ta av skyddet från hinken. Sätt tillbaka toaletsitsen.

Efter användning, ta bort toaletthinken i bärhandtagen för rengöring och dra den upp och ut. Det är också möjligt att ta bort den från båda sidor (bild 5-6).

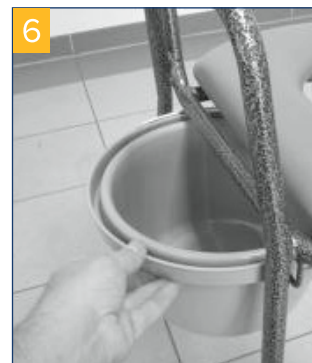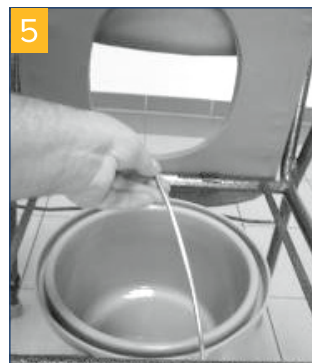

Rengöring | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägerbaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas såsom Descosept AF eller Bacillo AF.
- Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid behov!
- Produkten får inte utsättas kontinuerligt för temperaturer över + 60°C (t.ex. användning i bastu etc.)
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.

Technical data

Produkt	TS 130
Artikelnummer:	530100100
HMV (hjälpmedelsregistret) no.	33.40.04.0016
Totallängd	57 cm
Totalbredd	58 / 62 cm
Totalhöjd	83,5 - 98,5 cm
Sittbredd	43 cm
Sittdjup	46 cm
Vikt	8,5 kg
Max belastningsvikt	130 kg
Material i ramen	Svetsade stålrör, hamrad färg
Material i Sits / armstöd	Trä med skum och flamsäker PVC-överdrag