

# MONTERINGSANVISNING MOWBRAY LITE PLUS

N53909

ZRDHWWUDPMowbray Lite Plus



**Säkerhetsinformation**

Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Den höjd och breddjusterbara Mo bra Lite Plus toalettarm och sits med lock har utformats för att hjälpa dem som har svårt att sänka sig på eller resa sig från en vanlig toalett. Den bekväma plastformade sitsen ger stöd i naturlig position. Stolslocket ger en diskret stil och hjälper till att förbättra renlighet och hygien. En valfri golvmontage finns också tillgänglig F11 2.

## 2. SÄKERHET

**VARNING:** FÖRSÖK INTE STÅ PÅ ELLER KLÄTTRA PÅ PRODUKTEN.


**GÖR INTE:** Försök att stå eller klättra på produkten.

**SE TILL:** Alla ben är inställda på samma höjd för att undvika gungning.

## 3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök inte montera.

### 3.1 Innehåll:

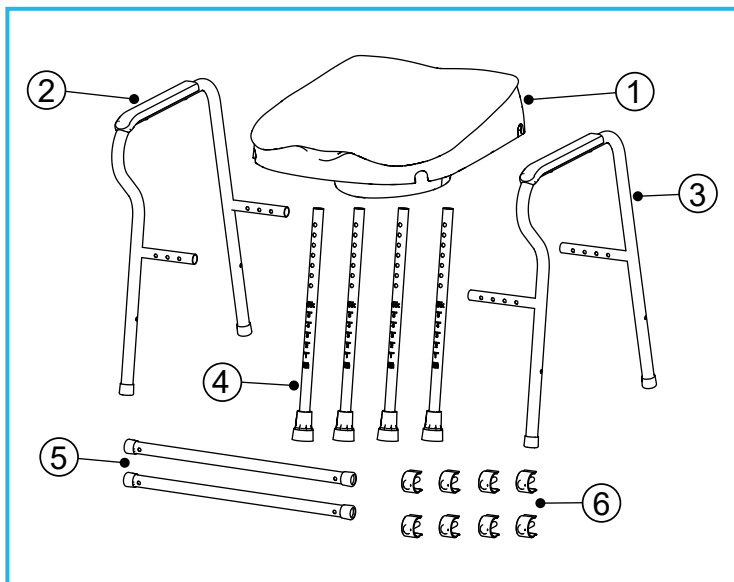


- 1 x Sidorams & ben
- 1 x Högjusterbar stol
- 1 x 95 cm höjdbalk
- 4 x Högjusterbara ben
- 2 x Tvärbalk
- 8 x E-clip

## 4. MONTERING/INSTALLATION

### 4.1 Montering av tvärstag:

1. Sätt in de tvärbalkarna i sidoramens enheterna och justera till rätt höjd för toaletten och användaren.


Max användarvikt

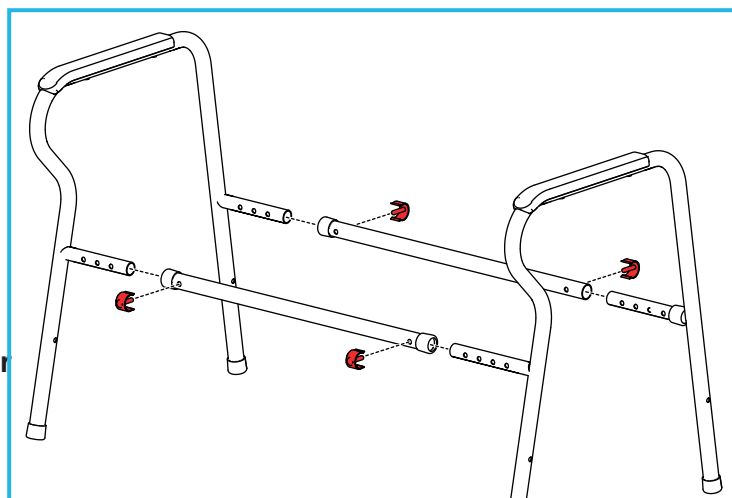

2. Sätt in de tvärbalkarna i sidoramens enheterna och justera till rätt höjd för toaletten och användaren.

**Note:** Se till att sidoramarna och tvärbalkarna har ställts in på samma bredd/justeringshål.

### 4.2 Montera benförlängningarna:

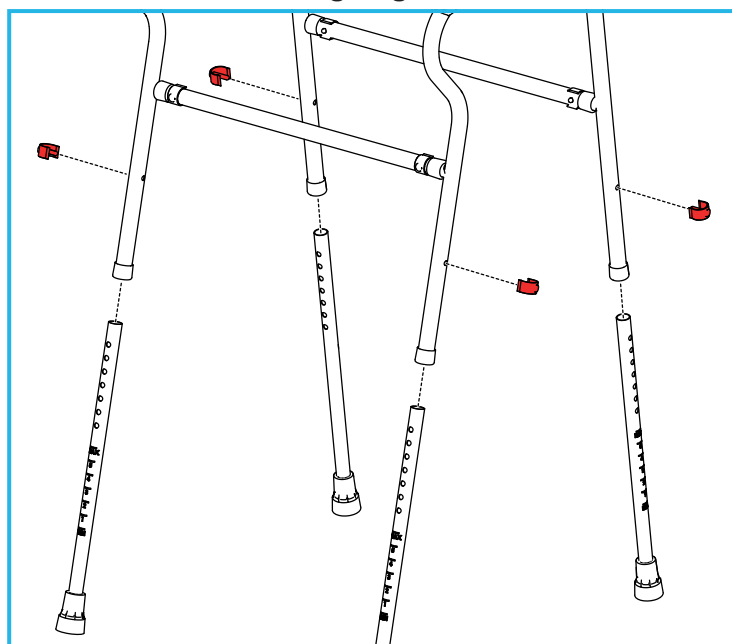


3. Sätt in de benförlängningarna i sidoramens enheterna och justera till rätt höjd för toaletten och användaren.

Rikta in hålen och fäst med de 8 x E klämmorna.

### 4.3 Montera sitsen

Placera sitsen på ramen i rätt läge, med sitsens framsida och armstödens kurva vänd framåt.

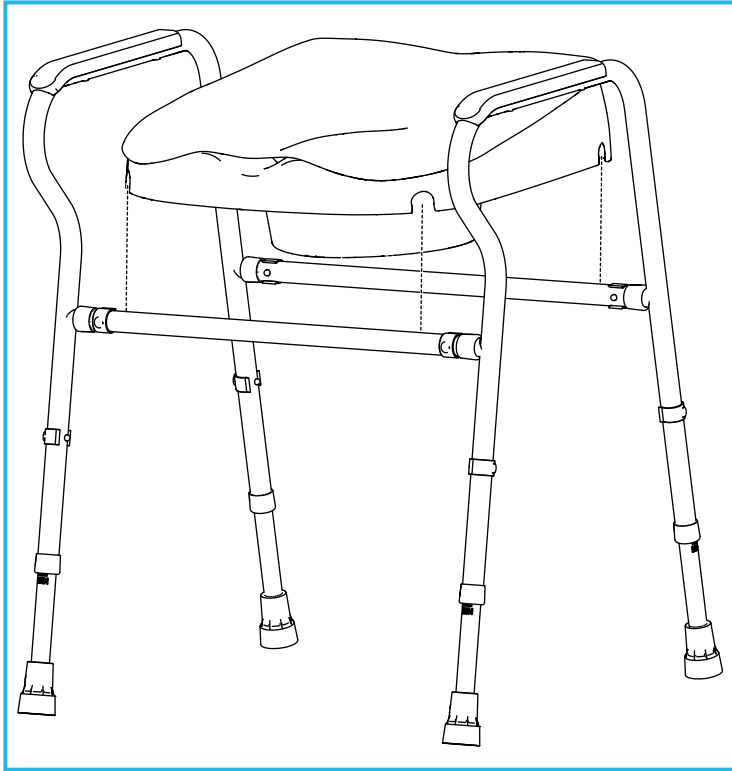

Tryck stadigt nedåt på sätet tills det snäpper fast på både främre och bakre tvärstängan.

## 5. INSTALLATION

### 5.1 För att installera Mowbray Lit Plus:

Placera ramen över toaletten och se till att det invändiga stänkskyddet är centralt över toalettskålen.

## 6. ANVÄNDNING

Justera höjd och bredd\* för toaletten så att det passar för användaren.

### 6.1 Justera höjden

1. Ta bort de 4 x benförlängnings-E-clipsen.
2. Skjut benförlängningarna till önskad höjd, rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

**Notera:** Se till att sitsen och toalettramen är helt säkra innan användning.

### 6.2 Justera bredden

1. Ta bort de 4 x tvärstängens E-clips.
2. Skjut sidoramensheterna till önskad bredd, rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

**Notera:** Se till att sidoramarna har ställts in på samma bredd.

**Notera:** Se till att sitsen och toalettramen är helt säkra innan användning.

### 6.3 Montering av valfri golvfixeringsatts

Se bruksanvisningen som medföljer den valfria flörfixeringsattsen (F11572).

## 7. UNDERHÅLL

Kontrollera att alla fästklämmor är korrekt isatta och att det inte finns några överdrivna rörelser. Om en golvmonteringsatts har monterats, kontrollera

Fästskruvarna är säkra. Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på doppskornas skick. Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

## 8. RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd blekmedelslösning och skölj noggrant med färskt vatten. Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

## 9. ATILLBEHÖR & RESERVDELAR

F11572 - Golvmonteringsatts

N43218 - E-clips x 4

För ytterligare information besök vår hemsida eller ring kundtjänst på nedanstående information.

## 10. AVFALLSHANTERING

Denna produkt måste rengöras/steriliseras noggrant innan den kasseras.

Denna produkt är tillverkad av metall och plast och ska kasseras genom lokala myndigheters hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

## 11. PRODUKTGARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 24 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material och utförande. Denna garanti täcker inte; missbruk, oaktsamt användande eller manipulering av någon del av produkten. Någon garanti utfärdad av EUFORIA AB gör det inte påverka dina lagstadgade rättigheter.