



Användaranvisning och montering

M66832 Justerbart och lutande bord för säng och stol



Andra produkter i Euforias sortimentet som du kan ha nytta av när du använder denna produkt:

L35324: Dycem antihalk underlägg




Det justerbara lutningsbara säng- och stolsbordet och Dycem halkskyddsmattorna kommer från en rad över 1000 dagliga hjälpmedel tillgängliga från Euforia AB
För att se hela utbudet besök vår hemsida: euforia.se

Allmän säkerhetsinformation

Se till att dessa instruktioner är fullständigt lästa och implementerade. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på användaren. Förvara på en säker plats för framtida referens.

Avsedd användning

Detta stiliga och mångsidiga bord kan användas antingen över stolar eller enkelsängar. Den har fyra låsbara hjul vilket gör det mycket enkelt att manövrera och placera bordet. Den är justerbar i höjd från 70 cm till 90 cm och är justerbar i bredd från 90 cm till 110 cm. Bordsskivan kan lutas i valfri vinkel från platt till 55° med hjälp av en handmanövrerad gasfjäder. Den övre ytan består av två sidobord som inte lutar, vilket gör att användaren kan vila ett glas samtidigt som den höjer mittytan. Sidoborden kan tas bort om det inte behövs. Alla ytor kan enkelt torkas rena

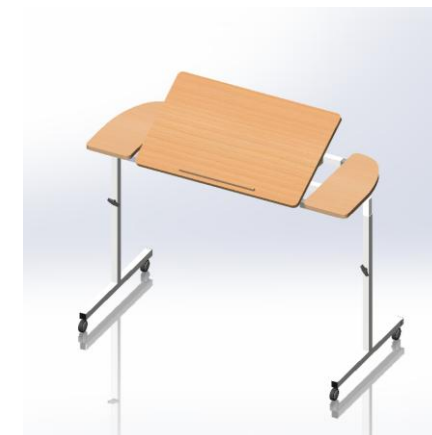

Uppackning

- Denna produkt levereras plattförpackad och kräver montering innan användning.
- Inga verktyg krävs.
- Ta ut produkten från dess förpackning; Kontrollera om det finns skador. Om du ser något eller misstänker ett fel, montera inte produkten; kontakta din leverantör omedelbart.
- Kontrollera att alla delar finns - se innehållslistan på nästa sida

Innehåll	
Beskrivning	antal
Montering av bordsskivor	1
Sidobordsskivor	2
Justeringsvinkel	2
Handhjul (låsskruv)	4
Benmontering	2


Säkerhetsåtgärder

- Överbelasta inte bordsskivan - Max 15 kg när bordsskivan är platt.
- Använd inte bordet för att transportera föremål
- Det rekommenderas att låsa hjulen innan du använder bordet.
- Var noga med att ta bort alla olämpliga föremål innan du höjer/sänker bordsskivan

Monteringsanvisning

1 - Placera bordsskivan på golvet med framsidan nedåt - se bild 1

2 - Skjut in det kortare benet på justeringsvinkeln i bordsskivans mittstäng till önskad bredd, rikta in hålen i de två delarna och fäst med handhjulet - se bild 1

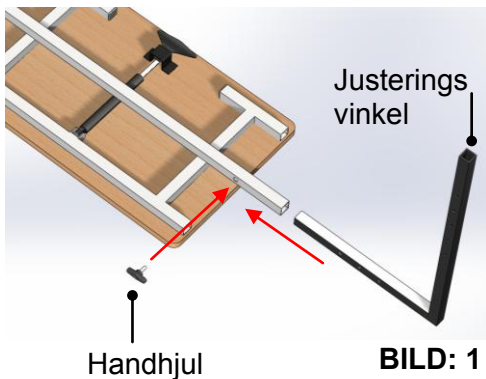

3 - Upprepa steg två för den andra sidan.

4 - Montera benenheten på justeringsvinkeln, skjut till rätt höjd. Rikta in hålen och fäst med handratten - se bild 2.

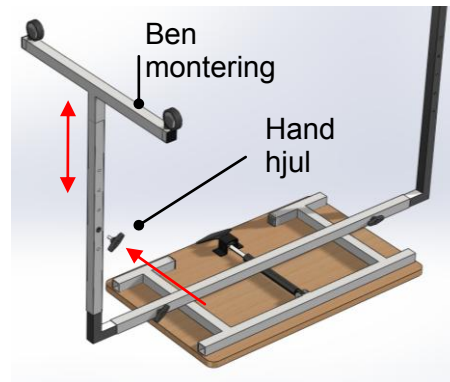


BILD: 2

5 - Upprepa steg fyra, för det andra benet.

6 - Vänd på bordet och lås hjulen

7 - Montera sidobordet genom att skjuta in de rektangulära rören i motsvarande rör i bordsskivan, tryck in fjäderklämmorna, när du skjuter rören, tryck tills klämmorna snäpper på plats, se bild 3 och 4.

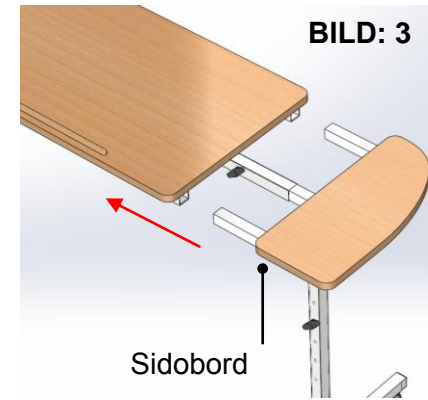


BILD: 3

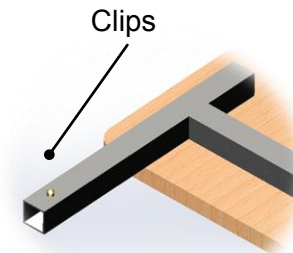


BILD: 4

Användarinstruktioner

För att höja bordsskivan trycker du handtaget mot bordets undersida och höjer/sänker skivan. Släpp handtaget för att låsa i läge. Se bild 5

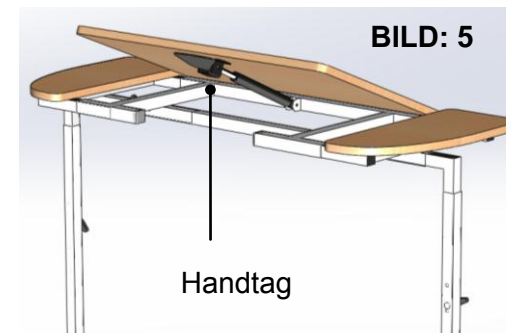


BILD: 5

Rengöring

- Rengör regelbundet, torka av med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel/ desinfektionsmedel
- Använd inte slipande rengöringsmedel

Skötsel & Underhåll

Inspektera regelbundet produktens stabilitet och styvhet, kontrollera att alla skruvar är åtdragna och i gott skick