

REF	Beskrivning
081124577	Homecraft Justerbar omgivande skena för toalett
08153468	Homecraft Justerbar omgivande skena för toalett-aluminium

### Beskrivning av artikel

Den här robusta toalettramen är justerbar i både höjd och bredd vilket gör den lämplig för en mängd olika situationer. Finns i antingen stål eller aluminium, den har vadderade handtag för extra komfort och stöd. Levereras i plattpaket, den är enkel att montera utan verktyg.

### Avsedda användningsområden

Kompensera för funktionsnedsättning genom att hjälpa till att stötta en brukare i stående och sittande läge.

### Installationsinstruktioner och bruksanvisning

- Lägg en av sidoramarna **(A)** på golvet och placera ett av tvärstången **(B)** över förlängningsstången.

- Rikta in hålet på tvärstången med hålet på den förlängda stången och sätt in stiftklämman.
- Upprepa steg 1 och 2 med den andra tvärstången.
- Lägg den andra ramen på golvet och sätt den första ramenheten på den. Rikta in tvärstångerna med förlängningsstångerna och sätt in stiftklämmorna. Vrid ramen så att fötterna är uppåt och fäst tvärstångerna.

### Justering av höjden

- Med ramen liggande på ena sidan, tryck in mässingsskruvarna och skjut benhylsorna **(C)** till önskad höjd. Se till att alla ben är justerade till samma höjd och att mässingsskruvarna sitter fast i nödvändiga håll.

### Skötsel och rengöring



De omgivande skenorna Sitsen kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Måste torkas efter rengöring och före användning.

### Var försiktig

- Före användning, se till att alla ben är i samma höjd innan du lägger vikt på ramen
- Se till att den övre skenans tvärrör är under toppen av wc-sitsen
- Surroundskenorna är utformade för att klara en maximal användarvikt på 190 kg/420 pund/30 stone

Maximal brukarvikt

**190 kg**

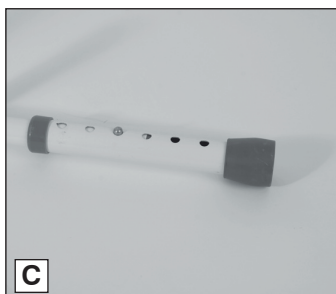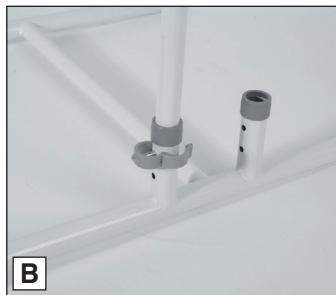

Allvarliga händelser som uppstår vid användning av denna produkt bör omedelbart rapporteras till Performance Health och till den lokala behöriga myndigheten.

Denna bruksanvisning finns i storsteckentryck. Kontakta Performance Health kundtjänst för att få ett exemplar.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.