

M00869	Economy Toilet Frame 17" (430mm)	M87203	Economy Toilet Frame 19" (480mm)
M00870	Economy Toilet Frame Width Adjustable		



Säkerhetsföreskrifter



Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

1. AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Den höjd- och breddjusterbara toalettramen är utformad för att hjälpa användare när man sätter sig och reser sig från toaletten. Den ger ett bekvämt och stabilt stöd när du reser från toaletten och är lämplig att använda i kombination med en upphöjd toaletsits. En valfri golvmonteringssats finns också tillgänglig (M24308).

**M00870 endast.*

Max brukarvikt



Bild 1: M00869



Bild 2: M00870

2. SÄKERHET

VARNING: Den maximala brukarvikten får inte vara mer än 190 kg.

LÅT BLI: Försöka att stå eller klättra på produkten.

SE TILL: Alla ben är inställda på samma höjd för att undvika att stödet står vingligt.

3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök inte montera.


4. MONTERING

Dessa produkter levereras färdigmonterade.

5. INSTALLATION

Justera höjd och bredd* för toaletten och användaren före installation.

5.1 AJuster höjden - Alla modeller

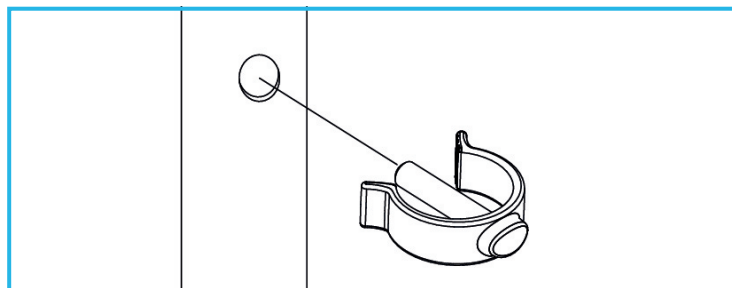

1. Ta bort de 4 x benförlängnings-E-clipsen.
2. Skjut benförlängningarna till önskad höjd, rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

OBS: Se till att alla sidoramsenheter har ställts in på samma bredd.

OBS: Se till att alla benförlängningar har ställts in på samma höjd.

5.2 Justera bredden - endast M00870

1. Ta bort de 4 x tvärstångens E-clips.
2. Skjut sidoramsenheterna till önskad bredd, rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

OBS: Se till att alla sidoramsenheter har ställts in på samma bredd.

OBS: Se till att sitsen och toalettramen är helt säkra innan användning.

5.3 Montering av den valfria golvfixeringssatsen M24308

Se bruksanvisningen som medföljer tillvalssatsen för golvfixering.

6. UNDERHÅLL

Kontrollera att alla fästklämmor är korrekt isatta och att det inte finns några överdrivna rörelser.

Om en golvmonteringssats har monterats, kontrollera att fästskruvarna sitter fast.

Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på hylsornas skick.

Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

7. RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd blekmedelslösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

8. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

M24308: Economy Range Golvfixeringssats
För ytterligare information besök vår hemsida eller ring kundtjänst på nedanstående detaljer.

9. AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN

Denna produkt måste rengöras/steriliseras noggrant innan den kasseras.

Denna produkt är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala myndigheters hushållsavfalls- och återvinningsstationer eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

10. GARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 24 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material och utförande.

Denna garanti täcker inte; missbruk, missbruk, störning eller manipulering av någon del av produkten.

Eventuella garantier utfärdade av NRS Healthcare påverkar inte din lagstadgade rätts.