

EasyFit Plus Uppresningstöd för säng

EasyFit Plus Uppresningstöd ger ett stabilt och säkert stöd när du går i och ur sängen



Designad & utvecklad av NRS Healthcare


EasyFit Plus Uppresningstöd ger ett stabilt stöd och underlättar förflyttning i och ur sängen, från liggande till sittande och för att ändra ditt läge i sängen.

Med en modern, enkel design är EasyFit Plus uppresningstöd ett av det bästa hjälpmedlet till sovrummet som underlättar rörlighet utan hjälp av någon annan. EasyFit Plus-uppresningstöd har utformats för att fungera med de flesta sängar, inklusive lamellsängar, solida basdivaner, fjädrande divaner och icke höjdjusterbara profilsängar. Den kan även monteras på höjdjusterbara sängar där höjdjusteringsfunktionen har inaktiverats. Det ergonomiska handtaget erbjuder flera greppalternativ så att användarna kan hitta den mest bekväma positionen.

Funktioner



- Designad för att fungera med de flesta sängar, inklusive sängar med lamellram och solida divaner
- Ger ett stabilt stöd när du går i och ur sängen
- Snabb och enkel att installera – inga verktyg eller remmar krävs
- NYHET för 2021 - Lättanvändbara klämmor glider snabbt på plats under sängen och säkras enkelt
- Bred, låg bottenplatta för ökad stabilitet och tillgänglighet
- Robust konstruktion – max brukarvikt 160 kg
- Finns i två modeller: Standard P63991 med handtagshöjd på 82 cm och Hög P64004 med handtagshöjd på 92 cm
- Förvaras platt när den inte används

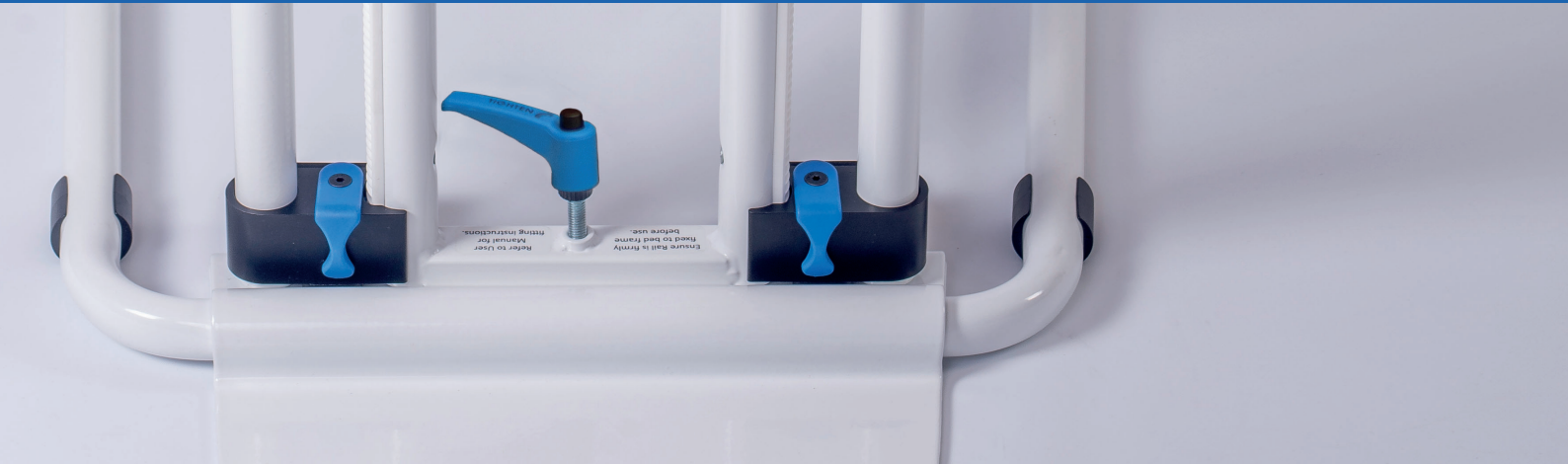

Monteras i 4 enkla steg, utan verktyg eller remmar som krävs, tack vare den unika glidklämmans design



1. EasyFit Plus uppresningstöde monteras på basen utan verktyg. Sätt helt enkelt in stödet i basen och placera den under sängen.



2. Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp klämmorna, skjut sedan klämmorna uppför räckan tills de kommer i kontakt med botten av sängramen.



3. Släpp den blå klämspaken för att låsa klämmorna på plats.




4. Vrid justeringsspaken några varv för att stödet ordentligt i sängramen. EasyFit Plus-uppresningstöd är nu redo att användas.

EasyFit Plus Bed Rail

EasyFit Plus (Plus)
Artikelnummer: P64004

EasyFit Plus (Standard)
Artikelnummer: P63991

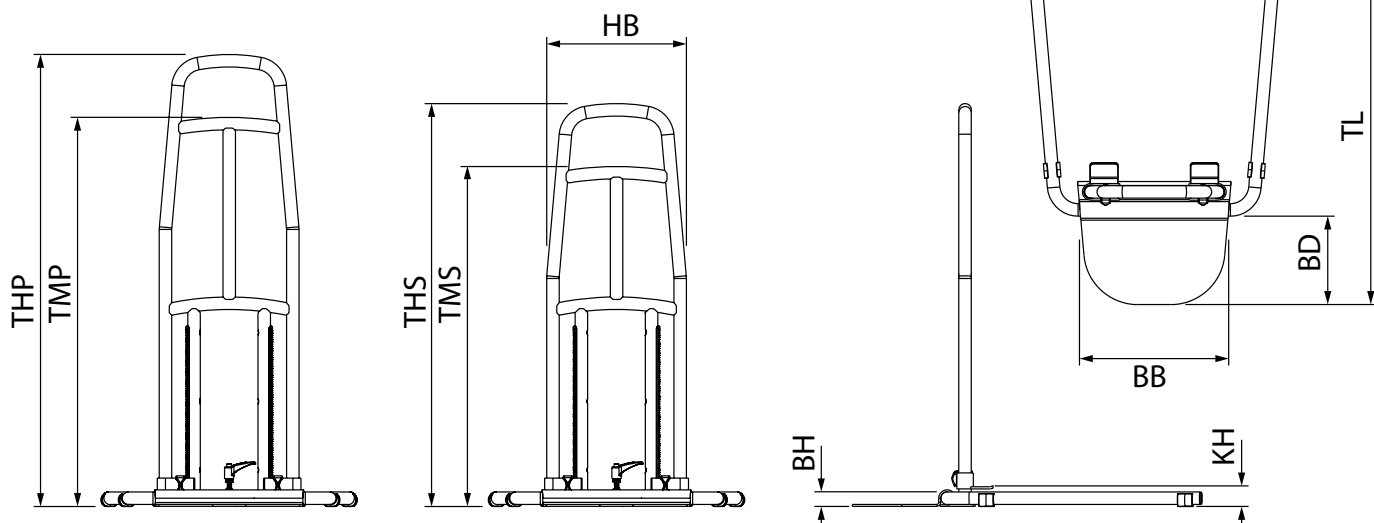

Symbol	Beskrivning	Mått
TB	Total bredd	52 cm
TL	Total längd	71 cm
THS	Total höjd (Standard)	82 cm
THP	Total höjd (Plus)	92 cm
HB	Handtag bredd	28,5 cm
TMS	Mellanstag Höjd (Stand.)	69 cm

TMP	Mellanstag Höjd (Plus)	79 cm
KH	Kläm Höjd (Min)	3 cm
KH	Kläm Höjd (Max)	33 cm
BB	Basplatta bredd	30 cm
BD	Basplatta djup	18 cm
BH	Basplatta höjd	3 cm
-	Max Brukarvikt	160kg