

Monteringsanvisning Parnell Premier

Art nr 091172550



1 Passa in handtaget i bottentapparna. Kontrollera att stödet sitter stadigt, hela tapparna ska döljas av handtaget. Kan ställas på valfri långsida av sängen.



2 Skjut in stödet mot sängen. Det ska stå helt intryckt mot sängen, utan luft mellan stöd och sängram.



3 Lokalisera de två krokarna under sängramen och vrid den stora svarta ratten medsols tills du känner motstånd. Fortsätt att vrida tills ratten är hårt åtdragen.

Handtagets höjd 82 cm

Handtagets bredd 28 cm

Djup ram inkl golvplatta 82 cm

Bredd 40 cm




Fakta

Utrymme under sängen:

Ej under 3 cm
Ej över 32 cm

Produktvikt: 9 kg
Brukarvikt: max 112 kg Rengöring:
vanliga rengöringsmedel

Krokens mått:
höjd 7,5 cm
djup 4 cm

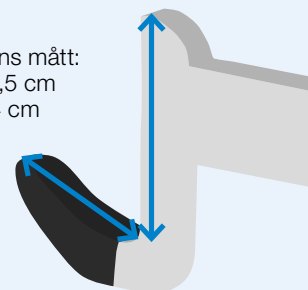

Material: kraftigt vitlackerat stål.
Skruvlar i hårdplast.

Inga verktyg behöver användas
vid montering.

OBS! Får inte användas med
förhöjningskoner eller sängar med
medar som ben.



Produkten följer
(EU) MDR 2017/745
och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.