


Förhöjningskon Bigfot artnr:M13888, M13889

Gordon Ellis & Co

Vi hoppas att Bigfot kommer vara ett användbart hjälpmedel för ditt vardagliga liv. Denna produkt har utvecklats med en specifik design och är avsedd för att kompensera för ev. skada eller övervinna en tillfällig eller permanent funktionsnedsättning.

Läs användarinstruktionerna nedan noggrant och spara dem för framtida bruk.

Om Bigfot

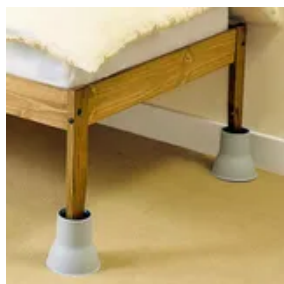

Bigfot är designade för att höja möblen, stolar, sängar eller bord med **9 cm** eller **14 cm** beroende på modell. Bigfot passar bendiametrar på upp till **8,5 cm**.



M13888

M13889



Monteringsanvisningar

1. Se till att de halkfria kuddarna är på plats i Bigfot.
2. Placera två Bigfot nära möbelns befintliga ben.
3. Lyft försiktigt upp på Bigfot. Var noga med att inte anstränga dig när du lyfter.
4. Upprepa på andra sidan av möbeln.
5. Se till att varje ben är centrerat i Bigfot. Se till att det känns stabilitet.
6. Om möbeln flyttas, se till att den sitter fast genom att upprepa instruktionerna ovan.

VARNING

Använd endast Bigfot under statiska möbler, ej med hjul eller på annat sätt glidbara. Undvik slå på möblerna eftersom det finns risk att möbeln kan försämra stabiliteten. Lyft alltid alla ben eller fötter på möbeln med samma höjd att höja ojämnt kan möbeln belastas fel. Använd inte på ojämna ytor.

Rengöringsinstruktioner – torka av med rent tvålatten

Max belastningsvikt, inkl. möbels vikt 

Produktlivslängd: 5 år vid normalt användande och slitage.

Återvinning: Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

