



ANVÄNDARANVISNING

Duschpall - KING-SS-20



AVSEDD ANVÄNDNING

KING Shower Seat ger mer självständighet vid dusch, minskar muskeltrötthet då användaren är i stående position och reducerar risken för halkning och skador. De halkfria gummifötterna gör att produkten står fast på golvet. Versionerna utrustade med höjdjusterbara ben gör det möjligt för användaren att justera höjden så att produkten möter deras krav. I den höjdjusterbara versionen kan dessutom längden på de främre och bakre benen justeras. De främre benen kan vara lägre än de bakre - detta gör det möjligt för användaren att upprätthålla en god hållning vid dusch och gör det dessutom lättare att stå upp och sätta sig. Tack vare sin flexibilitet kan duschsitsen även placeras på ojämn golvyta som förekommer i ganska många duschkar. Duschsitsen är väldigt lätt och kan därför flyttas utan problem.

INDIKATIONER OCH KONTRAIKATIONER

Duschsitsen *KING Shower Seat* är avsedd för äldre personer, rullstolsanvändare, personer med begränsad rörlighet i de nedre extremiteterna och höfterna och alla som har svårt att stå vid dusch. Användaren ska kunna hålla balansen själv medan han eller hon sitter eller står samt upprätthålla sittande kroppsställning. Duschsitsen är inte avsedd för användare som har problem relaterade till balans- eller perceptionsstörningar.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR:

- Den maximala användarvikten i montageanvisningarna bör inte överstigas.
- Innan varje användning ska du kontrollera att duschsitsen är rätt monterad i en stabil ställning.
- Duschsitsen får endast användas på ytor som är fria från hinder.
- Följ bruksanvisningen vid montage.
- Vid montage kan det förekomma en ökad risk för fingerskador.
- Gunga inte på duschsitsen då det kan leda till att du ramlar ner, sitsen välter eller benen sjunker ihop. Duschsitsen ska alltid stå på sina 4 ben.
- Gör inga ändringar i duschsitsen och dess komponenter.
- Använd inte duschsitsen om den är skadad eller ändrad på något sätt. Sprickor och deformationer kan påverka betydligt enhetens prestanda och säkerhet.
- Efter användning ska duschsitsen tas bort från duschkaret för att inte komma i vägen för andra.
- Använd inte duschsitsen för några andra ändamål.
- Duschsitsen får inte förvaras utomhus.

UNDERHÅLL:

Produktens underhåll bygger på rengörings- och hygienprocedurer. För att garantera säker användning och lämplig hygienstandard ska användaren utföra dessa procedurer innan varje användning.

Användaren bör kontrollera att enhetens och komponenternas konstruktion är intakt. Följ stegen nedan vid rengörings- och hygienprocedurer:

1. Använd handskar.
2. Avlägsna synlig smuts innan du påbörjar desinfektion.
3. Använd vatten eller icke-aggressivt rengöringsmedel vid rengöring.
4. Torka av med en torr och ren trasa.

Produkten kan även rengöras i en diskmaskin inställd på maximal temperatur.

KRAV VID ÅTERANVÄNDNING:


Produkten kan återanvändas av andra användare. Innan återanvändning ska produkten ha rengjorts och desinficerats på rätt sätt. Innan produkter transporteras till en annan användare ska den inspekteras av en kvalificerad försäljare.


KORREKT BORTSKAFFNING:

Produkten får inte slängas med normalt hushållsavfall. Hör dig för hos lokal myndighet om hur produkten ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

RAPPORTERING AV OLYCKOR:

Har det inträffat en allvarig olycka med denna enhet, ska du kontakta dess tillverkare via info@imglobaldesign.com samt behörig myndighet i ditt land.

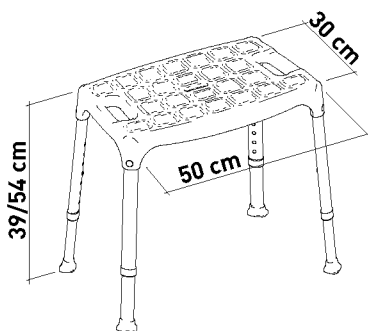

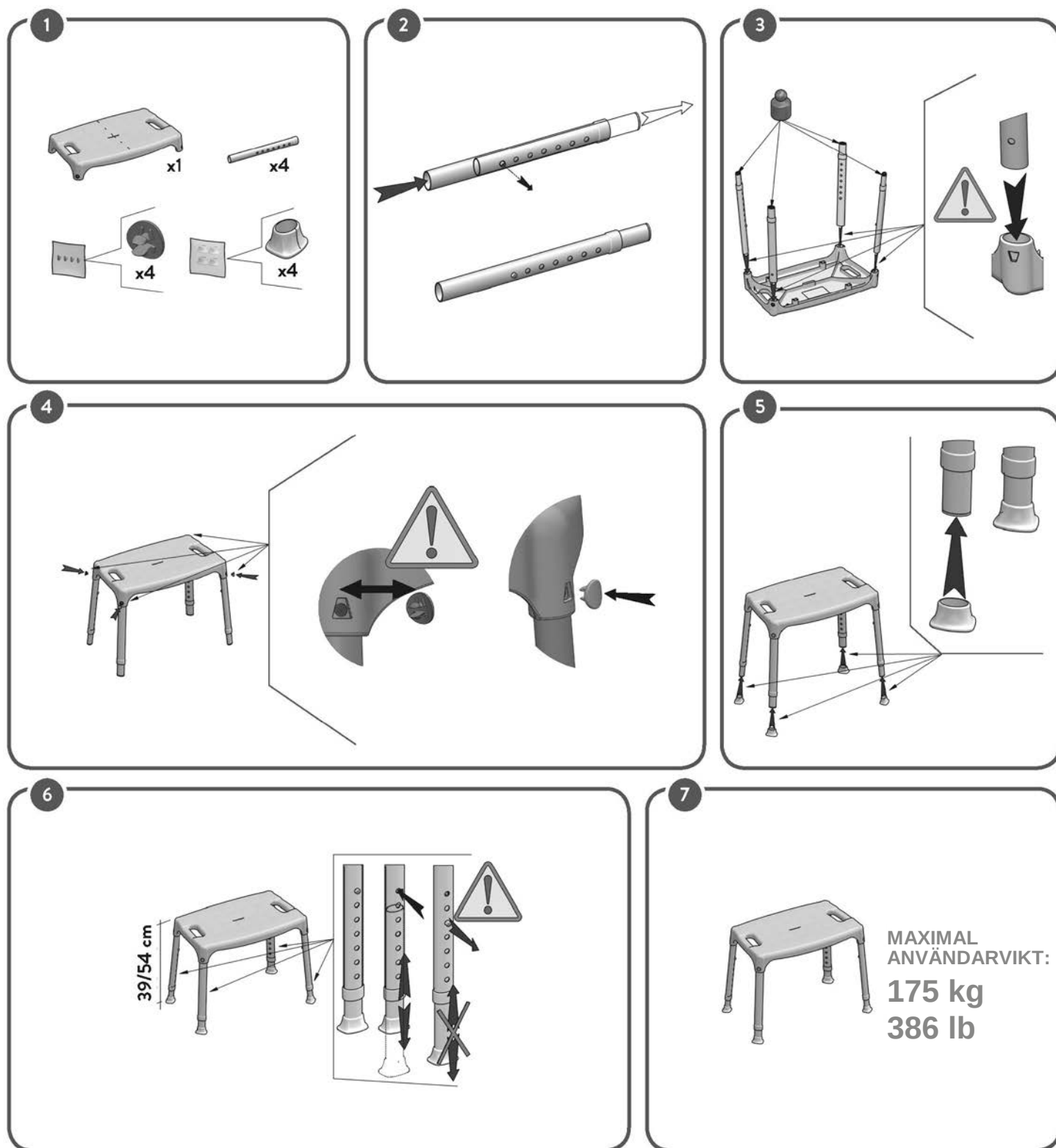

MADE IN ITALY

 Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och
 2007/47/EG för medicintekniska produkter.
2 YEARS
GUARANTEE