

Sittring i gummi



Användaranvisning

091090984 Sittring i gummi är lätt att använda. Den är brandsäker. Sittringen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel samt tvättas med ytdesinfektionsmedel.

Den utvändiga diametern är 45 cm och den invändiga diametern är 16 cm.

31-5601 Pump är försedd med en kort silikonslang. För att pumpa sittringen gör Du så här:

Skruva upp ventilen på sittringen några varv. Trä på slangen på sittringens ventil. Pumpa sittringen. Vrid tillbaka ventilen så att det blir tätt. Ta av slangen. Sittringen är färdig att använda.