



VAR GOD LÄS DETTA FÖRST!

Förebyggande Säkerhetsåtgärder

• Instruktioner • Garanti

Förebyggande Säkerhetsåtgärder

Den unika, patenterade designen av UPEASY lifting cushion har säkerheten i centrum. Även om Er nya UPEASY produkt är tillverkad för att i möjligaste mån ta hänsyn till säkerheten, måste vissa förebyggande åtgärder vidtagas:

1. Se till att det finns någonting att hålla i när Ni reser Er. UPEASY lifting cushion är konstruerad för att användas på stolar som har armstöd och som erbjuder en lämplig, stabil sittyta. Att använda UPEASY på mjuka stolar, soffor eller sängar är vanligtvis OK. UPEASY rekommenderas inte för användning i rullstolar, bilar, fällbara fåtöljer typ lazyboy eller kontorsstolar med icke låsbara hjul.
2. Se alltid till att stolen i vilken UPEASY skall användas inte kan glida på golvet. Om i tvivel placeras stolen med ryggestödet mot väggen eller annat fast föremål.
3. När Ni böjer Er för att plocka upp någonting sätt ingen vikt på fötterna för om Ni gör det aktiveras UPEASY.




Tryck **NERÅT**, vicka på den stoppade delen av sätet.

Reglering av viktinställning

1. Ställ UPEASY på kant med handtaget uppåt.
2. Frigör kardborrbandet runt handtaget för att öppna UPEASY.
3. Tryck neråt på den stoppade delen av sittytan så att den böjs utåt. Detta tillåter kolven att svänga fritt. (UPEASY kudden är konstruerad till att kunna böjas fram och tillbaka på detta sätt tusentals gånger. Böjningsrörelser skadar inte produkten.)

4. Välj en viktinställning. Lokalisera kolvpinnen mellan två för användarens viktläge lämpliga skåror. Se till att den är säkrad i mitten på vikturtaget. (De tryckta siffrorna på inställningsmekanismen är bara en vägledning. Den valda inställningen bör överensstämma med användarens förmåga och önskan. Att välja en lägre inställning tillåter personen en mjuk nersjunkning i stolen men ger mindre kraft när personen skall resa sig.)

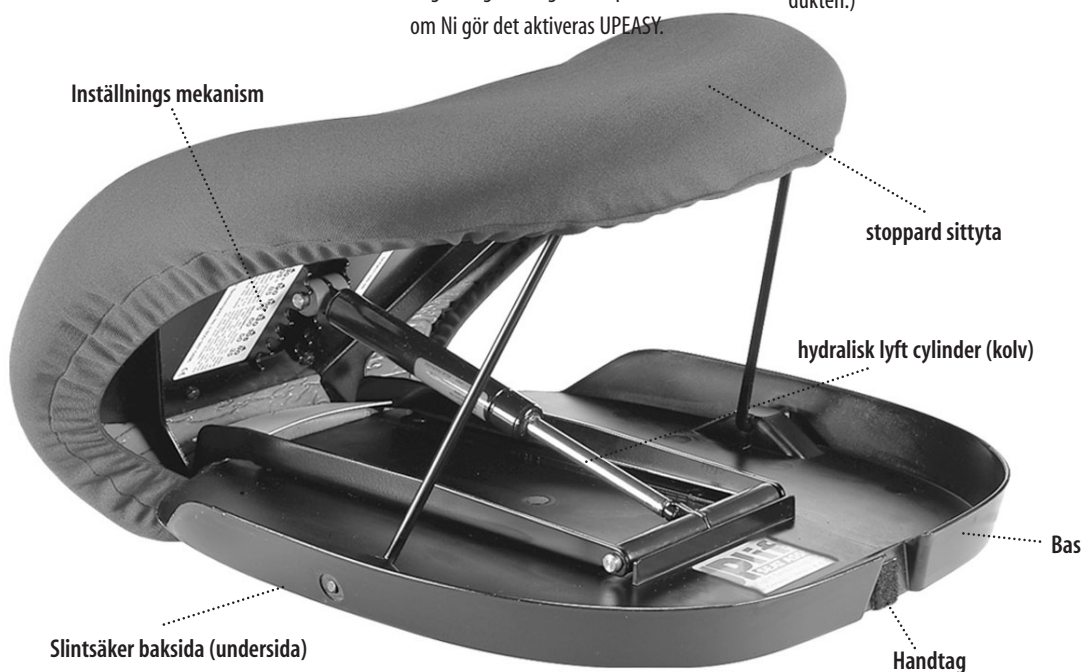

Välj en position på cylindern som passar användaren och centrera kolven mellan urtagen.

Tillverkad i Kina

Placering i stolen


I allmänhet skall UPEASY sticka ut utanför stolen som ses på bilden. På stolar som är mycket djupa och har tillräckligt med stoppning är det acceptabelt att placera UPEASY längre bak. När Ni använder UPEASY placera båda händerna på armstöden (eller annat lämpligt stöd).



När UPEASY används på en hård stol skall den sticka ut utanför framkanten på stolen som visas på bilden.

Avtagbara överdrag

UPEASY lifting cushion levereras med marinblått, maskintvättbart överdrag.

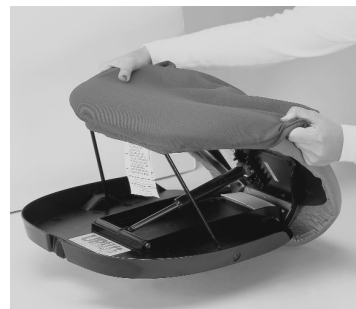

Att sätta på överdraget

1. Efter att ha reglerat viktinställningen på Er UPEASY, placeras den på ett bord med den öppna siden vänd ifrån Er.
2. Placera överdraget med den lappförsedda änden över bakänden eller toppen på UPEASY och dra neråt och under framsidan på kudden.

Observera att bak- eller toppändan av överdraget är bredare än framändan för att ge en riktig passning. Det bästa är att lämna lappen eller en del av den på överdraget för att göra det lättare att i framtiden avgöra vilket som är bakände/topp.

Att sätta sig med UPEASY

Efter att ha reglerat viktinställningen och placerat UPEASY på Er stol sätt Er ner på den flata översidan av UPEASY. UPEASY kommer att ge Er en långsam och mjuk nersjunkning i stolen (Observera: Om UPEASY inte sjunker ner när Ni sätter Er, omjustera viktinställningen till en lägre vikt.).



Att resa sig ur stolen med UPEASY

När Ni är färdig att resa Er, börja som Ni vanligtvis gör när Ni reser Er genom att luta Er framåt och stöt sedan av med armar och ben. UPEASY känner att Ni reser Er och ger Er ett långsamt och mjukt lyft.



Vård av Er UPEASY

Ytan på Er UPEASY lifting cushion är täckt av ett speciellt, brandsäkert, vattenavstötande preparat. Kuddens yta kan rengöras med en svamp och mild tvål eller tvättmedel. (Sänk aldrig fullständigt ner UPEASY i vatten). Det lösttagbara överdraget är gjort av 100% polyester och kan maskintvättas och dropporkas.

Nermontering för transport



1. Användande metoden för reglering av viktinställningarna, tillåt kolven att svänga under bottenläget.



2. Stäng UPEASY och slå kardborrbandet om bärhandtags kardborrdyna.



Garanti

Garanti förutsättningar

- Uplift Technologies garanterar i två år efter det ursprungliga inköpet att UPEASY lifting cushion är utan material- eller tillverkningsfel.
- Garantin täcker inte skada beroende på normalt slitage, försummelse eller felbehandling. Garantin är inte heller överförbar.
- Observera att om Ni försöker att reparera UPEASY själv blir garantin ogiltig.

Att returnera en produkt

Om UPEASY inte fungerar som garanterat (se Garantiförutsättningar) kontakta det ursprungliga inköpsstället. Distributören kommer att ersätta Er produkt om den var inköpt under den tvååriga garantitiden. Bevis på inköpet kommer att krävas.