


Fästen justerbara för
50 till 58 cm stolar

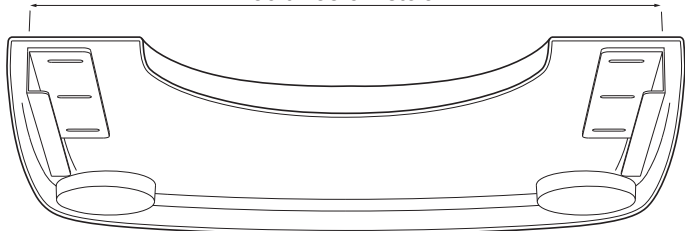

Storlek: 61 x 53 cm

VARNING

OBS!: Kontrollera alla delar för fraktskador före användning. I händelse av skada, använd INTE detta bord. Kontakta Euforia AB för ytterligare instruktioner.

Transparent Rullstolsbord - 091119437

Denna formgjutna transparenta bord med **BLINDFÄSTNINGSSYSTEM** har alla släta kanter så det finns ingen plats för smuts eller bakterier att samlas. Lätt att torka rent. Rundade hörn och kanter gör att det minskar risk för skador. Det finns två försänkta urtag i de främre hörnen för dricksmuggar etc. Bordet är upphöjd något runt bålutskärningen för att hjälpa till att minska mindre spill från att nå användarens knä. Det transparenta materialet gör det enkelt för personen att se stolens främre hörn genom brickan medan stolen är i rörelse, en bra säkerhetsfunktion. Lätt och stark.

INSTRUKTIONER: Bordet monteras stadigt på rullstolen genom att skjutas på armstöden, med hjälp av vårt justerbara skjut-på-fästesystem. Bordet kommer att monteras på platta, vadderade eller rörformade armstöd. För korrekt passform: Justera fästena så att den inre kanten på fästena matchar utsidan till utsidan av armbredden på rullstolen som brickan ska placeras på.

SKÖTSEL: Det genomskinliga boret är sammansatt av ett extremt hållbart PETG-plastharts som gör att ytrepor kan tas bort med en värmepistol eller hårtork. För att rengöra, torka av med en fuktig trasa. Du kan använda tvättmedelstväl eller antibakteriella desinfektionsmedel.

091119445 Extra fästen, säljs styckvis