




## HÅLLER BURKAR STADIGT

**Spill Not** är utformad för att hjälpa dem med begränsat grepp eller användning av en hand för att öppna burkar och flaskor. The **Spill Not** hjälper till att öppna tättslutna lock eller skruvkorkar. Den håller alla storlekar av flaskor och burkar stadiga, från bara 2 cm upp till 10 cm i diameter. Halskyddsgrepp håller varje behållare säkert. Basen håller spill på plats när du använder den. **Spill Not** har en modern design och är tillräckligt kompakt för att enkelt kunna förvaras.

**NEW** Detta set innehåller tre nya öppnarkoner. Konerna hjälper till att ge ett fastare grepp i handen.

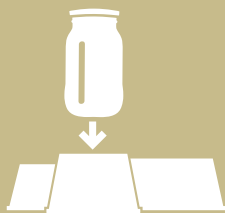

1. Placera flaskan eller burken inuti en av öppningarna för att hålla den på plats



2. Använd öppnarkonen av närmast storlek på locket för extra grepp när du öppnar



3. Tryck ner och vrid locket för att öppna det