

# Förhöjningskon Leg-X

artnr: F18050

Gordon Ellis & Co

Vi hoppas att Leg-X kommer vara ett användbart hjälpmedel för ditt vardagliga liv. Denna produkt har utvecklats med en specifik design och är avsedd för att kompensera för ev. skada eller övervinna en tillfällig eller permanent funktionsnedsättning.

Läs användarinstruktionerna nedan noggrant och spara dem för framtida bruk. Inga verktyg behövs.

## Om Leg-X



Leg-X är designade för att höja möblen, stolar, sängar eller bord med **7,5 cm**, **10 cm** eller **12,5 cm** beroende på modell. Varje förhöjningsblock är 2,5 cm. Leg-X passar bendiametrar på **3-5 cm**. Fungerar utmärkt på ben som är något böjda, svängda



F18050



## Monteringsanvisningar

1. Välj den önskade höjden.
2. Sätt in de nödvändiga blocken i Leg-X.
3. Sätt in möbelns ben i Leg-X.
4. Leg-X är konstruerat för att öka höjden på stolar, sängar, bord etc. med 7,5, 10 eller 12,5 cm.
5. Leg-X kan ta bendiametrar på mellan 3 och 5 cm. Leg-x greppar tillräckligt för att medge att föremålen kan flyttas utan att man skadar benet.

Högsta användarvikt: **320 kg** (inklusive möbelns vikt) per sats av fyra förhöjningskonor.

## VARNING

Använd endast Leg-X under statiska möbler, ej med hjul eller på annat sätt glidbara.  
Undvik slå på möblerna eftersom det finns risk att möbeln kan försämra stabiliteten.  
Lyft alltid alla ben eller fötter på möbeln med samma höjd att höja ojämnt kan möbeln belastas fel.  
Använd inte på ojämna ytor.  
Rengöringsinstruktioner – torka av med rent tvålwater

**Produktlivslängd:** 5 år vid normalt användande och slitage.

**Återvinning:** Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.



Produkten följer (EU)  
MDR 2017/745 och  
2007/47/EG för  
medicintekniska  
produkter.

