

EASYFIT PLUS UPPRESNINGSTÖD MK2


Produktblad med Användaranvisning



Max brukarvikt



P64004 (Plus) för sängar högre än 60 cm P63991 (Standard) för sängar lägre än 60 cm

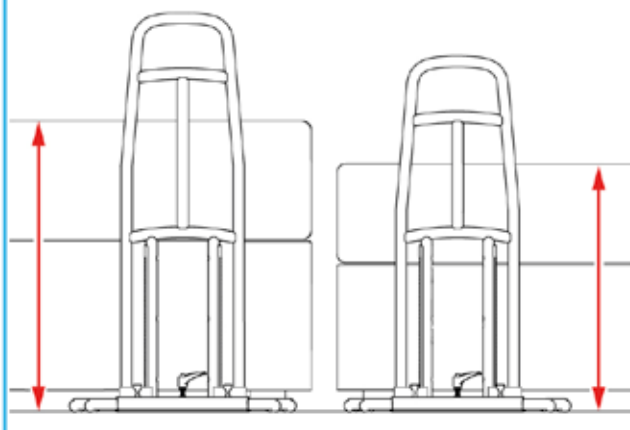

P63991 används på sängar med en madrasshöjd från golv på upp till 60 cm.

För högre sängar ska det höga uppresningsstödet, P64004, användas.



Allmän säkerhetsvarning



Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida behov.

I. ANVÄNDNING

EasyFit Plus Uppresningsstöd MK2 ger stabilt stöd för att hjälpa användare (längre än 1,46 m) att flytta in och ut ur sängen, förflytta sig från liggande till sittande position samt för att hjälpa användaren att flytta sig.

Designad för användning med de flesta typer av hem-sängar inklusive; divaner med fötter/hjul, inramade lamellsängar och elektriska profilingsängar. Stödet kan användas med sängar som har medar som sängben. Stödet kan användas på sängar med förhöjningskoner, Langham AA3372

Se **ALLTID** till att madrassen är så nära uppresningsstödet som möjligt. Lucka kan leda till att brukaren bli inkilad däremellan.

ANVÄND INTE på elektriskt höj- och sänkbara sängar om inte höjdjusteringsfunktionen har inaktiverats, eftersom detta kan skada sänghållaren och/eller sängramen när den används.

Se **ALLTID** till att räckan är ordentligt fastsatt i sängramen. Kontrollera regelbundet för att säkerställa att uppresningsstödet är ordentligt fixerad. Ta **ALLTID** loss ledstången från basen innan du bär eller förvarar produkten.

2. SÄKERHET



VARNING: För att undvika eventuell instängning måste du alltid placera produkten minst 32 cm från sänggaveln eller fotgaveln.

VARNING: För att undvika eventuell instängning måste du alltid placera produkten minst 32 cm från fasta föremål/möbler såsom lådor eller skåp vid sängkanten.

VARNING: För att förhindra att handen fastnar, håll inte i handtaget när du ändrar sängens profil.


VARNING: Den maximala användarvikten får inte vara mer än 160 kg.

DU MÅSTE göra en riskbedömning för att bedöma sänghållarens användning och lämplighet i förhållande till brukarens fysiska och kognitiva förmåga samt den omgivande miljön.

Installera **INTE** denna produkt på en skadad säng. Kontrollera **ALLTID** sängens profileringsfunktion med greppstången redan fixerad på plats, för eventuella risker före användning.

4. MONTERING

4.1 Montera ledstångsenheten på basenheten:

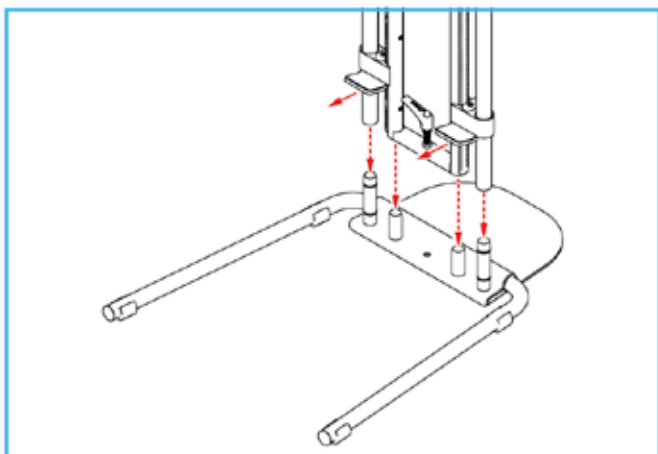

Obs: Se till att sängklämplattorna pekar i den riktning som visas.

Sätt in ledstångsenheten på de 4 basstiften.

Tryck ner ledstången tills den får kontakt med basen.

3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök då inte montera produkten.


3.1 Innehåll:

1. Basplatta x 1

2. Handtag x 1


5. FÖRBERED FÖR INSTALLATION

5.1 Sänk spärrklämmorna

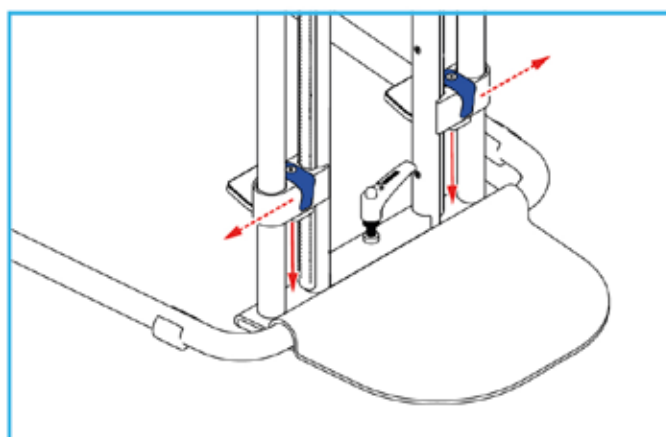

Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp spärrklämmorna. Medan du håller klämspakarna öppna, skjut ned spärrklämmorna tills de kommer i kontakt med basen.

5.2 Sänk åtdragningsspaken

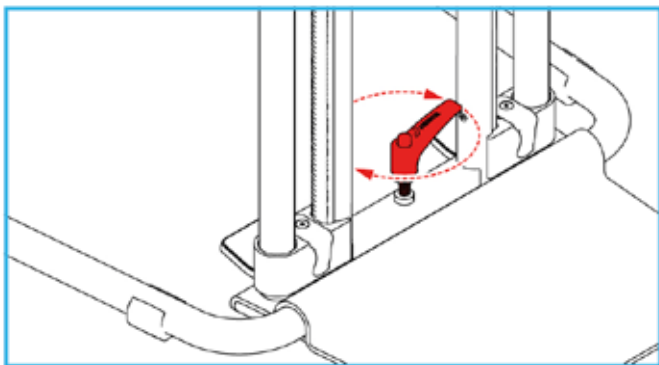


Vrid åtdragningsspaken medurs tills du börjar känna en lätt spänning. Dra inte åt för hårt eftersom detta kommer att lyfta ledstångsenheten från basramen.

6. Passa in till sängen


Se till att golvytan är jämn och slät. Sängbotten måste vara minst 3 cm över golvet och fri från hinder.

6.1 Skjut uppresningsstödet under sängen

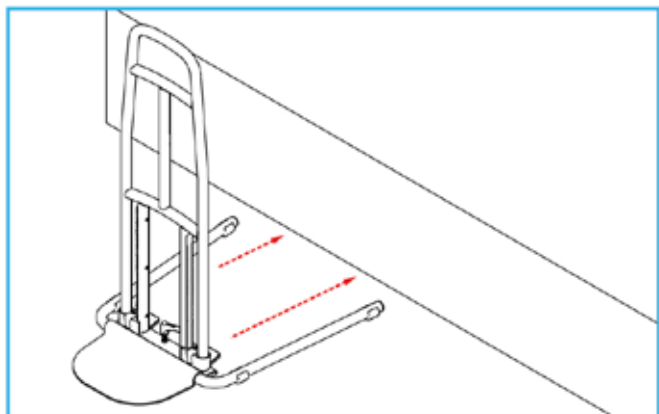

Skjut stödet under sängen, i ett ungefärligt läge, tills det kommer i kontakt med sängens sida.

6.2 Placera uppresningsstödet


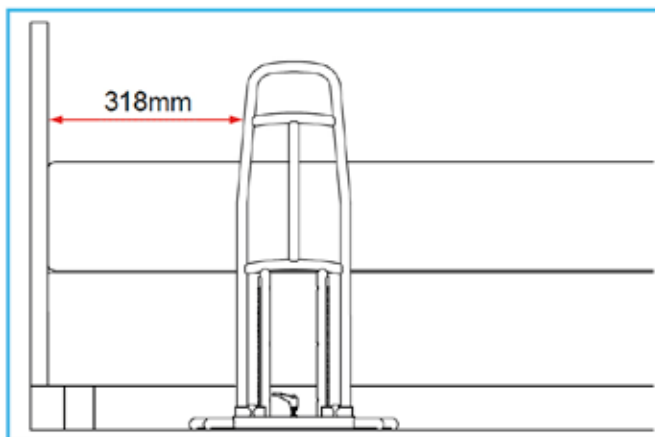


Placera stödet så att användaren kan nå räckets från liggande position utan att behöva sträcka ut sig.

VARNING: För att undvika eventuell instängning måste du alltid placera stödet minst 32 cm från sänggaveln eller fotgaveln.


VARNING: För att undvika eventuell instängning måste du alltid placera produkten minst 32 cm från fasta föremål/möbler såsom lådor eller skåp vid sängkanten.

6.3 Fäst uppresningsstödet i sängen

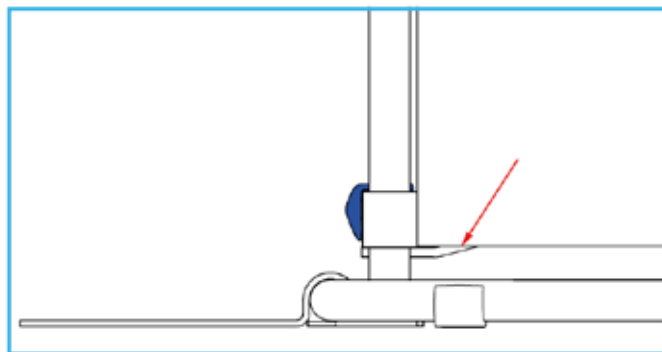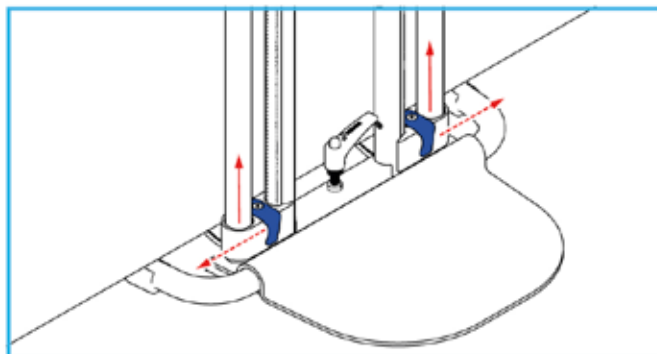

Skjut de blå klämspakarna utåt för att låsa upp spärrklämmorna. Medan du håller klämspakarna öppna, skjut spärrklämmorna uppåt tills klämsplattorna kommer i kontakt med botten av sängramen.

6.4 Lås klämmorna

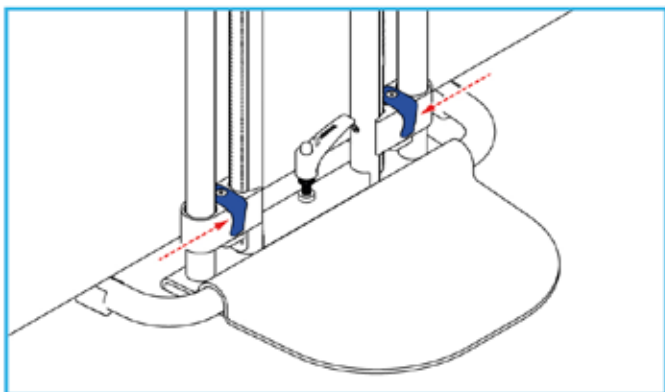


Släpp den blå spärrspaken för att låsa klämmorna på plats.

7. ANVÄNDNING AV ÅTDRAGSSPAKEN

Före användning måste uppresningsstödet vara helt säkrat med åtdragningsspaken. Hur det görs beror på vilken typ av säng du använder och beskrivs under 7.1 respektive 7.2.

7.1 Lamellbädd Ramåtdragning

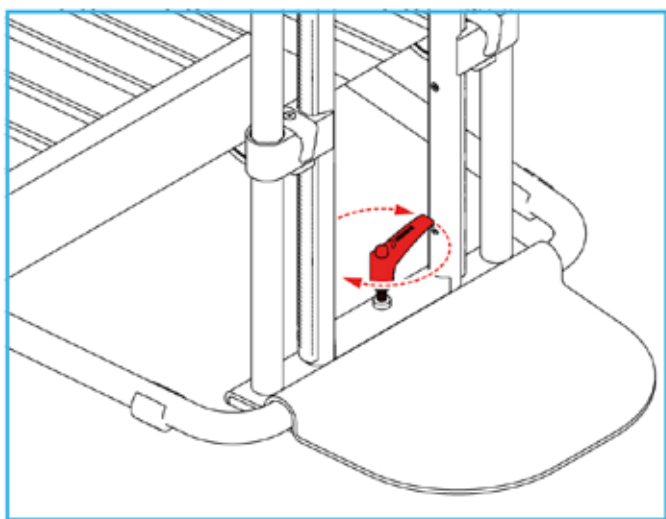


Vrid åtdragningsspaken medurs tills du börjar känna spänning och uppresningsstödet känns säkert.

Obs: Lätta sängar kan höjas från golvet när du drar åt spännspaken. Om detta händer, lossa spaken tills alla fyra hörn av sängen är i kontakt med golvet.

7.2 Divan och lågsäng Ramåtdragning


Hela varv av åtdragningsspaken kanske inte är möjliga på vissa divan- och lågramssängar. Använd följande steg för att justera uppresningsstödet;

Steg 1

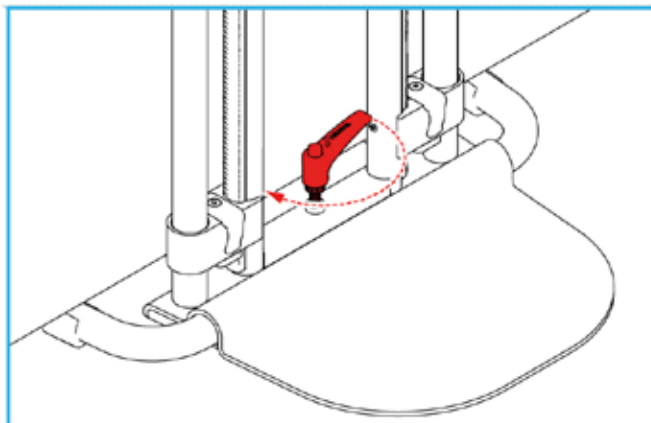


Vrid åtdragningsspaken medurs ett halvt varv.

Steg 2

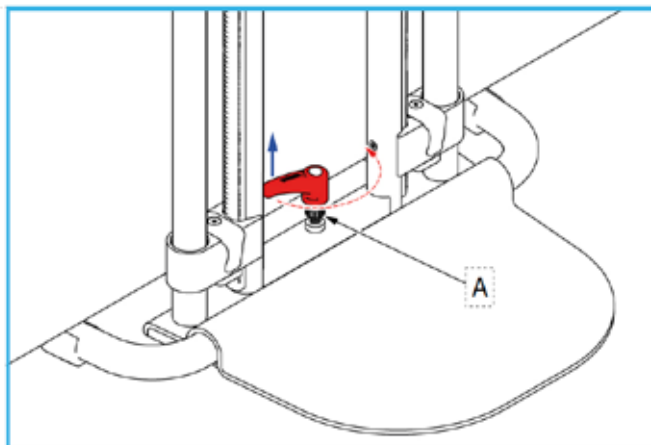

Medan du håller spaken uppåt, vrid den moturs ett halvt varv.

Obs: Du kan behöva hålla i den gängade delen (A) för att stoppa den från att rotera med spaken.

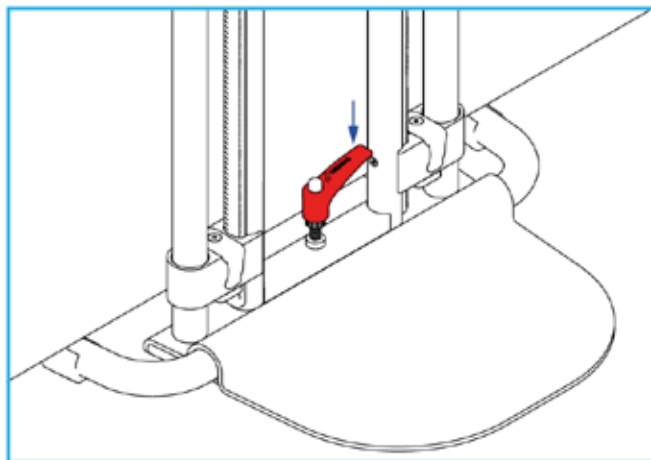

Släpp åtdragningsspaken, detta kommer att koppla in gängan igen. *(Texten försätter på nästa sida)*

Upprepa steg 1, 2 och 3 tills att stödet känns säket. Vi rekommenderar att stödet kontrolleras med månadsintervaller för att säkerställa att det är ordentligt fastsatt i sängen.

Om sängstödet har lossnat måste det säkras igen med rätt åtdragningsmetod för din sängtyp.

Obs: Om sängstödet inte kan dras åt tillräckligt, måste det tas bort och återmonteras.

8. BORTTAGNING AV UPPRESNINGS-STÖDET

Stödet kan tas bort genom att vrida åtdragnings-spaken moturs några varv tills botten av räcknet nuddar bottenplattan. Släpp sedan de 2 spärrklämmorna.

9. RENGÖRNING

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig. För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med vatten.

Denna produkt är lämplig för termisk dekontaminering och kan ångrengöras eller autoklaveras vid rengöringscykler upp till 80°C.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

10. UNDERHÅLL

Inspektera produkten med jämna mellanrum och före återanvändning för tecken på allmänt slitage eller skador.

Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

11. TILLBEHÖR & RESERVDELAR

P64016: Reservsats för spärrklämmor

1. VH och HH spärrklämma (par)

2. Spärrställ x 2

3. Spärrställsskruvar x 6

PI1863: Reservdelssats

1. Gummikuddar för klämmontering x 4

2. Basfötter x 4

3. Basrörsändkåpor x 2

4. Åtdragningspak x 1

5. Basstift Oringar x 41

För mer information besök vår hemsida: www.euforia.se eller ring kundtjänst.

12. AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN

Denna produkt måste rengöras/steriliseras noggrant innan den kasseras.

Den här produkten är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala myndigheters hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

13. PRODUKTGARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 24 månader, från inköpsdatum, mot felaktigt material och utförande.

Denna garanti täcker inte; rimligt slitage, missbruk, felaktig användning, störning eller manipulering av någon del av produkten.

Eventuella garantier utfärdade av EUFORIA AB påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Om du har några problem med våra produkter, vänligen kontakta oss på adressen nedan.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.