



Svängbar badsits BES 120

artnr. 550600200

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss. Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst. Förstorade format för synskadade kan visas.

Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare. Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på två år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt



1. rtikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. erienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. eakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. roduktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Produktens delar



BES 120

1. Sitt- och vridenhet
2. Armstöd
3. Gummiskydd/badkarsstöd

4. Fästskruv

Indikation

Badkarsstolar och badbrädor hängs i badkaret eller läggs på badkarskanten. Detta underlättar för brukaren genom att lyft- eller sänksträckan minskar, liksom behovet att använda egen styrka. Detta bör övervägas vid betydande funktionsbegränsningar i övre och/eller nedre extremiteter. Att bada kan bli i stort sett självständigt med hjälp av badbräda eller badkarsstol. Det kräver dock en återstående funktionalitet gällande bålhållning och användning av extremiteterna för att klara sig och kunna byta position.

Leverans



1 x	sitt- och vridbar enhet
2 x	stödarmar, justerbara
4 x	hållarklämmor för stödet
1 x	Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner


- Läs denna bruksanvisning noggrant.
- Alla komponenter bör kontrolleras för skador och att de sitter säkert innan de används. Använd inte produkten om det finns några defekter!
- Gå långsamt och försiktigt när du sätter dig ner.
- Varning – risk för halka/fall!
- Stå inte på badsitsen.
- Notera den tillåtna maximala vikten för användaren. Denna information finns i tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.

Montering

Skjut in vänster och höger stödarm i fästet; välj då det första hålet för en övre karkantbredd upp till 63 cm eller det andra hålet för en karkantbredd upp till 58 cm (**bild 1**). Sätt nu in klämmorna i hålen, som visas på bild 2. Se till att alla 4 klämmorna är insatta (**bild 3**).

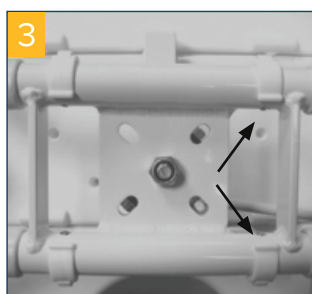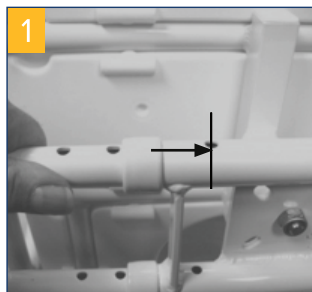


Säkra i badkaret

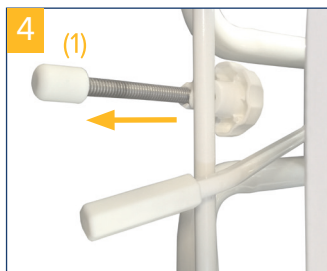

Vrid båda ställskruvorna (1) tills de nuddar kanten på badkaret och förhindrar att sätet glider (**bild 4**).

Kanten på karet måste vara ren och torr. Justera alltid stödens bredd till maximal bredd för att garantera ett säkert stöd.

Swiveling the seat

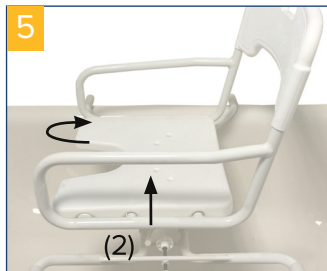

Sätet kan vridas efter att du har dragit i låsspaken (2) (**bild 5**).

Denna funktion bör kontrolleras före första användningen.

Användning

- Håll fast i armstöden med båda händerna och sätt dig på sätet.
- Dra nu låsspaken (2) uppåt, höj benen och sväng ner dem i badkaret (**bild 5**).
- Den frigjorda låsspaken klickar automatiskt i alla 90°-lägen. Tryck inte låsspaken nedåt!
- För att komma ut ur badkaret, följ stegen i omvänd ordning.

Rengöra | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägerbaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas som Descosept AF eller Bacillo AF.
- Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid behov.
- Produkten bör inte utsättas för temperaturer över 60°C under långa perioder (till exempel användning i bastu, etc.).
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.

Teknisk spec.

Artikelnummer	550600200
HMV (medical aids register) no.	04.40.02.3020
Max belastningsvikt	120 kg
Sits bredd x djup	40 x 40 cm
Totalbredd	79 cm
Höjd av ryggstöd	46 cm
Sitsjustering	4 x 90°
Färg	vit
Totalvikt	4,3 kg
Material av ram	Aluminium, pulverlackerad
Sitsmaterial	Plast (PE-HD)