


1. Egenskaper

Pedaltränare Bas för ben eller armar är gjord av pulverlackerad stålram. Den är utrustad med motståndsmekanism, fyra antiglidkuddar och remmar för fötter. Tack vare den vridbara motståndsratten är pedal-tränaren lämplig för olika användare. Den kan användas på sjukhus, rehabiliteringscenter och i hemmet som en anordning för rehabilitering eller individuell rekreation.

Pedaltränarens delar:

- a. Pedalrem
- b. Motståndsratt
- c. Anti-glidkuddar

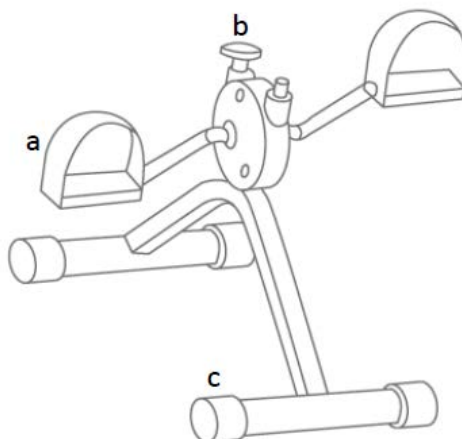

2. Användning

Pedaltränare är designad för användare med kontraktur eller muskelatrofi orsakad av långvarig immobilisering i pga. gips eller genom operation. Pedaltränaren används också i rehabiliteringsprocesser för användare som kräver återställande av motoriska funktioner och återinläring av korrekt mobilitetsmodell som förlorats på grund av skada på neurologiska system. Det är möjligt att anpassa träningsredskapet till extremiteternas tillstånd och rehabiliteringens framsteg tack vare motståndsjusteringen.

3. Motståndsreglering och användning

Det rekommenderas att öka motståndet, intensiteten och/eller träningspassets varaktighet gradvis för att öka nivån av fysisk kondition och förbättra muskelarbete och styrka.

- För att öka motståndet, vrid ratten medurs.
- För att minska motståndet, vrid ratten moturs.
- Vid övningar med låg påverkan ska vredet skruvas av helt.
- Vid motståndsövningar ska vredet dras åt till önskad belastning.

Användande

1. Placera pedaltränaren på golvet eller på ett bord vid armträning. Se till att glidskydden inte glider, ev kan en träningsmatta hjälpa.
2. Gör övningarna i sittande läge. Pedaltränaren ska placeras framför användaren så att höftleden böjs i en vinkel på minst 90°.
3. Placera fötterna på pedalerna och justera remmen till fotens omkrets eftersom det förhindrar att foten glider av pedalen när du tränar.
4. Ställ in motståndet med ratten.

Obs! Innan du är klar, lossa pedalremmarna.

4. Teknisk data

Bas dimensioner	32 cm x 45 cm
Höjd	40 cm
Vikt	1.7 kg
Maximal belastning	30 kg
Färg	Svart

5. Notera

Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av pedaltränaren, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll och rengöring

Utför regelbundet underhåll av pedaltränarens tekniska skick:

- Rengör pedaltränaren regelbundet med en mjuk trasa och vatten med diskmedel. Torka ordentligt med en mjuk trasa.
- Använd inte starka polermedel för rengöring eftersom det kan skada skyddsskikten.
- Ta bort föroreningar från de rörliga delarna av pedaltränaren.

7. Förvaring och transport

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av Euforia AB har en garanti på 2 år. Vänligen kom ihåg att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas

9. Märkning

	Referens-nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinsk hjälpmedel
	Notera		Vänligen läs instruktionerna
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		