

P23038

NUVO Vuxen Toalettram



Säkerhetsföreskrifter



Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

1. AVSEDD ANVÄNDNING

NUVO Vuxentoalettramen är designad för att hjälpa användare vid toalettbesök, att sätta sig och resa sig från toaletten. Ramen ger ett bekvämt och säkert stöd. Golfästsats finns som tillbehör (P63989).

2. SÄKERHET

WARNING: Den maximala användarvikten får inte vara högre än 190 kg.

Stå eller sitt inte på stödet.


Se till att alla ben är inställda på samma höjd för att undvika att pallen vickar och är instabil.

Kontrollera att alla klämmor är helt isatta.

Ej lämplig för användning av barn.

3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök inte montera.

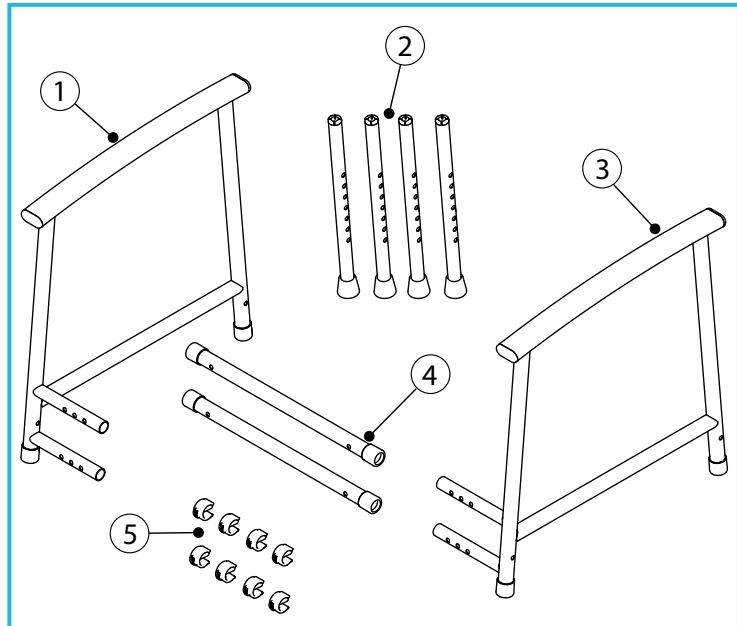

3.1 Innehåll:


1. Sidoramsenhet (H) x 1
2. Benförlängningar x 4
3. Sidoramsenhet (V) x 1
4. Tvärstång x 2
5. E-Klämmor x 8

4. MONTERING

4.1 Montering av tvärstag:

Sätt fast tvärstångerna på sidoramsenheterna och justera till rätt bredd för användaren.


Max användarvikt

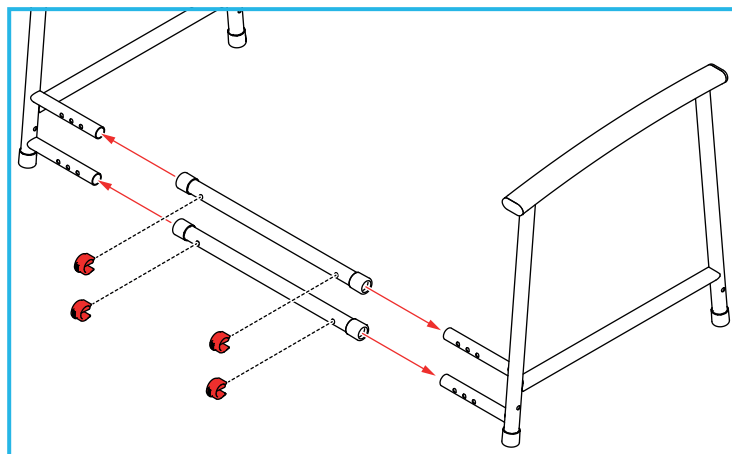

Rikta in hålen och fäst med E-klämmorna.

Obs: Se till att sidoramarna och tvärbalkarna har ställts in på samma bredd/justeringshål.

4.2 Montera benförlängningarna:

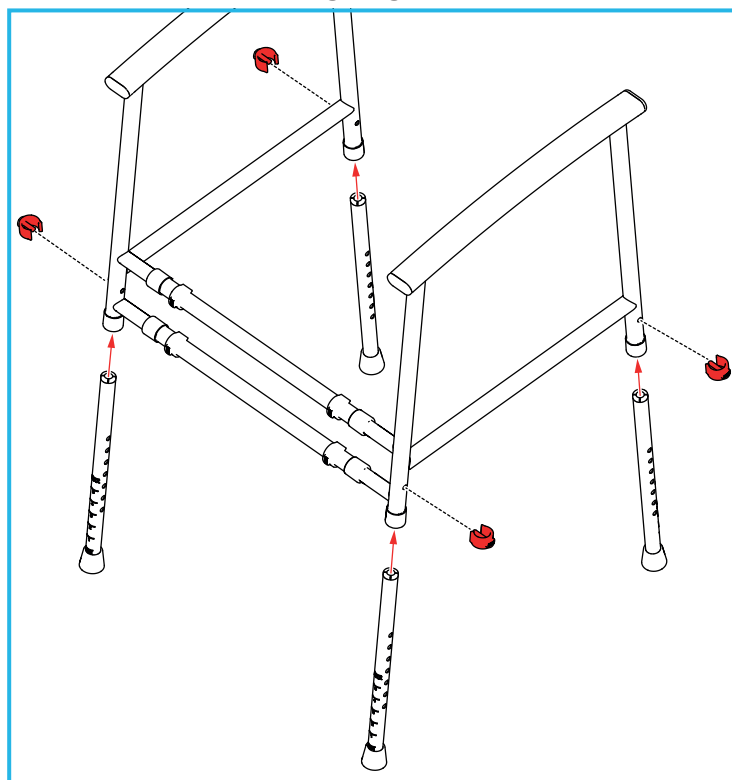

Sätt in benförlängningarna i sidoramsenheterna och justera till rätt höjd för användaren.

Rikta in hålen och fäst med E-klämmorna.

Obs: Använd benjusteringsmarkeringarna för att se till att alla benförlängningar har ställts in på samma höjd.


4.3 Montering av golvfixeringssatsen

Se bruksanvisningen som medföljer den valfria golvfästsatsen (P63989).

5. ANVÄNDNING

5.1 Justera bredden

Ta bort E-klämmorna och justera sidoramsenheterna till önskad bredd.

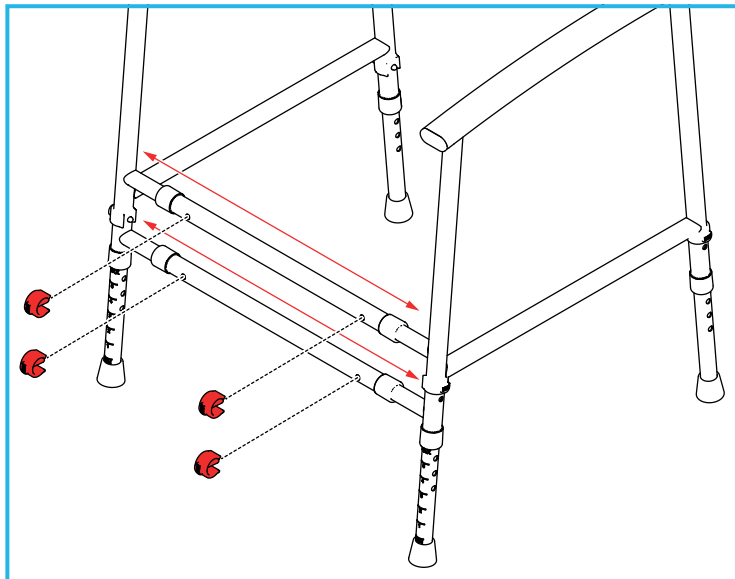


Rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

Obs: Se till att sidoramarna och tvärbalkarna har ställts in på samma bredd/justeringshåll.

5.2 Justera höjden:

Ta bort E-klämmorna och justera benförlängningarna till önskad höjd.

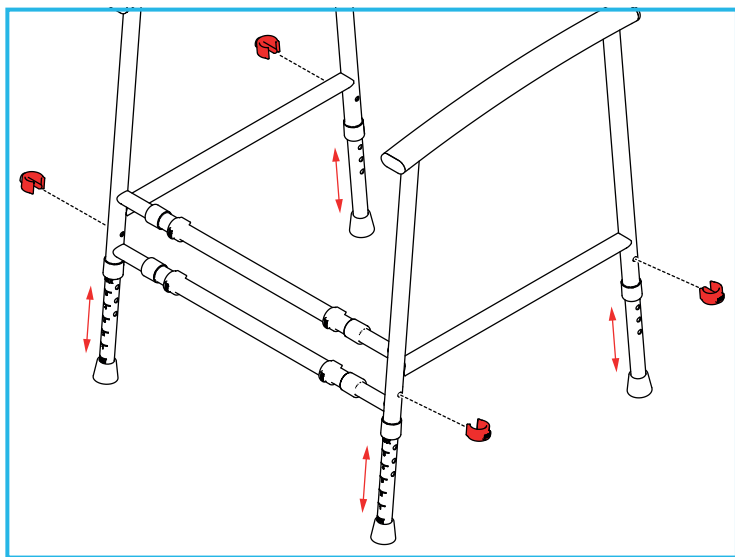

Rikta in hålen och sätt tillbaka E-klämmorna.

Obs: Använd benjusteringsmarkeringarna för att se till att alla benförlängningar har ställts in på samma höjd.

6. UNDERHÅLL

Kontrollera att alla E-klämmor är korrekt isatta och att det inte finns någon överdriven rörelse.

Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på hylsornas skick. Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

7. RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan skada ytan permanent och göra garantin ogiltig.

Rengör ramen regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

8. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

P63989 - NUVO Golvfixeringssats.

P11668 - NUVO Reservdelssats:

- Oval ändlock x 4
- Ferrule x 4
- E-clips x 4
- Anti-skakkrage x 4

För mer information besök vår hemsida eller ring kundtjänst på nedanstående information.

9. AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN

Denna produkt måste rengöras/steriliseras noggrant innan den kasseras.

Denna produkt är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala myndigheters hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

10. GARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 12 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material och utförande.

Denna garanti täcker inte; missbruk eller manipulering av någon del av produkten.

Eventuella garantier utfärdade av EUFORIA AB påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.