

## Savanah bred badbräda Bruksanvisning



Badbrädan är tillverkad i plastöverdragna aluminiumribbor. Savanah bred badbräda kan kompletteras med ett stödhandtag som placeras på valfri sida. Badbrädan placeras mellan badkarets kanter. Den kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel och den kan även decinficeras. Max brukarvikt 190 kg.

När Du öppnat badbrädans förpackning sätter Du ihop de två fästdelarna på badbrädans undersida med de vingmuttrar som medföljer. Se till att fästena ligger tätt emot badkarskantens insida.

AA1093	Längd 68 cm
AA1093A	Längd 66 cm
AA1093B	Längd 71 cm
AA1093C	Längd 76 cm
AA1092	Stödhandtag

Bredd 35 cm
Bredd 35 cm
Bredd 35 cm
Bredd 35 cm

Passar följande innermått min och max

min 50,8 cm max 61,0 cm
min 48,3 cm max 54,4 cm
min 53,3 cm max 63,5 cm
min 58,4 cm max 68,6 cm



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.