



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Duschpall med armstöd DES 130

artnr. 550200200

DS 130



Användaranvosning Duschpall med armstöd och intimsits DS130 artnr: 550200200

Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss. Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. De innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel. Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst. Förstorade format för synskadade kan visas.

Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare. Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på två år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.


Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återanvändning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt

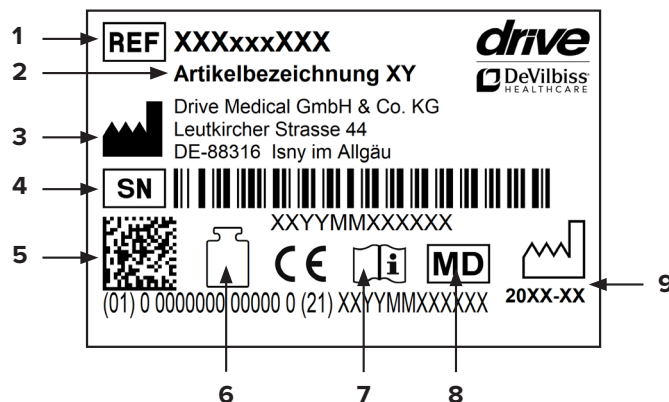

1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. eakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

produktens delar



DS 130

1. Armstöd
2. Sits
3. Justerbara ben
4. Doppsko i gummi

Användning

Begränsningar att säkert stå i duschen på grund av nedsatt funktion i nedre extremiteten med begränsad eller frånvarande rörlighet och muskelstyrka och/eller nedsatt vestibulär funktion eller fallbenägenhet på grund av annan etiologi med samtidigt adekvat stabil bålposition för sittande och tillräckliga kvarvarande funktioner i de övre extremiteterna.


Leveransdelar

1 x	Duschpall med armstöd
1 x	Användaranvisning

Säkerhetsföreskrifter

- Läs denna bruksanvisning noggrant.
- Alla komponenter bör kontrolleras för skador och att de sitter säkert innan de används. Använd inte produkten om det finns några defekter!
- Kläder eller kroppsdelar kan klämmas när man sätter sig ner eller reser sig och när man låser sittdelen på plats.
- Varning – risk för halka/fall!
- Produkten är betydligt mindre stabil än vanliga stolar, undvik därför att luta åt sidan – tippningsrisk!
- Sitt alltid mitt på sitsen och hela vägen bak mot ryggstödet och inte på kanten – tipp- och halkrisk!
- Produkten ska inte utsättas för temperaturer över 60 °C under långa perioder (till exempel användning i bastu etc.).
- Notera den tillåtna maximala vikten för användaren. Denna information finns i tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.

Höjdjustering

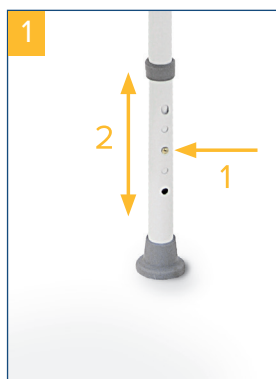

Innan du använder produkten, justera den till önskad höjd (**bild 1**). För att justera höjden på benen:

Tryck på knappen (**1**) och dra samtidigt ut benet eller tryck in det tills knappen klickar på plats i önskat läge (**2**). Se till att tryckknappen har klickat på plats korrekt.

Rengöring | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägerbaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas som Descosept AF eller Bacillo AF.
- Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid behov.
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.

Se till att alla fyra ben är justerade till samma höjd.

Technical data

Produkt	DS 130
Artikelnummer	550200200
HMV-No	04.40.03.1021
Total bredd, lägsta position / Högsta position	53 cm / 54 cm
Total höjd lägsta position / Högsta position	62 cm / 72 cm
Total djup lägsta position / Högsta position	55 cm / 57 cm
Sits bredd	41 cm
Sits djup	41 cm
Sitt höjd	42 - 52 cm
Total vikt	2,8 kg
Max användarvikt	130 kg
Material ram	Aluminium
Material Sits, armstöd	PE-HD