

Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida behov.

## Användning

Att kompensera för ett funktionshinder genom att tillhandahålla en sittyta för en person som duschar

## Monteringsanvisningar

- 1 Ta ur innehållet från kartongen.
- 2 Placera enheten i upprätt läge.
- 3 Leta reda på framsätets stödrör (fram och bak stödrören är lägre än sidostödrören).
- 4 Placera framsätescacharna (A) under framsätets stödrör.
- 5 Sänk ner sätet och snäpp fast baksätessklämmorna (B).
- 6 Justera benen till önskad höjd och se till att de är i linje lika (med samma höjdjustering) och knapparna på fjäderstiften för varje ben sitter helt på plats och sticker ut genom hålen.

## Underhåll och rengöring

- Inspektera regelbundet alla delar noggrant för skador eller slitage, kontrollera säkerheten för eventuella justerbara beslag.
- Alla delar kan torkas rena med en lösning av mildt rengöringsmedel eller hushållsdesinfektionsmedel.
- Torka noggrant efter varje användning.

	Art:nummer
Duschstol	09 107 5753
Duschstol - intimsits	09 107 5761





Max användarvikt



## ⚠ Varningar

- Se till att stolen sitter säkert på plats innan du lägger vikt på den.
- Användning av en halkskyddad badmatta i kombination med duschstolen rekommenderas starkt.
- Täck stolen med en handduk för att minska halka.
- Se till att användarens fötter är stadigt placerade på golvet när du använder stolen.

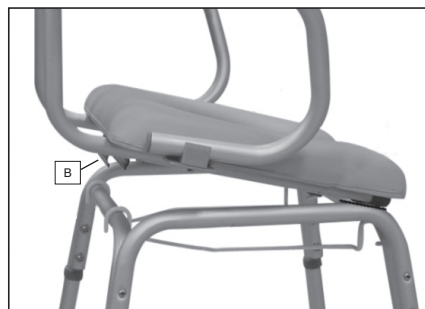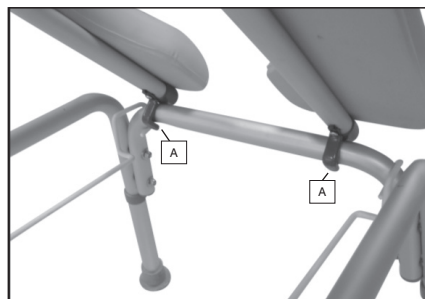

OBS: Doppskorna på dessa stolar är gjorda av naturgummi och innehåller latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

