

Homecraft välvd glidbräda Användaranvisning

AA8835/091120989



Homecrafts välvda glidbräda är på undersidan försedd med antiglid/fästpunkter. Placera dessa mot underlaget när glidbrädan satts på plats under användaren. Se till att allt ligger stadigt på plats. Glidbrädans ytbehandling gör att överflyttningen går lättare om man har kläder på. Är man naken kan man lägga en handduk på brädan. Då går förflyttningen lätt. Formen på glidbrädan gör att den passar för överflyttning i och ur bil samt i trånga utrymmen.

Glidbrädan är 71 cm lång och 37 cm bred. Den väger 1,95 kg. Max brukarvikt 152 kg. Glidbrädan kan rengöras i 60 grader och kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.