

Schampobassäng för hårtvätt

AA1874

INSTRUKTION

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

- ✓ EZ-SHAMPOO® Schampobassäng
- ✓ Shampoo
- ✓ Vattenförsörjning eller kanna med varmt vatten
- ✓ Behållare för använt vatten

HUR MAN ANVÄNDER

1. Blås upp bassängen och kudden genom munnen eller med luftpump (ingår ej).
2. Placera Basin under kundens huvud.
3. Placera änden av avloppsslangen i avloppsvattenbehållaren.

✎ Avloppsvattenbehållaren måste placeras lägre än bassängen för att gravitationssystemet ska fungera. En avtappningsplugg i botten av bassängen tillhandahålls för din bekvämlighet.

4. Använd vattentillförsel eller kanna med varmt vatten, schamponera håret och skölj sedan handdukstorka.

FÖRVARING & RENGÖRING

Produkten är gjord av PVC och innehåller ett antimikrobiellt medel. För att rengöra, handtvätt uppblåst bassäng med varmt vatten och mild tvål. Skölj, dränera och torka bort överflödigt vatten. Låt bassängen vara uppblåst i flera timmar efter användning/rengöring för att tillåta grundlig torkning innan den töms, vikas eller förvaras.

⚠ Om du är orolig för allergier eller hur den rekommenderade rengöringslösningen kan påverka din hälsa, rådgör med din läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du använder den så att han/hon kan rekommendera alternativ eller att produkten kan kasseras efter varje användning.

Bredd: 61 cm
Längd: 51 cm
Djup: 20 cm
Vikt: 680 g
Dräneringsslangens: 1 m
Latexfri



Tillbehör: AA1876, Vattenbehållare för hårtvätt i säng.

Vattenbehållare för hårtvätt i säng. Passar bra tillsammans med vår schampobassäng. Vattenbehållaren kan t ex hänga i en sängdävert. Vattenbehållaren är försedd med duschslang och munstycke. Vattenbehållaren rymmer cirka 5 liter.

