



1. Introduktion

Innan du använder våra produkter bör du inspektera utrustningen för eventuella defekter som kan ha uppstått under transporten. Om detta händer, kontakta din återförsäljare.

Läs sedan denna instruktion som innehåller viktig information för användaren. Kontakta oss om du har några frågor angående användningen av utrustningen. Våra rådgivare kommer att ge dig all information du behöver löpande.

Observera att om du har andra frågor än de som rör användningen av våra produkter ska du kontakta din läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

2. Egenskaper

Toalettsitsen är tillverkad av slitstarkt plastmaterial. Den är utrustad med modernt monteringsystem med antiglidskydd, svängbara armstöd och utskurna framtill som underlättar utförande av hygieniska aktiviteter i sittande läge. Ergonomiskt utformad yta på toalettstolen ger en jämn fördelning av tryckkraften på användarens kropp. Den lätta lutningen nedåt på toalettsitsen främjar korrekt hållning och minskar böjning av höft- och knäleder. Ytan är lätt att rengöra och motstår fläckar och lukter. Denna upphöjda toalettsits passar de flesta toalettskålar.



3. Användning

Upphöjd toalettsits är en extra utrustning som hjälper användaren att utföra hygieniska aktiviteter. Den upphöjda toalettsitsen rekommenderas till personer med nedsatt rörlighet som har svårt att sitta och stå upp vid toalettbesök och för patienter efter en höftoperation.

4. Montering och allmänna rekommendationer för användning

Notera! Följ informationen som finns i den här manualen när du monterar och justerar.

Användare med nedsatt rörlighet kan behöva hjälp av en tredje person som har lämplig kompetens.

Notera! Använd inte toalettsitsen när du märker några synliga eller märkbara skador (t.ex. sprickor) eftersom detta kan orsaka en olycka.

FÖRHÖJNINGENS OLIKA DELAR








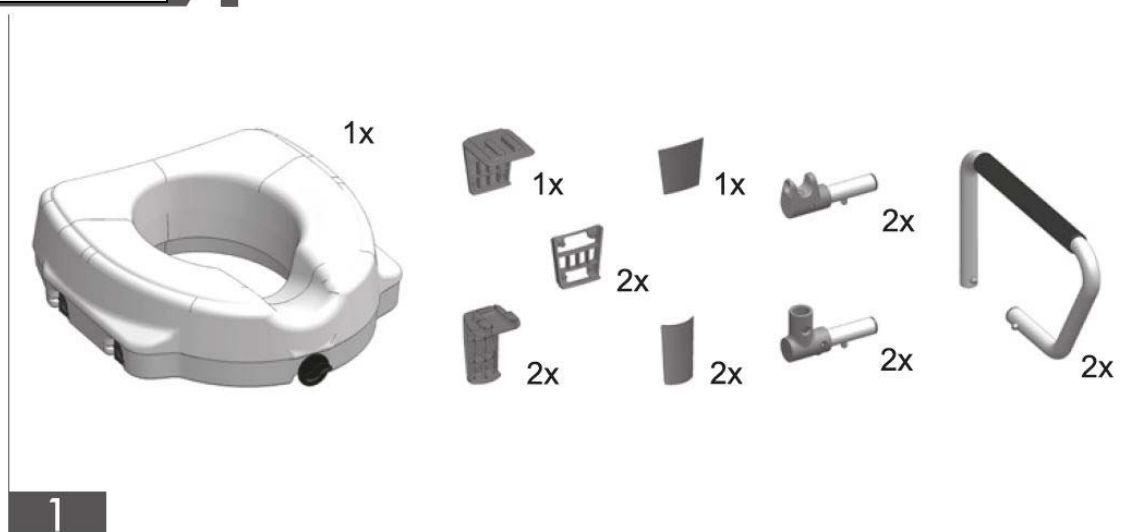


Bild. 2. Fäst fästet i främre delen av den upphöjda toalettsitsen, ytterligare insatser (1 cm eller 2 cm) beroende på storleken på toalettskålen, och sedan skyddsskåpan.

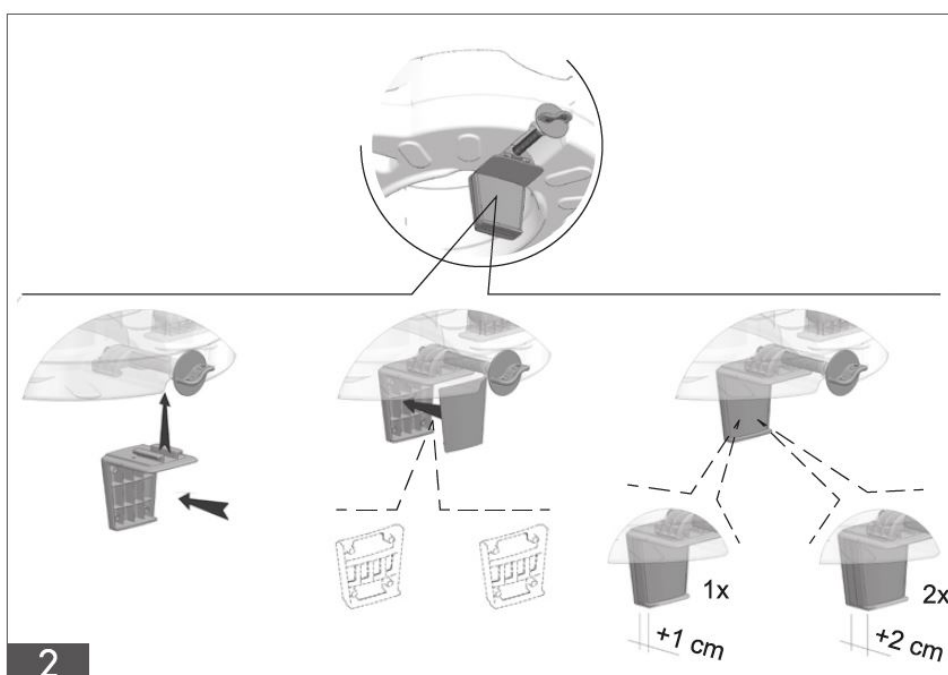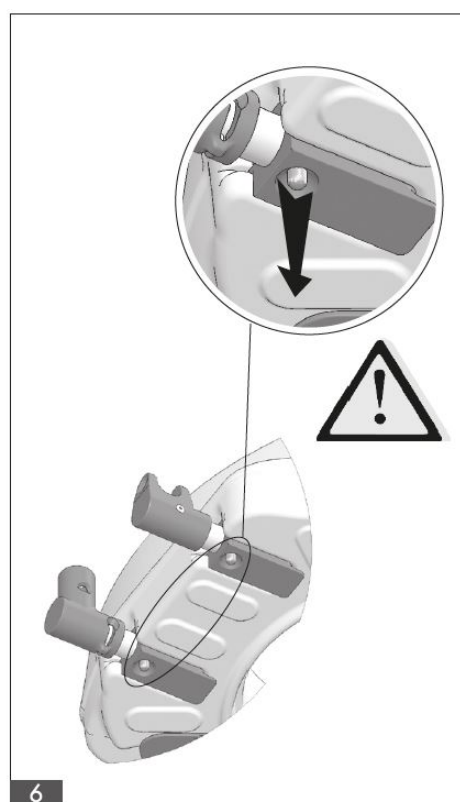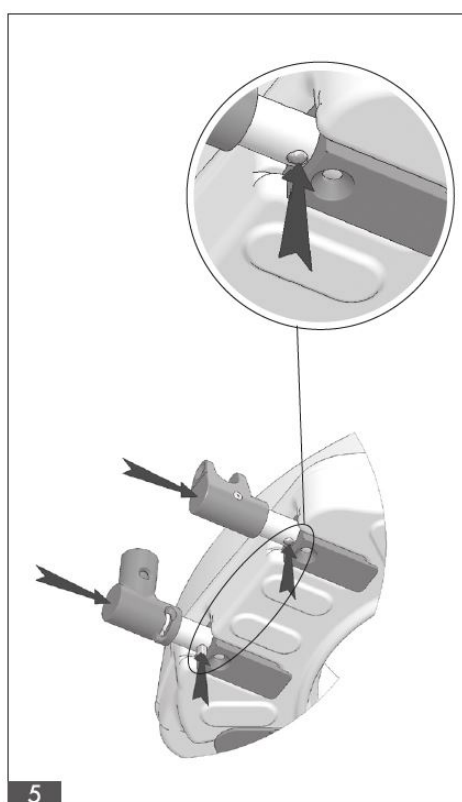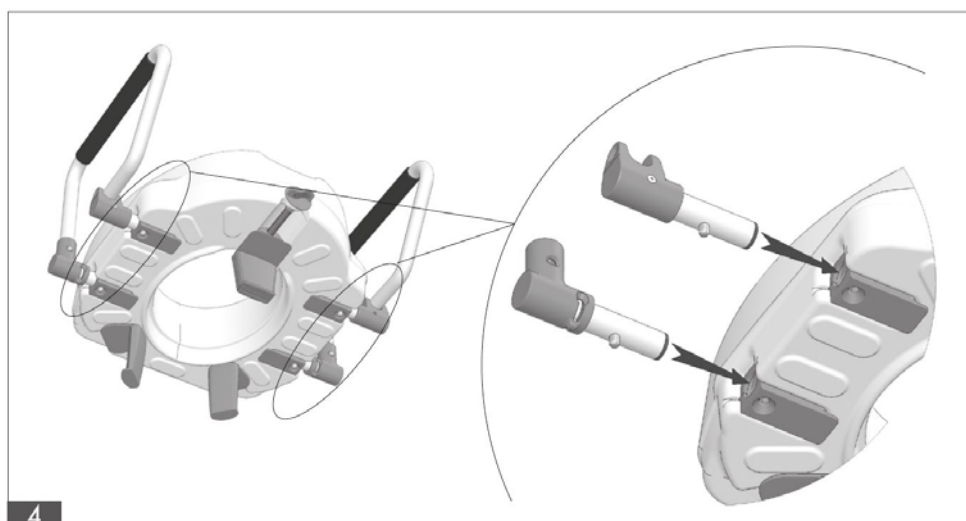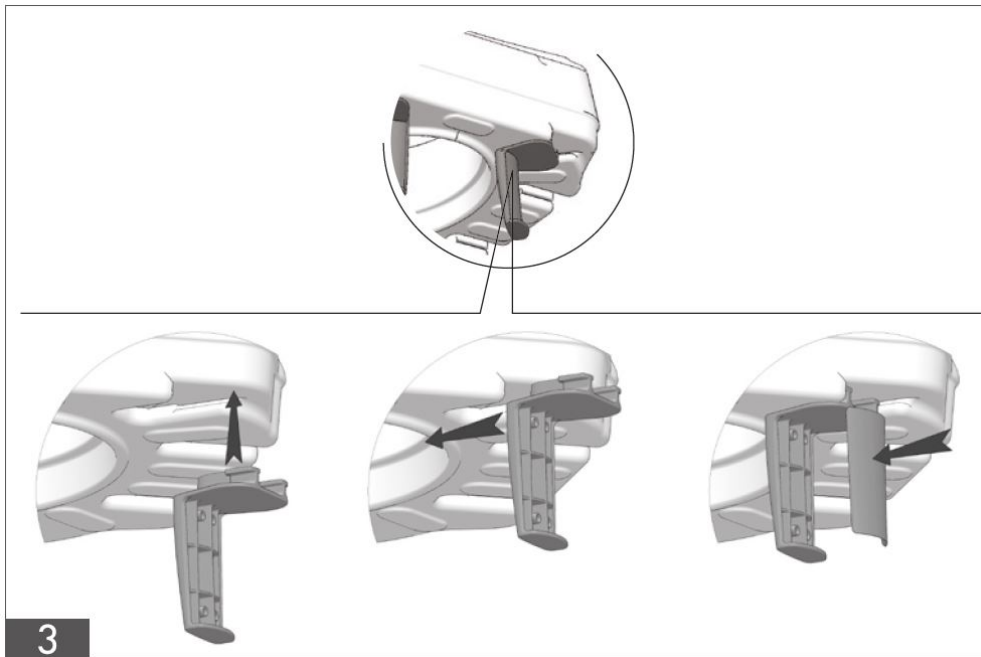

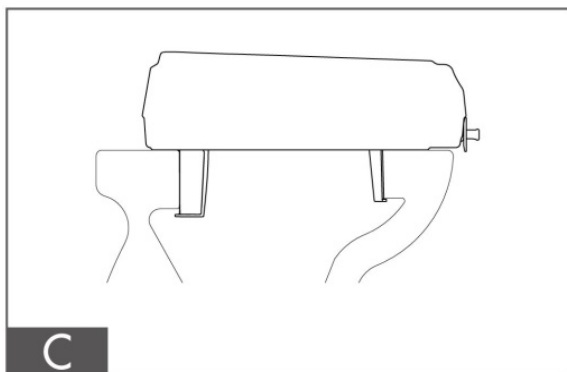

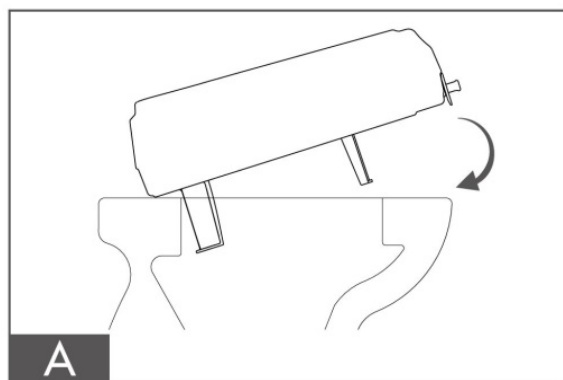

Notera! Justera fästet till toalettskålens bredd med hjälp av justeringsratten (B).

Innan bruk försäkrar du att den upphöjda toalettsitsen är korrekt monterad och konsolen är korrekt åtdragen.

5. Teknisk data

Innermått	20 x 25 cm
Yttermått	39 x 43 cm
Höjd	12 cm
Vikt	1.40 kg
Max belastningsvikt	130 kg

6. Notera samt rekommendationer

- Användare med nedsatt rörlighet behöver hjälp av en tredje person.
- **Överskrid inte** den upphöjda toalettsitsens max brukarvikt (130 kg).
- **Stå inte** på den upphöjda toalettsitsen.

- Fäst inga föremål på den upphöjda toalettsitsen eftersom det kan orsaka en olycka.
- Endast en person kan använda den upphöjda toalettsitsen under hygieniska aktiviteter.
- Ta bort alla potentiella hinder i badrummet och se till att golvet är plant. Helt golv bör säkras med t.ex. halkskyddsmattor.
- Gör inga reparationer eller modifieringar själv. Alla reparationer bör utföras av kvalificerad personal från tillverkaren.
- Förvara inte den upphöjda toalettsitsen i rum vid minusgrader och utomhus.

NOTERA! EUFORIA AB bär inte ansvar för felaktig användning av den upphöjda toalettstolen, underlåtenhet att uppfylla säkerhetsreglerna och missbruk.

7. Underhåll och rengörning

- Rengör den upphöjda toalettsitsen regelbundet med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- **Använd inte** för rengöring: starka polermedel och rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka produktskador, synliga defekter och därmed förlust av garantirättigheter).
- Kontrollera minst en gång var tredje månad:
 - skick på armstöd
 - tillstånd för justeringsratten
 - skick på låsstift

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som mottogs vid köptillfället.

Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

Som ett användarvänligt företag levererar vi endast produkter som har testats noggrant med avseende på material, kvalitet och funktionalitet.

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående vår serviceprocedur.

9. Etikett

	Referens nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Hänvisar till instruktioner
  MDR 2017/745 2007/47/EC	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		