

Installation och Justering

Lägg ut snörbandssystemet på golvet. Två av ändarna ska ha grå plastflikar (**A**) Bild 1, och de fria ändarna har inga flikar. Från nattskenans sida av sängen, för in de fria ändarna av snörbandssystemet mellan madrassen och sängbotten så långt in som möjligt. Från motsatt sida av sängen, nå mellan madrassen och sängbotten och dra igenom de fria ändarna, som Bild 1. Se till att de grå plastflikarna på nattskenans sida inte glider mellan madrassen och sängbotten.

Sätt in de långa armarna (**B**) i vardera änden av sidoskenan (**C**) och fäst med de fyra stiftklämmorna (**D**) (Bild 2). OBS: Det är viktigt att se till att dubbarna på skenan är vända utåt, bort från madrassen. (Se **E** i Bild 3).

Skjut in de långa armarna på Night Rail under madrassen. Se till att nattskenan är placerad centralt mellan de två benen längs ena sidan. Fäst de två grå plastflikarna (**A** i Bild 1) över de två dubbarna på nattskenan (se Bild 4). Dra i sladdarna från andra sidan av sängen. Kontrollera att flikarna och sladden går runt utsidan av nattskenan, enligt Bild 4 och varningsetiketten på produkten.

Bind de fria ändarna av sladdarna säkert på plats överst på benen som visas i Bild 5. För divansängar utan ben, knyt runt toppen av hjulen.

När den väl har installerats ska nattskenan sitta ordentligt fast i sängen och får inte dras bort från madrassen. Om så inte är fallet, bör enheten justeras om och återställas vid behov. Night Rail är nu redo att användas.

För att underlätta för användaren att komma i och ur sängen rekommenderas att skenan tas bort och ersätts av en assistent. Detta uppnås enkelt genom att enkelt släppa de grå plastflikarna (**A**). På så sätt kan nattskenan enkelt tas bort från sängen för att bädda eller byta säng utan att behöva ta bort snörbindningssystemet. De fyra stiftklämmorna (**D**) kan också tas bort så att benen kan vikas inåt så att nattskenan kan förvaras under sängen etc.

Bild 1

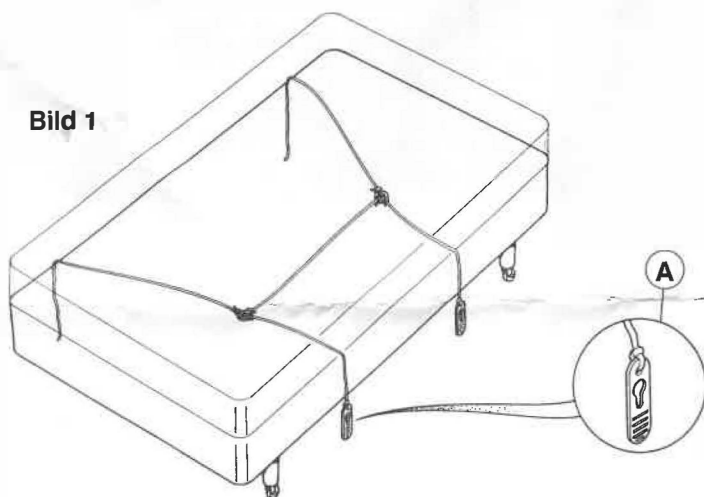


Bild 2

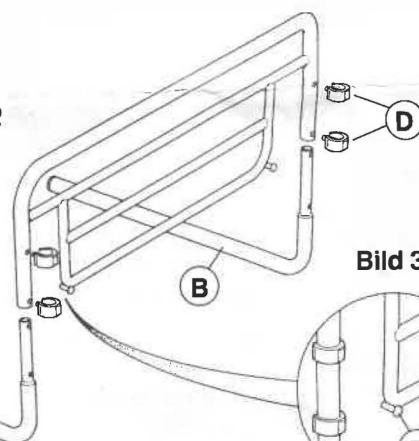


Bild 3


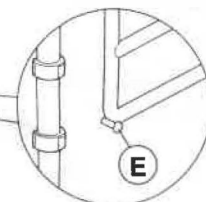


Figure 4



Se till att dubben är vänd så här

Bild 5

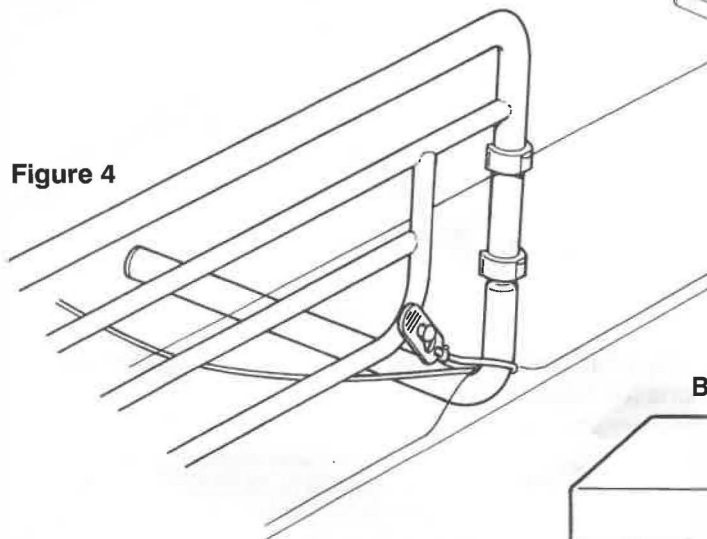