

## Fallskyddsmadrass 091089630

Ta dig tid att läsa innehållet i denna informationsguide. Alla åtgärder som är oförenliga med denna guide görs på operatörens risk och Euforia AB kommer inte att hållas ansvarigt för personskada eller skada. Utöver informationen i den här guiden bör operatörer använda den specificerade produkten med vederbörlig hänsyn till tillämpliga internationella, nationella och lokala bestämmelser, riktlinjer och policyer. Säker och korrekt användning av denna produkt är enbart efter operatörens gottfinnande.

Om en allvarlig incident inträffar under användning ska detta rapporteras till Euforia AB med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

### Teknisk Information:

<b>Madrass/ Kvalitet</b>	
<b>Överdrag</b>	Blue Wipe Clean
<b>Stoppning/fyllning</b>	Förbränningsmodifierat polyuretanskum
<b>Storlek</b>	183 x 60 x 5cm



### Produkt Namn: Fallskyddsmadrass (FSM)

**Avsett syfte och design:** FSM är en madrass av skum med hög densitet, designad för att begränsa skador om en användare skulle falla ur en standard-/låg nivå bädd.

FSM är tillverkad med högdensitet eller standardskum och kan göras i en sektion eller kan göras i tre sektioner för att tillåta vikning. Skummet är täckt med ett avtorkbart, avtagbart överdrag med dragkedja.

**Operatörskvalifikationer:** De som är ansvariga för lagring, transport, användning, rengöring och desinficering av FSM bör se till att de läser dessa instruktioner i sin helhet. FSM bör endast användas för det avsedda ändamålet, som specificeras i denna bruksanvisning.

Om FSM ska användas i en vård/medicinsk miljö bör användningen av FSM bestämmas av en kvalificerad vårdpersonal, efter en omfattande och holistisk bedömning med både formella och informella bedömningsmetoder. Utöver informationen i den här guiden måste operatörerna följa alla lokala manuella hanterings- och hälso- och säkerhetspolicyer.

## Bruksanvisning:

**Före användning:** Vid mottagande av FSM bör all förpackning tas bort och visuella kontroller bör utföras för att säkerställa:

- Innehållet är komplett
- FSM har inte skadats under transporten

**Förvaring:** När FSM inte används bör den förvaras säkert för att undvika skador. Om i en vård/medicinsk miljö bör FSM förvaras på en säker plats borta från allmänheten. För enkel förvaring kan FSM:s vikas och staplas ovanpå varandra. För att undvika skador på FOM:s, förvara aldrig andra föremål ovanpå dem, förvara dem inte direkt på golvet och förvara dem inte bredvid radiatorer eller andra värmekällor.

## Användande:

- Lossa kardborrefästen
- Helt utdragen vikt madrass
- Placera en förlängd madrass på varje sida av sängen, så nära sängen som möjligt.

**Efter användande:** FSM är en återanvändbar produkt, därför bör följande processer genomföras för att tillåta återanvändning.

Visuell inspektion: Efter användning ska FSM kontrolleras visuellt för att se om den är i gott skick och för tecken på materialförsämring eller skada. Kontrollera om det finns tecken på sönderrivning och/eller punkteringar, kontrollera alla sömmar för tecken på sprickor, kontrollera blixtlåset/dragkedjorna för tecken på skador och kontrollera om det finns tecken på permanent fläckning.

Dra upp dragkedjan på FSM och kontrollera skuminsidan för tecken på vätska inträngning/genomstrykning. Om det efter den visuella inspektionen finns några tecken på kontaminering, bör FOM tas ur användning tills locket och/eller det inre skummet har bytts ut. Om överdrag eller skuminsida byts ut är det viktigt att rätt motsvarande överdrag/skuminsida beställs om, eftersom FSM-överdrag inte får användas på andra skuminsidor.

Kontaminerade höljen/inre skum ska kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med lokala riktlinjer för förebyggande och kontroll av infektioner, om tillämpligt. Om FSM är i gott skick ska den rengöras enligt instruktionerna nedan och förvaras i enlighet med förvaringsinstruktionerna.

**Rengöring:** FSM kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel eller antibakteriella våtservetter. Alternativt kan skuminsidan tas bort från överdraget och överdraget tvättas vid låg temperatur (30°C). FSM bör plan-torkas i en inomhus, ren miljö eller torktumlas på låg värme.



## Allmänna varningar Försiktighetsåtgärder och begränsningar:

- Använd endast FOM för dess avsedda ändamål
- Se till att inte punktera locket för att undvika vätska inträngning/genomstrykning
- Placera inte vassa föremål som saxar, nålar, sprutor, skalpeller eller andra vassa föremål på FSM
- Råda operatörer, användare och besökare att ta bort eller täcka handsmycken inklusive ringar med vassa kanter
- Om tillämpligt, var extra försiktig när du använder medicinsk utrustning nära FSM
- Dra inte längs golvet, transportera inte i rullburar om de inte är helt skyddade från vassa kanter och skrapa inte mot väggar, dörrkarmar, dörrspärrar eller lås
- Undvik utstickande och vassa föremål
- Frekvent eller långvarig exponering för desinfektionslösningar med högre koncentration kan åldra tygöverdraget på FSM i förtid
- Överdraget måste sköljas noggrant och torkas mellan och efter rengöring eller desinfektion. Överdraget är mer känsligt för fysiska skador när det är vått och kommer att förbli känsligt under en tid efter att ha torkat
- Slipande rengöringsmedel och svampar får inte användas för att undvika inträngning av vätskor/genomslag
- Dimetylformamid (DMF), tetrahydroruran (THF), koncentrerade oorganiska syror, koncentrerade alkalier och fenol/kresolbaserade kemikalier bör aldrig användas