


## 1. Egenskaper

Ryggstödet är tillverkat av pulverlackerad stålram. Den består av en basdel med spärrsystem och en ryggstödsdel som är gjord av luftgenomsläppligt linnematerial med extra kudde som ökar liggkomforten. Ryggstödet kan justeras efter individuella behov när du ligger eller sitter, tack vare spärrsystemet.

Ryggstödet delar

- a. spärrsystem
- b. ryggstöd
- c. kudde

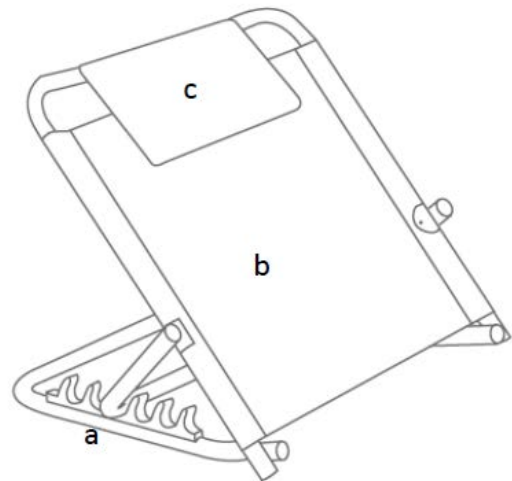

## 2. Användning

Ryggstöd är en extra utrustning avsedd för användare med nedsatt rörlighet vilket förhindrar eller hindrar att utföra dagliga aktiviteter utan hjälp. Ryggstödet hjälper till att bibehålla halvsittande position utan att behöva hållas av den andra personen. Den används också för att luta användare till upprätt position genom att gradvis vänja det kardiovaskulära systemet till sittande läge. Ryggstödet rekommenderas för användning i hemmet, äldreboenden, sjukhus eller annat boende.

## 3. Justering - Lutningsvinkeljustering

Ryggstödet kan justeras inom intervallet 25-27 cm.

## 4. Teknisk data

Total bredd	54.5 cm
Inner bredd	50 cm
Djup	50 cm
Lutningsvinkeljustering	25-57 cm
Vikt	2.7 kg
Max brukarvikt	100 kg
Färg	Vit/Blå

## 5. Notera

**EUFORIA AB tar inte ansvar för felaktig användning av ryggstödet, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.**

## 6. Rengöring och underhåll

Gör en visuell inspektion av alla skarvelement (klämmor, gångjärn) på ryggstödet minst en gång var tredje månad inklusive:

- skick på spärrmekanismen
- stabilitet och utseende på ramen

## Rengöring

Kontrollera det tekniska tillståndet för ryggstödet regelbundet:

- Rengör ramen med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- **Använd inte** för rengöring: starka poler- och rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och därmed - förlust av garantirättigheter).










## 7. Förvaring

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas

## 9. Etikett

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Läs bruksanvisningen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer. Läs mer på: [www.euforia.se](http://www.euforia.se) Tack för att du valde Euforia!