

## 1. Egenskaper

Kudden ger, tack vare sin anatomiska form och möjligheten att justera fastheten genom att blåsa upp eller tömma luft, hög komfort. En effektiv pump ingår i setet. Kudden är utrustad med ett halkfritt överdrag med dragkedja och sidohandtag för enkel vändning av patienten. Tack vare termisk förseglingsteknik är kudden hållbar och kommer inte att öppnas. En dold luftventil förhindrar oavsiktligt luftutsläpp och ökar komforten.

## 2. Användning och rekommendationer

Vändkudden är en produkt som stödjer en säker ompositionering av kroppen för undersökning eller terapi. Det stödjer vården av personer med begränsad rörlighet, sjuka, äldre och funktionshindrade. Tack vare sin specifika design stabiliserar den patientens kropp perfekt, vilket möjliggör rehabilitering och daglig funktion. Kudden är tillägnad sjukgymnaster, massageterapeuter, sjuksköterskor, läkare och vårdgivare till sjuka, funktionshindrade och äldre. För användning i vårdinrättningar och i hemmet.

### Användning:


- Att hjälpa till att vända en patients kropp utan att en vårdgivare behöver lyfta.
- Hjälpa till med att ta hand om sjuka, äldre, funktionshindrade och överviktiga.
- Assistera vid förflyttning till rullstol, stol, bil, badrum etc.
- Eliminering av patientens smärta orsakad av att vända sig åt sidan.
- Förhindrar bildandet av liggsår. Hjälper till med träning för att förhindra muskelatrofi orsakad av långvarig sängliggande.

## 3. Anteckningar och rekommendationer

**Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning**

#### 4. Användningsmetod

- Blås upp kudden (pump ingår).
- Placera kudden under knäna på den som ligger på rygg så att båda stödspåren är under patientens knän (Fig.1).
- Vrid kudden och placera den i upprätt läge (Fig.2).
- Stöd patientens arm med ena handen och håll i kuddhandtaget med den andra, vänd personen i sidled (Fig.3).
- Efter att ha utfört nödvändig vård, vänd tillbaka patienten på ryggen och dra ut kudden.

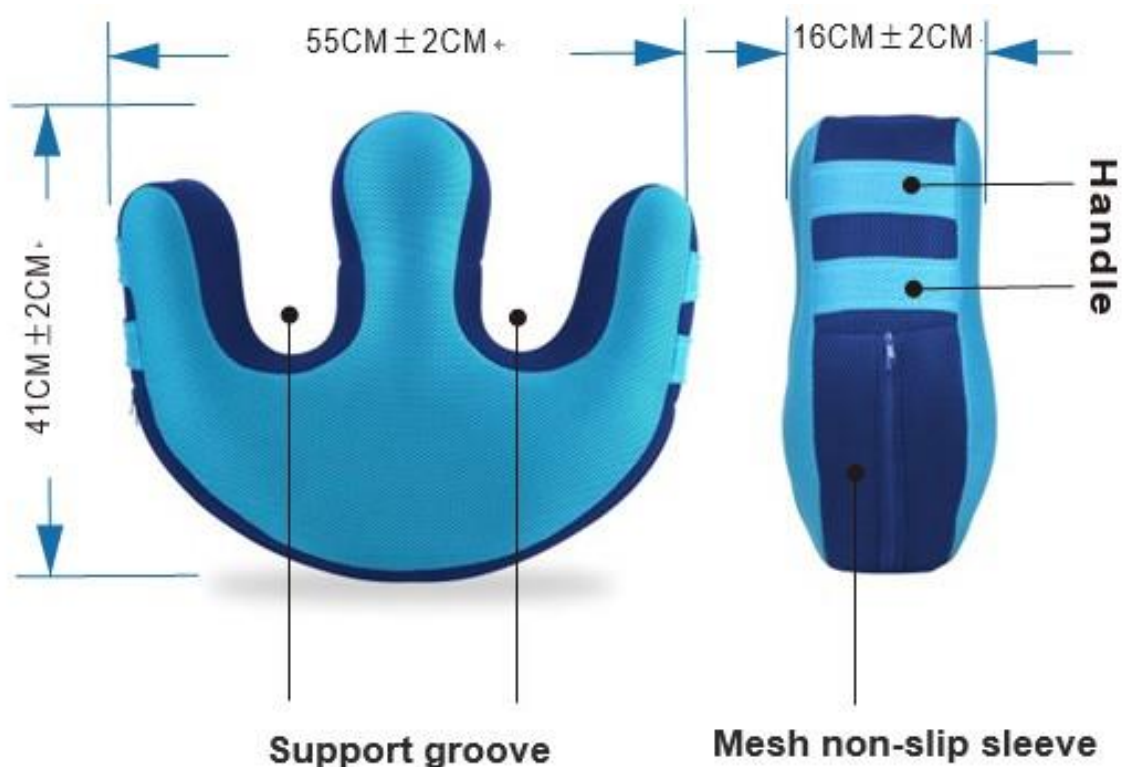

## 5. Teknisk data

Model	Vändstöd
Dimensioner	55 x 41 x 16 cm
Vikt	0,44 kg
Överdrag	anti-halk, dragkedja
Färg	blå

## 6. Underhåll

### Rengöring:

- Rengör dynan med en fuktig trasa fuktad med milda rengöringsmedel. Blöt inte dynan. Torka den torr efter varje underhåll. Starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel kan skada produkten. Använd inte slipmedel.
- **Notera!** Använd inte värmekällor för torkning.
- **Notera!** Använd inte blekningsmedel, sköljmedel och kemtvättmedel för rengöring!

### Rengöring av överdrag:

- Skyddsöverdraget kan tvättas manuellt eller i tvättmaskin i 40°C med milda tvättmedel. Fäst blixtlåset innan rengöring. Överdraget kan torkas med en ström av varm luft eller i en torktumlare vid låg temperatur.
- **Notera!** Dynan kan förses med skyddsöverdraget först när det har torkat helt.
- Stryk inte överdraget!




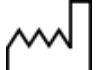





## 7. Förvarings- och transport

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som mottogs vid köptillfället. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

## 9. Etikett

	Referens nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Hänvisning till bruksanvisning
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt på:  
[www.euforia.se](http://www.euforia.se) Tack för att du valde Euforia AB!