

Monteringsanvisning Parnell Premier Platinum

Art nr 09155077



Passa in handtaget i bottenapparna. Kontrollera att stödet sitter stadigt, hela tapparna ska döljas av handtaget. Kan ställas på valfri långsida av sängen.



Skjut in stödet mot sängen. Det ska stå helt intryckt mot sängen, utan luft mellan stöd och sängram.



Skruva fast ratten i bottenplattan.



Lokalisera de två krokarna under sängramen och vrid den övre svarta ratten medsols tills du känner motstånd. Fortsätt att vrida tills ratten är hårt åtdragen.

Handtagets höjd 92 cm

Handtagets bredd 28 cm/
övre delen

Djup ram inkl golvplatta 82 cm



Bredd 40 cm


Fakta

Utrymme under sängen:

Ej under 3 cm
Ej över 37 cm

Produktvikt: 14 kg
Brukarvikt: max 200 kg
Rengöring: vanliga rengöringsmedel

Krokens mått:
höjd 7,5 cm
djup 4 cm

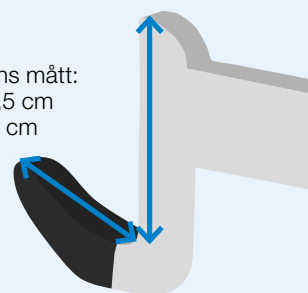

Material: kraftigt vitlackerat stål.
Skruvor i hårdplast.

Inga verktyg behöver användas vid montering.

OBS! Får inte användas med förhöjningskoner.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.