

EUFORIA

Hjälpmedel
& smarta ting

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

AiO

Användaranvisning - Monteringsanvisning
Art#:550900100 - 550900200 - 550900300 - 550900400



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss. Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. De innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.

Förstorade format för synskadade kan visas. Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare.

Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG deklarerar överensstämmelse för produkten som beskrivs i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.


Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt

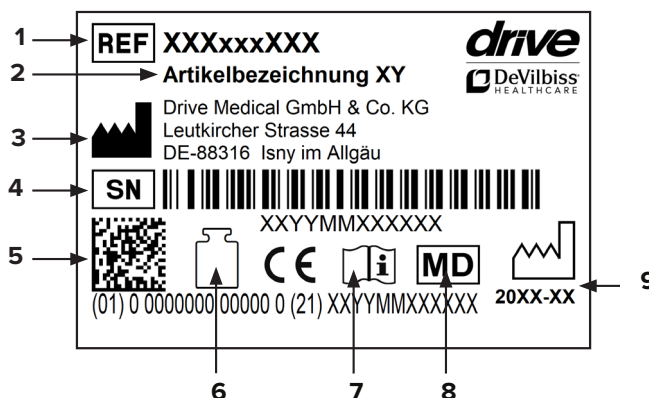

1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan.

För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Tillämpliga standarder

ISO 17966:2016 Hjälpmiddel för personlig hygien som stödjer användarna.

Stolens olika delar



AiO

1. Sits
2. Justerbara ben
3. Doppskor
4. Armstöd
5. Ryggstöd

Användningsområde

Duschhjälpmedel är duschstolar, pallar, stolar, duschstöd, mobila duschstöd som uteslutande är avsedda för hushållsbruk. Duschhjälpmedel används för dem vars fysiska funktionsbegränsningar inte längre tillåter daglig personlig vård under duschen utan användning av extra hjälpmedel. Duschhjälpmedel förskrivs när användarens stabilitet är nedsatt. Om det dessutom sker en försämrad sittstabilitet (t.ex. förlamar i bålen) eller en svaghet vid sittande/resande, så ska även ryggstöd och sidostöd användas vid behov.

Användning-Indikation

För personer som inte kan stå säkert i duschen på grund av skador på nedre extremiteternas funktion med begränsad eller sviktande rörlighet och muskelstyrka och/eller skador på vestibulära funktioner eller fallbenägenhet av andra skäl samtidigt som de har en tillräcklig stabil bålställning för att kunna sitta och tillräcklig restfunktion i överextremiteterna.

Leveransinnehåll


1 x	Sits
4 x	Justerbara ben
2 x	Armstöd (ingår med artikelnr. 550900200, 550900400)
1 x	Ryggstöd ((ingår med artikelnr. 550900300, 550900400)
1 x	Användaranvisning

Säkerhetsföreskrift

- Läs bruksanvisningen noggrant.
- Före användning kontrollera alla komponenter för skador och se till att de är säkra. Använd inte produkten om den är defekt!
- När du sätter dig ner, reser dig upp och när du klickar på sittplattan på plats kan kläder eller kroppsdelar fastna.
- Varning - Risk för halka/fall!
- Produktens tippstabilitet är betydligt lägre än med vanliga stolar, undvik därför att luta åt sidan – tipprisk!

- Sitt alltid i mitten av sittytan eller precis baktill bredvid ryggstödet och inte på kanten – tippnings- eller halkrisk!
- Varning – Risk för att fingrarna kommer i kläm vid montering
- Produkten får inte utsättas för temperaturer över 60°C under en längre period (t.ex. användning i bastu etc.).
- Observera den högsta tillåtna vikten för användaren. Denna information finns i de tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.
- Alla allvariga incidenter som inträffar med produkten måste rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.

Stolens delar

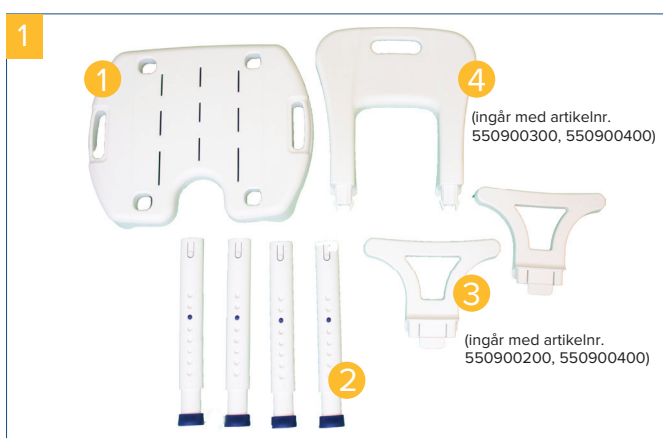

1. Montera benen

Placera sittplattan (1) på en ren plan yta med undersidan vänd uppåt. Använd vid behov en mjuk pad för att förhindra repor. Tryck på den vita vredet i den övre änden av stolsbenet (2) och tryck in den i det matchande urtaget i sittplattan (Fig. 2).



Stolsbenet är ordentligt fastsatt när du hör ett "klick" och knappen är helt ute (Fig. 3).

2. Montera armstöden

(ingår med artikelnr. 550900200, 550900400)

Skjut in armstödet(-en) (3) i urtaget i sittplattan tills förreglingarna klickar på plats.



3. Montera ryggstöd

(ingår med artikelnr. 550900300, 550900400)

Tryck in ryggstödet (4) i de främre eller bakre urtagen på sittplattan tills spärrarna klickar på plats.



Justera längden på benen

Innan du använder produkten justera den till önskad höjd.

För att justera höjden på benen: Tryck på knappen (1) och dra samtidigt ut benet eller tryck in det tills vredet klickar på plats i position krävs (2). Se till att tryckknappen är ordentligt låst på plats.



Se till att alla fyra benen är justerade till samma höjd.

Varning - vältrisk!

Förberedelse för återanvändning

- Kontrollera att produkten är intakt och rengör den
- Observera informationen för återanvändning (sidan 3)

Rengörning | Underhåll

- Underhållsfri
- Rengör regelbundet med en fuktig trasa för hand.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- eller vinägerbaserade rengöringsmedel!
- Använd inga slipande rengöringsmedel!
- För desinfektion kan du använda ett spraydesinfektionsmedel, t.ex. Descosept AF eller Bacillol AF
- Om det finns defekter, ring återförsäljaren som du köpte denna produkt.

Teknisk specifikation

AiO	o.AL., o.RL	o.AL, m.RL	m.AL., o.RL	m.AL., m.RL
Artikelnummer	550900100	550900300	550900200	550900400
HMV nr.	-	-	ansökan	ansökan
Total bredd	515 mm			
Total höjd	380-550 mm	560-725 mm	775-945 mm	775-945 mm
Total djup	470 mm			
Sittbredd	427 mm	515 mm	427 mm	515 mm
Sittdjup	410 mm	410 mm	340 mm	340 mm
Sitthöjd	380 – 550 mm			
Ryggstöd höjd	-	-	410 mm	410 mm
Armstöd (BxLxH)	-	35 x 320 x 200 mm	-	35 x 320 x 200 mm
Höjdjustering	8 steg			
Vikt	3.04 kg	3.82 kg	3.68 kg	4.44 kg
Max belastningsvikt	130 kg			
Material	Plast (PE-HD)			
Färg	Vit			