

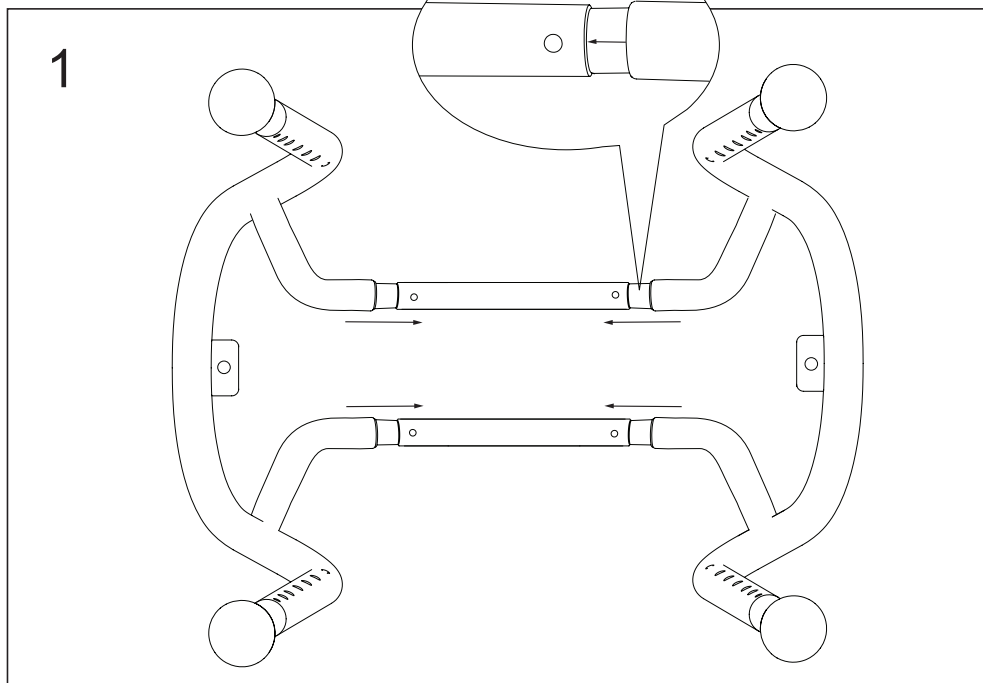
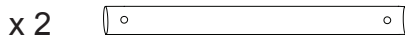
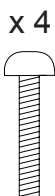


**TRUST**  
CARE

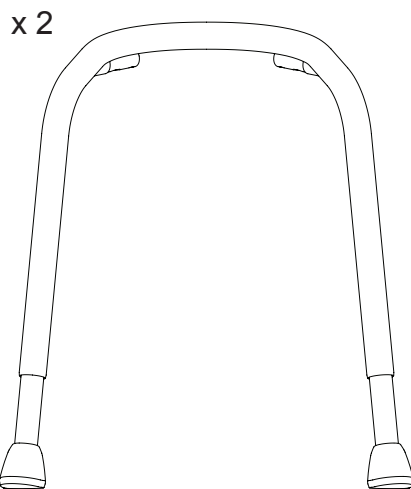





**LET'S SING**

Article No. LSG101

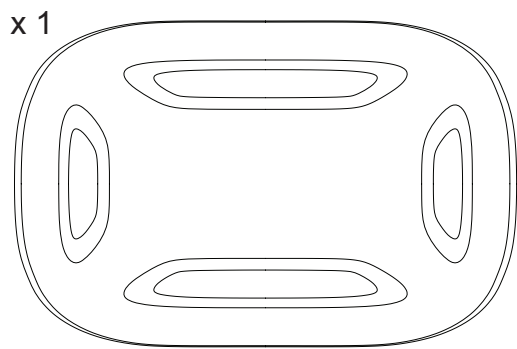

2

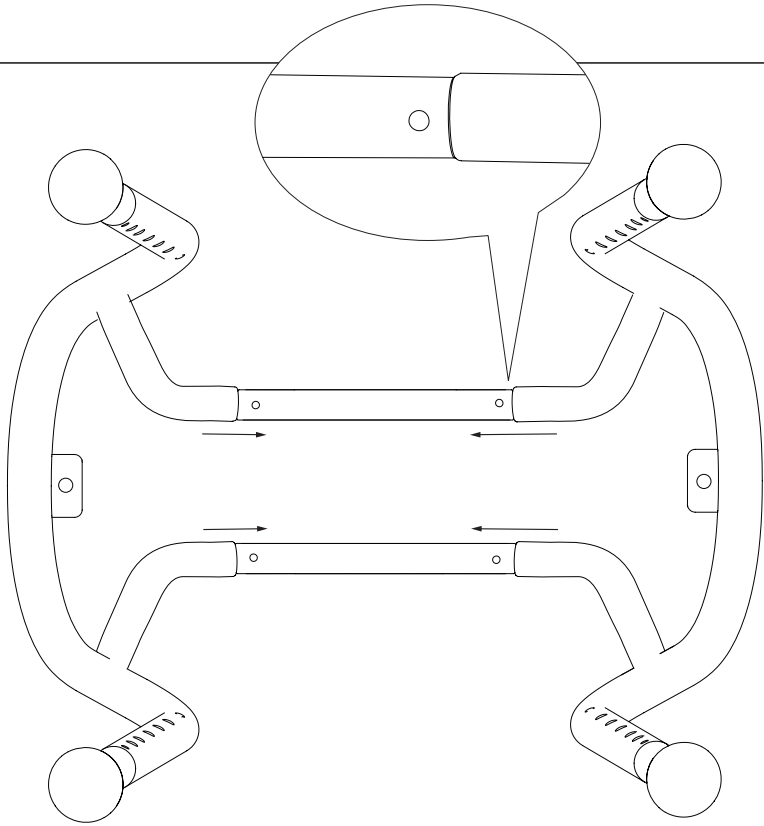

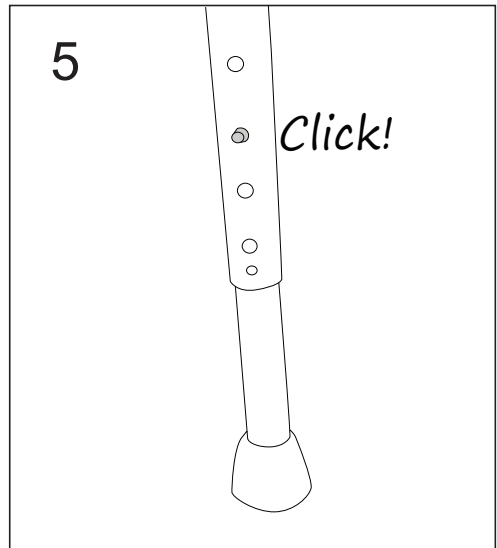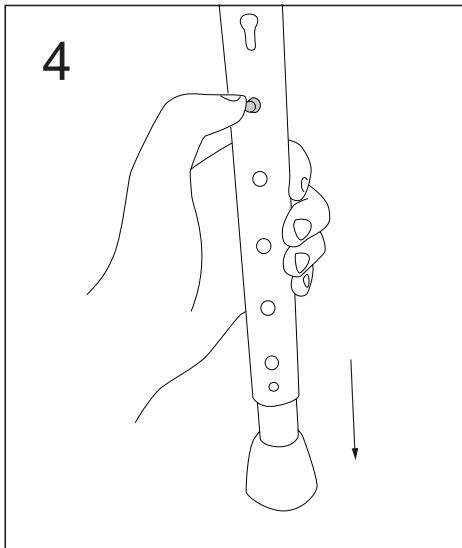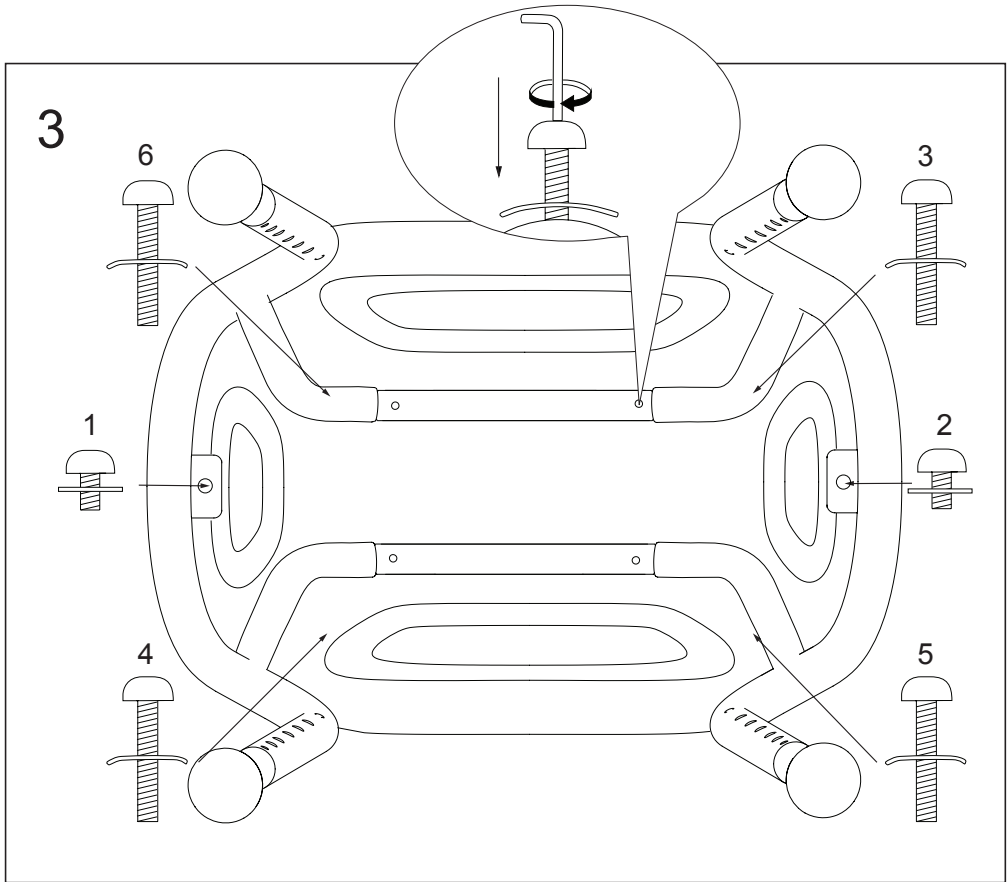

## SVENSKA

Ny duschpall i en modern, tilltalande design för användning i badrum och dusch. Let's Sing har en vacker och stadig utformning för trygg och säker användning. Det är enkelt att justera till önskad sitthöjd med tryckknapparna på benen. Det finns även som extratillbehör en praktisk trådkorg som lätt fästes under sitsen för förvaring av tvål, schampo och duschsvamp.

**Varning:** Stå inte på pallen.

**Varning:** Är produkten defekt ska den inte användas.

**Varning:** Justera alltid samtliga ben till samma höjd för att undvika fallolyckor för att pallen blir ostadig.

**Max användarvikt:** Överlasta inte pallen. Högsta användarvikt är 150 kg.

**Rengöring:** Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit

**Dekontaminering:** Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.

**Reservdelar:** Använd enbart originaltillbehör och originalreservdelar från Trust Care.

### TILLBEHÖR:

**Korg:** En liten korg som fästes under sitsen.

### Tekniska data:





**Material:** Sits ABS, rörram aluminium, Fötter TPE

**Vikt:** 2,4 kg

**Max användarvikt:** 150 kg

**Höjd:** Justerbar från 45 till 56 cm

**Färg:** Sits vit, Ben svarta, Fötter svarta

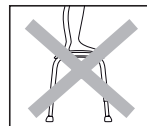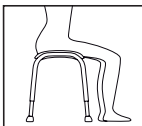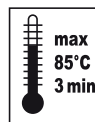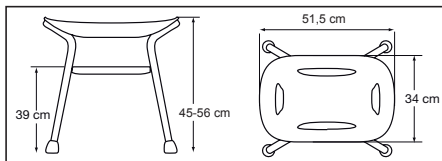

Pallen är avsedd att sitta på. Undvik att stå på pallen för att undvika fallolyckor.

### Återvinning

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.



### Garanti

2 års garanti mot fel i material och tillverkning.

### Tillbehör

#### Let's Sing Trådkorg.

En elegant trådkorg inns som tillbehör till Let's Sing. Enkel och praktisk att applicera under sitsen med en enkel snäppanordning.

Trådkorgen är bra för att förvara tvål, schampo eller duschsvamp.




#### LET'S SING BASKET


Art no. LSG107



**Enkel rengöring:** Rengör med diskmedel eller såpa i ljummet vatten. Använd en mjuk svamp.

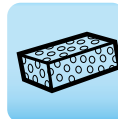

**Grundlig rengöring:** Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit.

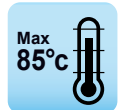

#### Dekontaminering:

Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.