

Savanah toaförhöjning



Art.nr : AA2112, AA2114Y, utan lock. AA2112L, AA2114L med lock

Användaranvisning



Savanah toaförhöjning kan monteras på alla toaletter. Monteringens görs utan verktyg.

Lägg toaförhöjningen med undersidan upp på ett fast underlag. Öppna påsen med fästen. Skruva på fästena på toaförhöjningen. Se bild A.

Vänd toaförhöjningen rättvänt och sätt den på toalettskålen med den smalare utskärningen framåt och fästena bakåt. När den främre läppen möter toalettstolen skruvas den fast. Se bild B.

Det invändiga måtten är: Bredd 22 cm och längd 36 cm.

Savanah finns i tre förhöjningar 5, 10, 15 cm:

Utan lock: AA2112 5 cm, AA2114Y 10 cm, AA2116 15 cm

Med lock: AA2112L 5 cm, AA2114L 10 cm, AA2116L 15 cm

Extra fästen i par: 091543305

Tillbehör, stänkskydd: 091081462

Max brukarvikt 190kg.

Savanah toaförhöjning kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.