


1. Egenskaper

Ryggstödet är tillverkat av pulverlackerad stålram. Den består av bas med stegad vinkeljustering av ryggstödet, en sits och fällbara armstöd. Ryggstödet är tillverkat av slitstarkt och andningsbart tyg med en extra huvudkudde för ökad komfort. Justerbar vinkel möjliggör individuell anpassning till användarens behov vid liggande eller sittande.

Ryggstödet delar:

- a) ryggstödsvinkeljustering
- b) ryggstöd
- c) huvudkudde
- d) armstöd
- e) sätesyta

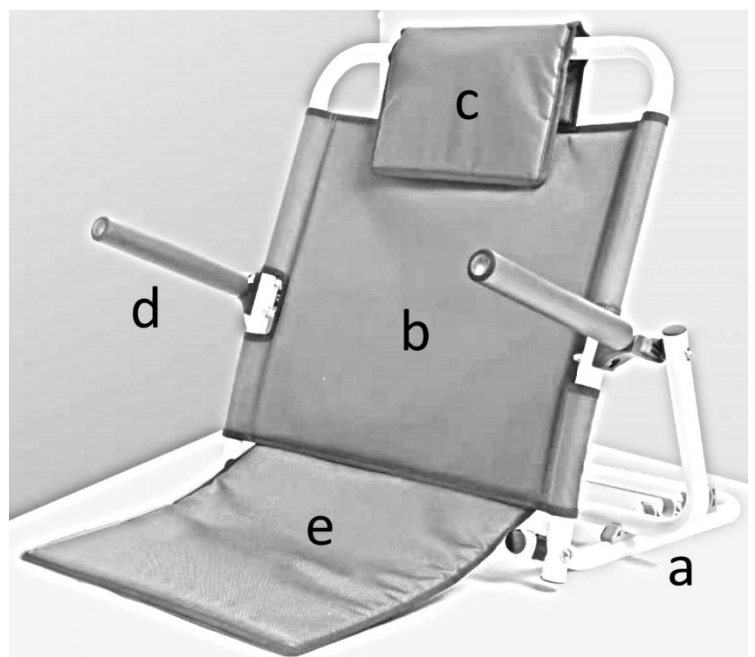

2. Användning

Ryggstöd är en extra utrustning avsedd för användare med nedsatt rörlighet och som är i liggande ställning permanent, vilket förhindrar eller hindrar att utföra dagliga aktiviteter utan hjälp. Ryggstödet hjälper till att bibehålla halvsittande position utan att behöva hållas av den andra personen. Den används också för att luta användaren till upprätt position genom att gradvis vänja det kardiovaskulära systemet vid sittande. Ryggstödet rekommenderas för användning i hemmet eller på vårdinrättningar.

3. Justering

Stödets ryggvinkel är justerbar i steg från 25-57 cm. Armstöden har en fäll-/uppfällningsfunktion.

3. Teknisk data

Totalbred	55 cm
Innerbredd	50 cm
Total djup	50 cm
Lutningsvinkeljustering	25-57 cm
Vikt	3,78 kg
Max belastningsvikt	136 kg
Färg	Vit/Blå

5. Notera

Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av ryggstödet, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Rengöring och Underhåll

Gör en visuell inspektion av alla skarvelement (klämmor, gångjärn) på ryggstödet minst en gång var tredje månad inklusive:

- skick på spärrmekanismen
- stabilitet och utseende på ramen

Rengöring

Kontrollera ryggstödet tekniska skick regelbundet:

- Rengör ramen med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- **Använd inte** för rengöring: starka poler- och rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och följaktligen - förlust av garantirättigheter).

7. Förvarings- och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats.

Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas

9. Etikett

	Referens-nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinsk hjälpmedel
	Notera		Vänligen läs instruktionerna
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt. Läs mer på:
www.euforia.se Tack för att du valde Euforia AB!