

Schampobassäng för hårtvätt i säng

Vänligen inspektera alla delar noggrant för sprickor/brott före användning.

Detta uppblåsbara schampobassäng stödjer huvudet och nacken bekvämt under schampoprocessen. Denna produkt är avsedd att användas med hjälp av en vårdare när användaren ligger platt i sängen.



Användningsinstruktioner:

1. Blås upp schampobassängen med luft genom munnen eller med en luftpump (ingår ej).
 2. Placera tvättstället under användarens huvud med öppningen i nacken.
 3. Placera änden av avloppsslangen i ett vattentätt avfallskärl. OBS: Se till att vattenbehållaren är lägre än bassängen så att vattnet rinner ut ordentligt.
- Det finns en avtappningsplugg i botten av bassängen om det behövs.
4. Blöt håret, applicera schampo och skölj sedan med vatten.
 5. När allt vatten har runnit ut ur bassängen, ta bort bassängen från under användarens huvud.
 6. Skölj och torka tvättstället ordentligt efter användning. Håll uppblåst i flera timmar efter användning för att säkerställa att den är helt torr innan vikning och förvaring.