


1. Utförande

Underarmskrycka är gjord av ett slitstarkt aluminiumskaft med gummikåpa, mjukt armhålsstöd och ett justerbart handtag. Kryckan har ett brett utbud av justeringar, så den kan användas för korta och långa personer. En ergonomiskt formad underarmskrycka i en universalstorlek är extremt bekväm att använda.

- a) handtag
- b) stöd för arm
- c) justering av handtagets höjd - lås
- d) höjdjustering – övre låsstift
- e) höjdjustering - nedre låsstift
- f) gummilock

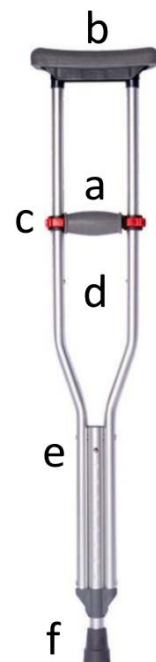

2. Användningsområde

En underarmskrycka är en hjälpanordning som används vid en skada i nedre extremiteterna med en samtidig skada på handleden eller armbågen. Det rekommenderas också för personer som behöver stöd på en krycka när de går efter en skada i nedre extremiteterna för att omskola sin gång, samt för att bibehålla balans och överföra kroppsvikt vid svårare funktionsstörningar i de nedre extremiteterna eller trunk.

Kontraindikationer: Koordinationsstörningar, balansrubbingar, avancerade reumatiska förändringar, skador och funktionsstörningar i de övre extremiteterna som gör det omöjligt att försörja sig på en krycka.

3. Justering

- Kryckan ska vara individuellt anpassad till användaren på ett sådant sätt att axellederna inte höjs för mycket och greppnivån säkerställer en lätt böjning i armbågsleden (i en vinkel på ca 30°).
- För att justera handtagets läge, lås upp de båda röda låsen och ställ in handtaget på lämplig nivå. Lås sedan båda låsen.
- För att justera längden på toppen av kulan, lås först upp båda röda handtagslåsen. Tryck sedan på båda metallstiften på insidan av rören samtidigt och välj lämplig position för justeringshålen. Efter inställning, lås båda metallstiften igen (justering i steg om 2,5 cm).
- För att justera längden på den nedre delen av kulan, tryck in metallstiften på båda sidor av röret och välj lämplig position för justeringshålen. Efter inställning, lås båda metallstiften igen (justering i steg om 2,5 cm).
- Om du använder två kryckor ska alla inställningar vara identiska (handtag, övre och nedre stift). Uttagen ska alltid ha tillförlitlig, stabil kontakt med marken.

Observera!

- Före användning, kontrollera stiftens korrekta läge och se till att kulan är stabil.
- Det rekommenderas att använda två kryckor samtidigt.
- Långvarig användning av kryckor kan orsaka skador på axillärnerverna - sensoriska och motoriska störningar, muskelsvaghet, domningar och, som ett resultat, muskelförlamning kan uppstå.

Obs! Om du har några tvivel om metoden/tekniken att förflytta dig med kryckor, bör du rådfråga en person med lämplig kunskap eller kvalifikationer.

4. Teknisk specifikation

TYP: trestegsreglering Silverfärg, Svartfärg

Max användarvikt: 136 kg

Höjd: 97,5 – 147,5 cm

Vikt: 0,92 kg

5. Kommentarer och rekommendationer

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsregler eller för användning i strid med dess avsedda syfte.

6. Underhåll och rengöring

- Kryckan bör rengöras regelbundet med vatten och milda rengöringsmedel certifierade av National Institute of Hygiene, och torkas torr efter varje användning.
- Använd inte starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller andra lösningsmedel för rengöring.
- Det rekommenderas att kontrollera gummilocket regelbundet. Byt ut locket mot ett nytt om det är slitet.










7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Produkten omfattas av en garanti, vars villkor finns beskrivna i garantikortet du fick. För garantiändamål, vänligen spara ditt köpbevis (kvitto eller faktura).

9. Markeringar

| | | | |
|---|--|---|----------------------------|
|  | Referensnummer |  | Tillverkare |
|  | Serienummer |  | Tillverkningsdatum |
|  | Serienummer |  | Medicinteknisk produkt |
|  | Obs |  | Läs igenom instruktionerna |
|  | Tillverkaren har utvärderat produkten i enlighet med grundläggande krav för medicintekniska produkter. | | |

Hela vårt sortiment hittar du på euforia.se

Tack för att du har valt Euforia!