

Stödhandtag för badkaret, 091078443

Användaranvisning



Längd 45,7 cm. Höjd 34,9 cm.
Fästet har ställbar bredd 8,3 cm – 14 cm.
Max brukarvikt 100 kg

Avsedd användning

Att kompensera för ett funktionshinder genom att tillhandahålla en skena som hjälper till att stabilisera sig när man går in och ut i ett badkar.

Monteringsanvisningar

1. Rengör noggrant området av badkaret där handtag ska fästas.
 2. Skruva loss åtdragningsvredet (1) för att passa bredden på badkarets kant.
 3. Sänk greppstången på badkarets område så att justeringsplattan är på utsidan av badkaret.
 4. Dra åt vredet (1) så att greppstången är ordentligt fastsatt i badkaret.
- Före användning, testa greppstången för att se till att den är ordentligt fastsatt i badkaret.

Användarinstruktioner

Denna produkt ska användas som ett hjälpmedel för att balansera och stödja när man kliver in och ut ur badkaret. Denna produkt är INTE utformad för att bära användarens totala vikt. När du kliver in eller ut ur badkaret, håll handtagsstången stadigt och applicera nedåtriktad kraft på toppen av stången.

Skötsel och rengöring

Rengör med varmt vatten och mildt rengöringsmedel eller hushållsdesinfektionsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor.

Torka noggrant efter varje användning. Kontrollera regelbundet att skenan är tät.

Använd ett silikonsmörjmedel på den gängade skruven på åtdragningsvredet för att förhindra rost.

Varningar

- Dra eller tryck inte på handtaget i sidled, detta kommer att lossa handtaget från badkaret och kan orsaka skada.
- Använd inte greppstången med badkar med läppar.
- Dra inte åt vredet (1) för hårt. Detta kan orsaka skador på handtaget och/eller badkaret.
- Inspektera noggrant alla delar för skador eller slitage före varje användning.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.